

# Handleiding snurkstopper

1. Druk op de power knop en houdt deze 2 seconden ingedrukt om de snurkstopper aan te zetten
2. Om de intensiteit van de snurkstopper aan te passen kan er kort op deze zelfde power knop worden gedrukt (er zijn zes standen weergegeven door het aantal brandende lampen)
3. Als de snurkstopper actief is, ziet men een blauwe led indicator. Bij het opladen zal knipperen tot de batterij vol is
4. De snurkstopper herkent tijdens het slapen aan de hand van geluid of er wordt gesnurkt en stuurt een puls bij detectie. Deze puls is zoals aangegeven in te stellen qua intensiteit.