

SYMBOLLEN



Medisch hulpmiddel



Let op: dit hulpmiddel bevat natuurrubber **latex** dat allergische reacties kan veroorzaken.

BEOOGD GEBRUIK

Het hulpmiddel is bedoeld voor immobilisatie van de voet en enkel

Indicaties voor gebruik

Rebound Air Walker:

Voet- en enkelaandoeningen die baat kunnen hebben bij bewegingsbeperking, zoals:

- Verstuiking van enkel van graad 2 en 3
- Stabiele fracturen
- Verstuiking van pees of ligament

Tijdens de postoperatieve of revalidatiefase. In combinatie met de Achilles Wedge Kit kan ook een gescheurde achillespees worden behandeld.

Rebound Air Walker Low Top:

Voet- en enkelaandoeningen die baat kunnen hebben bij bewegingsbeperking, zoals:

- Stabiele fracturen
- Verstuiking van pees of ligament

Tijdens de postoperatieve of revalidatiefase.

Waarschuwingen en meldingen:

- Zorg ervoor dat u de luchtkamer niet te hard opblaast.
- Voorzichtigheid is geboden als het voorgeschreven wordt aan patiënten met diabetes, vasculaire deficiëntie en neuropathie:
 - De huid moet regelmatig worden gecontroleerd
 - Te hard opblazen van de luchtkamer kan huidbeschadiging veroorzaken bij patiënten met diabetische neuropathie. Laat de luchtkamer leeglopen om compressie te verminderen bij patiënten die ongemak melden of huidverkleuring vertonen.
- Zorg ervoor dat de patiënt controleert dat de bloedsomloop niet wordt belemmerd. Als er een verlies van circulatie gevoeld wordt, of als het hulpmiddel te strak aanvoelt, laat u de luchtkamer leeglopen om de compressie te verminderen tot een comfortabel niveau. Als het ongemak aanhoudt, moet de patiënt onmiddellijk contact opnemen met een professionele zorgverlener.
- Op grote hoogte kan de luchtkamer uitzetten tot voorbij het optimale niveau. Laat de luchtkamer leeglopen om de compressie tot een comfortabel niveau te verminderen.
- De patiënt moet voorzichtig zijn bij het lopen op gladde of natte oppervlakken om letsel te voorkomen.
- Het maximale gewicht van de patiënt is 136 kg (90 kg voor de XS versie)

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Elk ernstig incident met betrekking tot het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de relevante autoriteiten.

De patiënt moet in de volgende gevallen onmiddellijk contact opnemen met een professionele zorgverlener:

- Bij verandering of verlies van de functionaliteit van het hulpmiddel of als het hulpmiddel tekenen van beschadiging of slijtage vertoont die de normale functies belemmeren.
- als pijn, huidirritatie of ongewone reacties optreden bij gebruik van het hulpmiddel.

Het hulpmiddel is uitsluitend bedoeld voor meervoudig gebruik door één patiënt.

GEBRUIK

Hulpmiddel aanbrengen

1. Open de liner door eerst de banden los te maken en de voorste schaal te verwijderen.

Opmerking: Verwijder de luchtbol niet uit de liner.

2. Plaats het been zittend in het hulpmiddel. Het onderbeen moet in een hoek van 90° met de voet worden gehouden en zorg ervoor dat er geen opening is tussen de hiel van de liner en de achterkant van het hulpmiddel.
3. Wikkel de liner stevig om de voet en het been (**Afb. 1**).
4. Plaats de voorste schaal over de enkel en zorg ervoor dat de luchtbol op één lijn ligt met de opening (**Afb. 2**).
5. Maak in de volgende volgorde de enkelband vast (geldt alleen voor de high-top-uitvoering), eerst de voetband, en dan de kuitband. Trek de banden strak en comfortabel aan. Aanpassingen aan de banden kunnen nodig zijn bij veranderingen in het volume van de onderste ledematen
6. Blaas de luchtkamers op door op '+' op de luchtbol te drukken, en laat ze leeglopen door op '-' te drukken. Blaas op of laat leeglopen tot het goed zit (**Afb. 3**).

Let op: Niet te ver opblazen!

Hulpmiddel afstellen

Indien gewenst kunnen er passende aanpassingen aan het hulpmiddel worden gedaan:

- De teenbescherming kan worden afgeknipt (**Afb. 4, 5**) voor een betere pasvorm of als de patiënt een apicale laesie of wond heeft.
- De omtrek van het hulpmiddel rond de kuit kan verbreed worden door de Flex Edge® (**Afb. 6, 7**) in te knippen, om tegemoet te komen aan patiënten met een grote kuit.

Opmerking: Zorg ervoor dat u de kuitband verwijdert voordat u de Flex Edge® doorknipt.

- Als de voorste schaal te lang is, kan hij worden ingekort langs een trimlijn, als die aanwezig is. Verwijder de voorste schaal van het hulpmiddel, draai deze om en knip met een sterke schaar langs de snijlijn. Pas op dat u geen scherpe randen achterlaat.

Hulpmiddel verwijderen

Voordat u het hulpmiddel verwijdert, laat u de luchtkamers leeglopen door op '-' te drukken.

Maak de banden in willekeurige volgorde los en bevestig de banden weer aan zichzelf. Zo kunt u het hulpmiddel de volgende keer eenvoudiger aanbrengen en wordt de levensduur van de banden verlengd. Open de liner om de voet en het onderbeen uit het hulpmiddel te tillen.

Accessoires en vervangende onderdelen

Raadpleeg de Össur-catalogus voor een lijst met beschikbare vervangende onderdelen of accessoires.

Reinigen en onderhoud

Wasinstructies

Het plastic gedeelte van het hulpmiddel kan worden afgenomen met een vochtige doek en milde zeep.

Verwijder de liner uit het hulpmiddel voordat u deze schoonmaakt.

- Met de hand wassen met een milde zeep en goed uitspoelen.
- Aan de lucht laten drogen.

Opmerking: Niet in de machine wassen, in de droogtrommel drogen, strijken, bleken of wassen met wasverzachter.

Opmerking: Vermijd contact met chloor- of zout water. Bij contact afspoelen met schoon water en aan de lucht laten drogen.

AFVOEREN

Het hulpmiddel en de verpakking moeten worden afgevoerd volgens de betreffende plaatselijke of nationale milieuvoorschriften.

AANSPRAKELIJKHEID

Össur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het volgende:

- Hulpmiddel is niet onderhouden zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
- Hulpmiddel is samengesteld uit componenten van andere fabrikanten.
- Hulpmiddel is niet gebruikt volgens de aanbevolen gebruiks-, toepassings- of omgevingsomstandigheden.