





PLANNING

Afname en verzending monsters

- Bekijk deze planning goed voor een optimale voorbereiding van het nemen en verzenden van de monsters.
- Het eerste parasietenmonster kan op elke dag van de week afgenomen worden.
(!) Bij chronische darmklachten raden wij aan de parasietenmonsters te nemen bij verhoogde aandrang, brijachtige ontlasting of diarree. Dit verhoogt de kans op het aantonen van de parasieten.
- Het verse monster moet tegelijk met het tweede parasietenmonster afgenomen plus dezelfde dag opgestuurd worden.
- Het verse monster moet zo spoedig mogelijk na afname verzonden worden. Doe dat alleen op maandag, dinsdag of woensdag.

DAG 1	DAG 2
alle dagen van de week vóór DAG 2	maandag, dinsdag of woensdag
STAP 1 Neem het eerste parasietenmonster (vooral bij klachten als verhoogde aandrang, brijachtige ontlasting of diarree) 	STAP 2 Neem het tweede parasietenmonster  STAP 3 Neem het verse monster  STAP 4 Verzend de monsters naar het laboratorium 

DAG 1 - ZONDAG

STAP 1: Instructie afname 1^e parasietenmonster

- Leg het kleine buisje met gele dop + wattenstaaf klaar
- Vang de ontlasting droog op met het bijgeleverde fecesopvangsysteem
- Trek de latexvrije handschoenen aan
- Schroef het gele dopje van het buisje en leg deze op een schoongemaakt oppervlak
- Haal de wattenstaaf uit de koker en prik deze in de ontlasting en zorg dat er een klontje ontlasting aan zit
- Breng de ontlasting over in de vloeistof in het buisje beweeg het wattenstaafje **voorzichtig** op en neer met een draaiende beweging
- Plaats de gele dop op het buisje en draai deze goed aan
- Gooi de handschoenen en koker met vieze wattenstaaf weg bij het normale afval
- Bewaar het eerste monster voor parasietenonderzoek in de RigidSafetyBag bij kamertemperatuur tot het opsturen van alle monsters
(!) Sluit de RigidSafetyBag nog niet!
- Ga op maandag, dinsdag of woensdag verder met stap 2, 3 en 4




DAG 2 - MAANDAG, DINSDAG OF WOENSDAG

STAP 2: Instructie afname 2^e parasietenmonster

- Volg voor afname van het 2^e parasietenmonster de instructie van stap 1 tot en met het overbrengen van de ontlasting in het buisje en het goed aandraaien van het gele dopje
- Plaats de wattenstaaf terug in de koker en gooi deze weg bij het normale afval
- Houd de handschoenen aan en ga **direct** verder met stap 3

STAP 3: Instructie afname vers monster

- Gebruik de ontlasting dat als laatste het lichaam heeft verlaten
- Breng met het lepeltje, dat zich in de dop van de buis bevindt, ontlasting over in de buis
(!) Vul het potje tot de aangegeven streep op het etiket!
- Draai de bruine dop stevig aan
- Gooi de handschoenen weg bij het normale afval
- Ga **direct** verder met stap 4

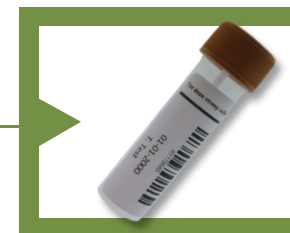

STAP 4: Instructie inpakken en verzenden

- Doe de twee buisjes van dag 2 ook in de RigidSafetyBag (bij het eerste buisje van dag 1) en sluit deze door de witte strip te verwijderen
- Plaats de RigidSafetyBag samen met het **aanvraagformulier** in de verzendenvolp
- Sluit je verzendenvolp door de witte plakstrip te verwijderen
- Post de envelop met inhoud op **DAG 2** voor de lichte van de brievenbus (vóór 17.00 uur)

