

## Aanbrengen en verwijderen van het Depend Verband Super

Gebruik het inlegverband in een goed passende, aansluitende damesboxershorts of slip, zodat het goed aansluit en op zijn plek blijft zitten.



**Stap 1:** Haal het verband uit de verpakking.

**Stap 2:** Verwijder de papieren beschermstrook aan de onderkant van het verband.

**Stap 3:** Plak het verband in een aansluitende, elastische damesboxershorts of slip. Druk het verband goed aan, zodat het niet kan omvouwen of verschuiven. Trek het ondergoed omhoog en zorg voor een goede aansluiting in het kruis.

**Na gebruik:** Verwijder het materiaal eenvoudig door het voorzichtig uit uw ondergoed te trekken en gooi het bij het restafval in de prullenbak. Het verband is niet doorspoelbaar.

### Tips:

Om te zorgen dat het inlegverband goed blijft zitten en u onbeperkte bewegingsvrijheid heeft, blijven onze plakstrips goed plakken. Hierdoor kan het zijn dat uw inlegverband moeilijk uit delicaat ondergoed te verwijderen is. Heeft u hier last van? Plak het inlegverband voordat u het in uw ondergoed plakt, eerst op bijvoorbeeld uw jeans of een theedoek en vervolgens pas in uw ondergoed. Door het stof verliest de plakstrip iets aan plakkracht.

Gebruik voor het weggooien van uw gebruikte inlegverbanden geparfumeerde zakjes om vervelende geurtjes te voorkomen.



Depend®-inlegverbanden en inlegkruisjes zijn ontworpen voor vrouwen om het onvrijwillige verlies van een kleine hoeveelheid urine op te vangen. De meerderheid van de gebruikers zal lichamelijk actief zijn. De gebruikers hebben allemaal last van zeer lichte tot matige blaasincontinentie. Het product is ontworpen om de huid droog te houden, totdat het product dient te worden vervangen.