

Aanbrengen & verwijderen van Depend Bed Onderlegger

Stap 1: Haal de Depend Bed Onderlegger uit de verpakking en vouw deze uit.

Stap 2: Leg de Bed Onderlegger volledig uitgevouwen op uw matras, (rol)stoel of bank. Zorg dat het midden van de bed onderlegger zich onder uw billen bevindt.

Na gebruik: Depend Bed Onderleggers zijn geschikt voor eenmalig gebruik. Gooi deze na gebruik bij het restafval in de prullenbak.

Tip: Gebruik voor het weggooien van de door u gebruikte bed onderleggers geparfumeerde zakjes om vervelende geurtjes te voorkomen.



De Depend®-bed onderleggers zijn ontworpen om onvrijwillig verloren urine te absorberen en het beddengoed van de gebruiker tegen urine te beschermen. De Depend®-bed onderlegger is een absorberende matrasbeschermer voor eenmalig gebruik. Het product kan in direct contact komen met de huid van de gebruiker. De gebruiker kan een voortdurende gebruiker van het product zijn en kan in zeldzame gevallen last krijgen van een open wond, zoals een doorligwond.