

# Romed®

Handleiding

Standaardrolstoel  
Dynamic

[www.romed.nl](http://www.romed.nl)

REF: WHE-01

Van Oostveen Medical B.V., Romed Holland  
Herenweg 269, 3648 CH Wilnis, Holland



## Montage instructie

1. Haal de gehele inhoud uit de doos. Vouw het rolstoelframe uit door aan de zijkanten van het frame naar buiten te trekken totdat het volledig is geopend.
2. Plaats de voetsteunen op de rolstoel door de ophangbeugel aan de voorkant van het frame te plaatsen en de voetsteun op de pinnen te plaatsen zoals weergegeven op afbeelding A..
3. Om de hoogte van de voetplaat aan te passen, draait u de bout op de voetsteun los. Schuif de voetplaat op de gewenste hoogte en vergrendel de moer (afbeelding B).
4. De Dynamic rolstoel wordt geleverd met een kuitband voor extra ondersteuning. Zoek de klittenbandstrips en rol de riem over de voetsteun en bevestig met de klittenbandsluiting (afbeelding C).

## Gebruik en veiligheid (1/2)

**Wielvergrendeling** - Schakel beide wielvergrendelingen in voordat u in of uit de stoel gaat, voorover leunt in een stoel of in een lift of rolstoellift bent. De vergrendelingen worden geactiveerd door de hendel volledig naar voren te duwen. Aanpassingen aan vergrendelingen worden gedaan door de moer op de vergrendelingsbout los of vast te draaien. Vergrendel de vergrendelingsschoen ten minste 3 mm door de klem naar het achterwiel te schuiven terwijl de handgreep in de vergrendelde stand staat. Draai de moer en bout vast om ze op hun plaats vast te zetten. Test op correcte vergrendeling vóór daadwerkelijk gebruik.

**Banden** - Massief rubberen banden hebben minimaal onderhoud nodig, maar moeten af en toe met een vochtige doek worden schoongemaakt. Vervang als de banden ernstig versleten raken of barsten verschijnen.

**Verwijderen van wegdraaibare voetsteunen / beensteunen** - Ontgrendel de vergrendeling door op de voorste tuigagehendel te drukken. Zwenk de voetsteun naar buiten en opzij. Optillen om opnieuw te verplaatsen.



Afbeelding A



Afbeelding B



Afbeelding C

## Gebruik en veiligheid (2/2)

**Algemeen onderhoud** - Veeg verchromde onderdelen minstens één keer per week schoon met een schone, zachte doek. Alle metalen onderdelen kunnen worden gereinigd met autowax of soortgelijke middelen. Bij blootstelling aan vocht onmiddellijk drogen. Gebruik geen schurende reiniger die krassen op de afwerking veroorzaakt.

**Rolstoel openen** - Open de rolstoel door hem naar één kant te kantelen en de stoelleuning omlaag te duwen tot hij helemaal open is.

**Rolstoel sluiten/opvouwen** - Klap eerst de voetplaten in de verticale stand. Pak de stoel met beide handen aan de voor- en achterrand vast en til hem op. Of kantel de stoel naar één kant en til hem aan de stoelleuning op.

**Hefarmen** - Hef de armen op door de veerknop in te drukken en de armen uit de voorste aansluitingen te halen.

## Waarschuwing

**Hellingen** - Wees zeker van uw eigen mogelijkheden, beperkingen en kracht voordat u een helling opgaat. De juiste technieken voor het betreden van een helling moeten u worden getoond door een gekwalificeerde vakman. Bij het op- en afrijden van hellingen van meer dan 10 graden is hulp aanbevolen. Als u op een helling moet stoppen, vermijd dan een plotselinge, abrupte beweging wanneer u de beweging hervat. Vanwege de achterwaartse hoek van de stoel kan een plotselinge abrupte beweging instabiliteit veroorzaken. Pogingen om de wielblokkeringsremmen te gebruiken, kunnen leiden tot onbedoeld blokkeren, naar één kant kantelen of plotseling stoppen. Verander niet van richting bij het afdalen van een helling, omdat dit kan leiden tot instabiliteit of kantelen.

**Stabiliteit** - De Dynamic rolstoel is ontworpen om veilig en stabiel te zijn, zolang het zwaartepunt wordt gehandhaafd bij het uitvoeren van normale activiteiten. Wees voorzichtig bij het uitvoeren van activiteiten waarbij uw zwaartepunt in de stoel verschuift. Reik nooit zo ver dat u in de rolstoel moet verschuiven of uit de stoel moet bukken. Wanneer u naar voorwerpen moet reiken waarbij u moet leunen, zorg er dan voor dat de voorwielen in een voorwaartse positie staan waardoor de wielbasis wordt uitgetrokken en de stoel wordt gestabiliseerd.

## Waarschuwing

Probeer de rolstoel niet af te stellen of te bedienen zonder alle instructies in deze handleiding zorgvuldig te hebben gelezen.

Deze rolstoel is niet goedgekeurd als een stoel die in voertuigen van welke aard dan ook kan worden gebruikt. Zet de rolstoelgebruiker altijd op een door de autofabrikant goedgekeurde stoel en gebruik de beschikbare veiligheidssteunen.

Gebruik deze rolstoel niet op wegen, straten of andere oppervlakken met voertuigverkeer.

Probeer niet te rijden op hellingen van 10% of meer zonder de juiste hulp.

Zorg ervoor dat de wielvergrendelingen volledig zijn ingeschakeld bij het in- en uitstappen van de rolstoel of in de lift of rolstoellift.

Stel de voetsteunen niet lager af dan 8 cm van de vloer.

De rolstoel moet op een glad, stabiel en vlak oppervlak staan met de wielvergrendelingen ingeschakeld voordat de gebruiker in of uit de rolstoel wordt verplaatst.

Ga bij het in- of uitstappen niet op de voetsteunen staan en oefen geen gewicht uit op de voetsteunen.

Draai, voordat u naar voren reikt of leunt, de zwenkwielen naar de voorkant van de rolstoel en schakel de wielvergrendelingen in om te voorkomen dat de rolstoel kantelt.

Leun niet voorover en oefen geen gewicht uit op de bovenkant van de rugleuning van de rolstoel. Hierdoor kan de rolstoel kantelen. Wanneer u probeert uw armen over de rug te strekken, reik dan alleen zo ver als uw arm kan strekken zonder dat u uw zitpositie hoeft te veranderen.

Ga NIET op de rolstoel staan.

Gebruik GEEN wielvergrendelingen om uw afdaling van een helling te vertragen.

Abrupt van richting veranderen tijdens het afdalen van een helling kan instabiliteit of mogelijk omvallen veroorzaken.

MAXIMUM GEBRUIKERSGEWICHT: 110KG

## Garantie

De garantieperiode is 6 maanden na factuurdatum.

Deze garantie dekt geen apparaatstoringen als gevolg van verkeerd gebruik of nalatigheid van de eigenaar, of normale slijtage. De garantie geldt niet voor niet-duurzame onderdelen, zoals rubberen accessoires, zwenkwielen en handgrepen, die onderhevig zijn aan normale slijtage en periodiek moeten worden vervangen.

Heeft u een vraag over dit apparaat of de garantie, neem dan contact op met uw dealer.