

Stap 1: Draai de beide schroeven aan de achterkant los totdat de beschermkapjes makkelijk te schuiven zijn.



Stap 2: Schuif de beschermingskapjes over de buis naar achteren en draai de bevestigingsplaatjes weer goed vast. De veiligheidsgreep ziet er nu uit zoals het plaatje hieronder.



Stap 3: Bepaal waar je de veiligheidsgreep wil ophangen. En gebruik een markeerstift om door de gaatjes te tekenen.

Stap 4: Boor de gaatjes, stop de plugjes erin en schroef de veiligheidsgreep vast met de bijgeleverde schroeven.

Stap 5: Schuif de beschermkapjes over de bevestigingspunten.

[Wij wensen u veel gemak met uw veiligheidsgreep van Rh!no.](#)

