

LI GEL PADS STICKY

Groep : De Stop-knop voor pijnlijke menstruaties

Subgroep :



Livia - Gel pads zelfklevende

LIVIA, de uit-knop voor menstruatiepijn!

* LIVIA is technologie ten dienste van de vrouw; een kleine toestelletje dat verlichting brengt bij menstruatiepijn door middel van elektrostimulatie.

* LIVIA werkt met 2 elektrodes die ieder voorzien zijn van klevers voor een perfecte hechting op de huid: de gel pads.

* Het is aangewezen deze 2 gel pads voor iedere menstruatiecyclus te vernieuwen.

* Deze verpakking bevat 6 paar gel pads (dus voor 6 menstruatiecycli)

* Hoe vervang je de gel pads ?

1. Verwijder de gebruikte gel pads van je LIVIA-elektrodes.

2. Open de verpakking van 1 paar LIVIA gel pads.

3. Verwijder de bescherming ter hoogte van het transparante dekplaatje.

4. Plaats de gel pads op de elektrodes en verwijder de witte dekplaatjes.

* Deze gel pad klevers zijn alleen geschikt voor en te gebruiken met het LIVIA-toestelletje.