



MAJESTIC



IQ-8000 & IQ-8000 Plus

GEBRUIKERSHANDLEIDING / GARANTIE

COMFYGO 
mobility



Indhoudsopgave

Voorword	2
Product Prestatie	3
Veiligheidsinstructies	5
Gebruik en bediening	9
Accu en oplader	14
Systemdiagnose	17
Controller	19
Onderhoudsgebieden	23
Leuning	25
Hoofdsteun	27
Koplamp	28
Technische ondersteuning	29
Garantie	30

Een gedetailleerde video-uitleg voor **gebruik en bediening** en koppelen op afstand kunt u vinden op onze YouTube channel. Dit informatie kunt u vinden op pagina 9.

Ga voor al uw reserveonderdelen naar www.ComfyGoMobility.eu

Vergeet niet om uw product te registreren, gedetailleerde informatie kunt u vinden op pagina 29. Als je technische ondersteuning nodig hebt, neem dan contact op met onze klantenondersteuning. Gedetailleerde informatie staat op de achterkant van de gebruikershandleiding en te vinden op pagina 29.



Voorwoord



- Deze Handleiding bevat de bediening, montagemethodes en mogelijke oplossingen als zich een mechanisch probleem voordoet. de handleiding is vantoepassing op onze model: IQ-8000.
- Deze handleiding bevat zowel onderhoudstips voor rolstoelen als probleemoplossingmethoden, dus sla het op waar u het desgewenst kunt openen. Als u ervoor kiest om iemand anders uw rolstoel te laten gebruiken, geef dandezze handleiding ter referentie.
- De annotaties en illustraties in deze handleiding kunnen enigszins afwijken van uwwerkelijke model omdat we onze componenten voortdurend verbeteren en upgraden en ontwerpen.
- Als u niet zeker bent van een operationeel proces, neem dan contact op met uw handelaar onmiddellijk om opheldering te geven.
 - Onjuist gebruik van dit voertuig kan leiden tot letsel. Rijden zonder op te letten- blootstelling aan gevaarlijke omstandigheden, zowel u als anderen kan schaden.
 - Deze elektrische rolstoel is bedoeld om personen die moeilijk of niet kunnen lopencomfortabel te vervoeren
 - Deze elektrische rolstoel is ontworpen om slechts een persoon te vervoeren.



WAARSCHUWINGSBORD

Volg de instructies naast dit symbool nauwkeurig op.
Let op deze instructies, anders kan dit leiden tot lichamelijk letsel of schade aan de gebruiker, rolstoel of het milieu.





1. Product Prestatie

-Deze serie elektrische rolstoelen wordt aangedreven door Li-ion accu's en gebruik gelijkstroommotoren. Gebruikers kunnen de richting bepalen en de snelheid aanpassen met behulp van de joystickbedieningen op de arm. Deze rolstoel moet worden gebruikt bij lage snelheden, goede wegomstandigheden, en kan omgaan met een lage helling.

Prestatieparameters en technische specificaties, IQ-8000

Totale afmeting	38.5" x 23.5" x 37.5" (980x600x950mm)
Vouwmaat	31.5" x 23.5" x 16" (800x600x400mm)
Stoelmat	17.5" x 18" (445x460mm)
Nettogewicht	55 lbs (25.5kgs)
Snelheid	(0.62 mph - 3.7 mph (1 - 6km/h) Max 4 mph
Zithoogte	18.5" (460mm)
Armleun Hoogte	11" (290mm)
Rugleun Hoogte	18.5" (460mm)
Max laadgewicht	286 lbs (130 kgs)
Voorwiel diameter	8 inch (200 mm)
Achterwiel diameter	12 inch (300 mm)
Accu	12AH Li-ion / 20 AH Li-ion
Motor x 2 PCs	DC 24V / 250W X2
Acculading	100 - 240V, 50Hz, 1.5-5A
Controle	24V 50A
Maximale bereik*	10 miles (16 km) / 16 miles (25 km)
Beschermingsgraad	IPX3
Maximale veilige helling	10°
Draaicirkel	≤47 inches (≤1.2m)
Statische stabiliteit	9°
Breedte omkeren	≤59 inches (≤1.5m)
Klimhoek	6°
Bandenspanning	2 kg f/m ²
Obstakel klimmen	2 inches (50mm)

*varieert op basis van gewicht, helling en snelheidsfactore



1. Product Prestatie



Toepassingsgebied

Deze elektrische rolstoel is speciaal ontworpen voor gehandicapten of ouderen met een gewicht van minder dan 130 kg, bedoeld voor gebruik op loopsnelheid. Gebruik dit apparaat niet op snelwegen.



WAARSCHUWING

Mensen met de volgende aandoeningen mogen de rolstoel niet gebruiken.

- Niet-reagerende bovenste ledematen
- Lijden aan dementie of seniliteit
- Niet voor zichzelf kunnen zorgen
- Gebruik beperkt door een medische professional



1. Product Prestatie

-Deze serie elektrische rolstoelen wordt aangedreven door Li-ion accu's en gebruik gelijkstroommotoren. Gebruikers kunnen de richting bepalen en de snelheid aanpassen met behulp van de joystickbedieningen op de arm. Deze rolstoel moet worden gebruikt bij lage snelheden, goede wegomstandigheden, en kan omgaan met een lage helling.

Prestatieparameters en technische specificaties, IQ-8000 Plus

Totale afmeting	38.5" x 26.5" x 37.5" (980x680x950mm)
Vouwmaat	31.5" x 26.5" x 16" (800x680x400mm)
Stoelmat	20" x 18" (510x460mm)
Nettogewicht	61 lbs (27.5kgs)
Snelheid	(0.62 mph - 3.7 mph (1 - 6km/h) Max 4 mph
Zithoogte	18.5" (460mm)
Armleun Hoogte	11" (290mm)
Rugleun Hoogte	18.5" (460mm)
Max laadgewicht	310 lbs (130 kgs)
Voorwiel diameter	8 inch (200 mm)
Achterwiel diameter	12 inch (300 mm)
Accu	12AH Li-ion / 20 AH Li-ion
Motor x 2 PCs	DC 24V / 250W X2
Acculading	100 - 240V, 50Hz, 1.5-5A
Controle	24V 50A
Maximale bereik*	10 miles (16 km) / 16 miles (25 km)
Beschermingsgraad	IPX3
Maximale veilige helling	10°
Draaicirkel	≤47 inches (≤1.2m)
Statische stabiliteit	9°
Breedte omkeren	≤59 inches (≤1.5m)
Klimhoek	6°
Bandenspanning	2 kg f/m ²
Obstakel klimmen	2 inches (50mm)

*varieert op basis van gewicht, helling en snelheidsfactore



1. Product Prestatie



Toepassingsgebied

Deze elektrische rolstoel is speciaal ontworpen voor gehandicapten of ouderen met een gewicht van minder dan 140 kg, bedoeld voor gebruik op loopsnelheid. Gebruik dit apparaat niet op snelwegen.



WAARSCHUWING

Mensen met de volgende aandoeningen mogen de rolstoel niet gebruiken.

- Niet-reagerende bovenste ledematen
- Lijden aan dementie of seniliteit
- Niet voor zichzelf kunnen zorgen
- Gebruik beperkt door een medische professional



2. Veiligheidsinstructies

2.1 Belangrijkste beveiligingsfuncties

- Ingedeeld op basis van het type bescherming: Tegen elektrische schokken, Interne kracht.
- Ingedeeld op basis van het type bescherming: tegen elektrische schokken, Type B toepassing.
- Geclassificeerd op basis van de mate van bescherming van de inlaatvloeistof: 1 PX Ingedeeld op basis van veilig gebruik van een
- Ontvlambaar anesthesiemengsel met lucht of gas gemengd met zuurstof of lachgas ontvlambaar als esthetische gassen voorkomen: Niet-AP/APG-type
- Geclassificeerd op basis van bedrijfsmodus: continubedrijf.
- Nominale spanning: DC 24V.
- Heeft geen beschermend effect op de toepassing van defibrillatorontlading sectie
- Geen signaaluitgang of ingangsgedeelte.
- Veiligheid van geïnstalleerde niet-permanente apparatuur

2.2 Rij aantekeningen

Algemene waarschuwingen tijdens het rijden

- Houd je handen op de armleuning om volledig te kunnen controleren over de rolstoel.
- We raden aan om te oefenen in parken of andere veilige en open plekken totdat er zeker van bent dat u uw rolstoel vakkundig kunt gebruiken.
- Zorg dat je oefent vooruit, stoppen en draaien in cirkels.
- Zorg ervoor dat u, voordat u over de weg gaat rijden, verzorgers bij u heeft en zorg ervoor dat u te allen tijde veilig rijdt.
- Volg alle verkeersregels voor voetgangers, de rolstoel wordt niet als een auto beschouwd
- Blijf op het trottoir en de zebrapaden. Rijd niet in het voertuigwegen.
- Rijd met een constante snelheid, vermijd scherpe bochten en zigzaggen.
- Gelieve de juiste bandenspanning aan te houden, hoe lager of hoger dan aanbevolen druk kan onveilig gebruik of overmatig stroomver.



2. Veiligheidsinstructies

Vermijd rijden in deze omstandigheden tenzij U wordt begeleid door een supervisor

- Rijden bij slecht weer, zoals een regenachtige dag, zware mist, sterkwind, sneeuw.
- Als uw rolstoel nat wordt, kunnen elektronische functies schadeveroorzaken dus veeg al het water onmiddellijk af.
- Rijden in suboptimale omstandigheden zoals modderige gebieden, paden, zand, grind enz.
- Rijden op drukke wegen.
- Rijden op wegen zonder omheining, of in de buurt van een sloot, vijver, etc.
- Als u de spoorlijn moet oversteken, zet u uw rolstoel uit en inspecteer de rupsbanden om er zeker van te zijn dat uw banden veilig kunnen versteken. Elektrische rolstoel is alleen voor persoonlijk gebruik, draag geen mensen of spullen.

Voorzorgsmaatregelen voor bergop en bergaf

- Vermijd het rijden op steile heuvels, plaatsen met oneffen wegen, hogetrappen, kanalen en andere steile hellingen
- Vermijd rijden op steile hellingen, het hellingsbereik moet kleiner zijn dan 9 graden.
- Bedien de controller zorgvuldig tijdens bergopwaarts gebruik.
- Blijf vooruitgaan tijdens bergopwaartse beklimmingen of bergafwaartsehellingen en stop niet
- Gebruik je remmen om je snelheid te verminderen tijdens een afdalingbeweging.
- Vermijd zijwaarts rijden op een steile helling.
- Traplopen wordt niet aanbevolen en vermijd het oversteken van hoge stappen.
- Vermijd het oversteken van brede sloten.
- Houd tijdens het oversteken van een sloot een hoek van 90° tussen de banden aan en de sloot
- Zet de rolstoel niet in de handmatige modus tijdens bergopwaartse en/of bergafwaarts bewegen
- Als de rolstoel niet goed werkt bij een verkeersoversteekplaats, neem dan a.u.b vraag dan direct een voorbijganger om hulp. Zet de rolstoel ook op handmatige modus en duw de rolstoel om de scene te verlaten.





2. Veiligheidsinstructies

Voorzorgsmaatregelen voor zorgverleners

- Zorgverleners moeten bevestigen dat de voeten van de gebruikers op de voet-juiste positie van de rugleuning en zorg ervoor dat er geen kleding aan de wielen
- Verzorgers moeten de rolstoel op een steile of lange helling.

2.3 Andere belangrijke mededelingen

Reparatie en refit

- Als uw rolstoel een reparatie of refit nodig heeft, neem dan contact op met uw verkoper of serviceafdeling. Probeer uw rolstoel niet aan te passen door uzelf, aangezien dit een ongeval of een storing in de rolstoel kan veroorzaken.
- Voeg geen ander gewicht toe aan deze stoel dan de goedgekeurde accessoires, aangezien dit een onbalans kan veroorzaken en de werking van de rolstoel kan beïnvloeden. Houd uw rolstoel te allen tijde droog.
- Bewaar of gebruik uw rolstoel niet op natte plaatsen. Als de rolstoel nat wordt, droog hem dan onmiddellijk af.

Iemand anders in de rolstoel duwen

- Als er iemand op de rolstoel zit, moet u ervoor zorgen dat: gebruik het alleen als de koppeling in de handmatige modus staat en niet in de elektrische modus.

2.4 Levensduur

- De levensduur van dit product is 5 jaar na de productiedatum. Gebruik het product binnen een beperkte periode. Om ongelukken te voorkomen, wordt het niet aanbevolen om het langer dan de aanbevolen periode te gebruiken. Raadpleeg het label op uw toestel om de fabricagedatum van uw rolstoel te vinden

2. Safety Instructions



2.5 Elektromagnetische compatibiliteit

- Houd de rolstoel uit de buurt van sterke magnetische velden en grote inductieve elektrische apparatuur, zoals radio- of tv-stations, on aardse radiostations of radiostations die mobiele telefoons uitzenden. Indien hier zijn bronnen van elektromagnetische interferentie in de buurt, blijf alsjeblieft zo ver mogelijk van die bronnen om elektromagnetische interferentie te vermijden, aangezien uw elektrische rolstoel elektromagnetische interferentie moet vermijden.

Notities:

- Deze elektrische rolstoel voldoet aan de elektromagnetische compatibiliteitsvereisten van de YY0505-norm.
- Installeer en gebruik de elektrische rolstoel altijd op basis van de verstrekte informatie over elektromagnetische compatibiliteit.
- Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur zal de prestaties van de elektrische rolstoel beïnvloeden. Vermijd daarom het gebruik in de buurt van een sterke elektromagnetische storing, zoals een mobiele telefoon of magnetron.
- Raadpleeg de bijlage voor de kennisgeving en de verklaring van de fabrikant.
- Uitschakelspanning voor de accu is 23V.
- Deze elektrische rolstoel is een D-klasse in GB/T 18029.21-2012, een rolstoel met elektronische differentieelbesturing en handrem.

2.6 Compatibiliteit met andere apparaten

- Elektrische rolstoelen mogen niet worden gebruikt in combinatie met eventuele andere apparaten. Als u er een apparaat op moet aansluiten neem dan alstublieft contact met ons op zodat we kunnen bevestigen dat de rolstoel geen nadelige gevolgen zal ondervinden.



3. Gebruik en bediening

Bezoek YouTube voor een gedetailleerde uitleg over gebruik en bewerkingen. Zoek eenvoudig "ComfyGo Mobility Lichtgewicht opvouwbaar elektrische rolstoel (Model # IQ-9000)" op YouTube of scan de QR-code met de camera van uw smartphone.



Bezoek YouTube voor een gedetailleerde afstandsbedieningskoppeling uitleg. Zoek eenvoudig " ComfyGO Mobility elektrische rolstoel Koppelen op afstand" op YouTube of scan de QR coderen met de camera van je smartphone.



www.youtube.com/c/ComfyGO



3. Gebruik en bediening



3.1 Rolstoelaanpassingen

Uw rolstoel uitvouwen

Houd de rugleuning met een hand vast en gebruik uw andere hand om de stoel vast te houden en de stoel uit te klappen (Afbeelding 1).



Afbeelding 1




Afbeelding 2

Vouw de rolstoel volledig uit en maak vervolgens de slot onder de rugleuning (Afbeelding 2). Zorg er voor gebruik voor dat het slot is goed beveiligd, anders zal het vouwen tijdens het rijden.

Fully unfold the wheelchair, and then fasten the lock located under the backrest (Afbeelding 2)

Uw rolstoel opvouwen.

Draai de vergrendeling los (Afbeelding 3), houd met een hand de rugleuning vast en trek met uw andere hand aan de zitting en klap deze in (Afbeelding 4)

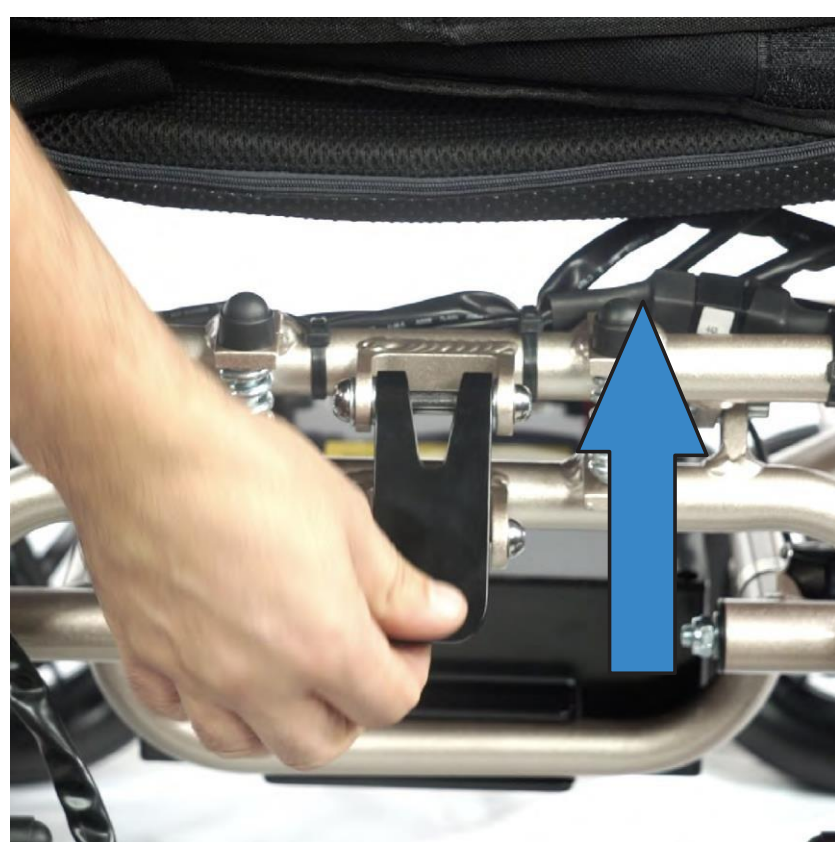

Afbeelding 3



Afbeelding 4



3. Gebruik en bediening

De controller installeren

Steek de controller in de armleuningbuis. Houd de controller in horizontale positie (Afbeelding 5). Vergrendel vervolgens de schroef (Afbeelding 6).




Afbeelding 5




Afbeelding 6


Demonteer de accu door eerst de batterijstekker en de controllerstekker los te koppelen (Afbeelding 7) en vervolgens de schroef op de batterijhouder los te draaien (Afbeelding 8). Installeer de batterij door de batterijgroef in de achterbuis te plaatsen (Afbeelding 9), draai de schroef los. Verbind vervolgens de batterijstekker met de controllerstekker.

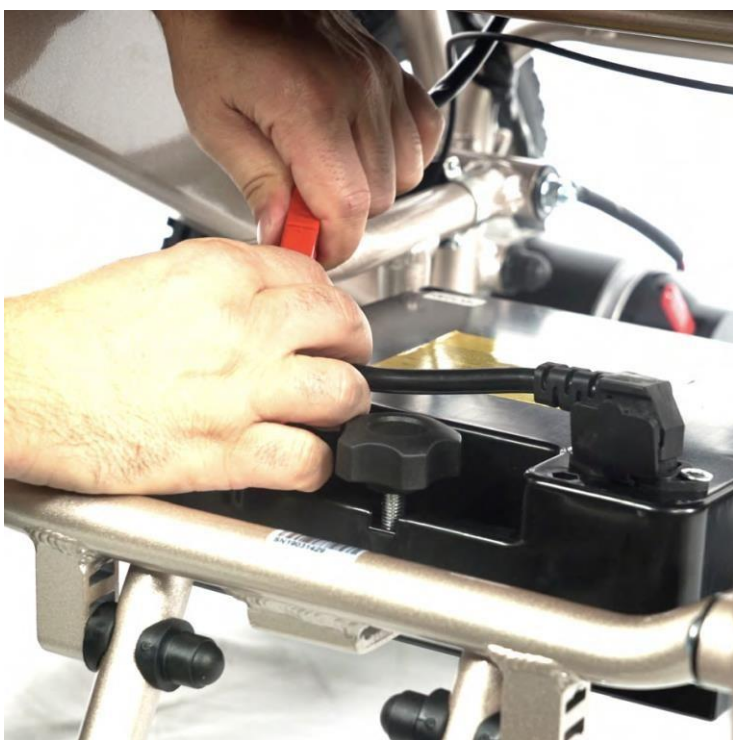

Afbeelding 7

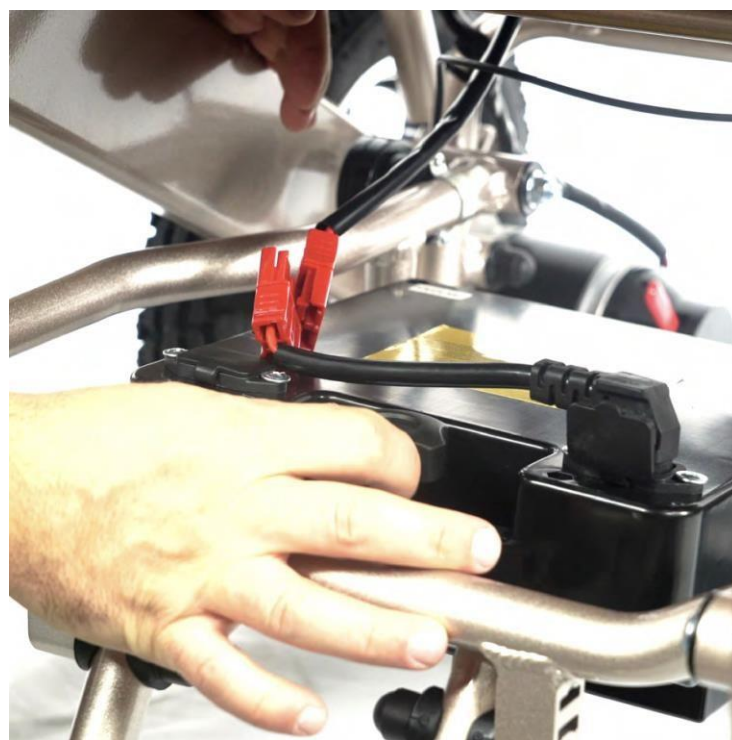

Afbeelding 8

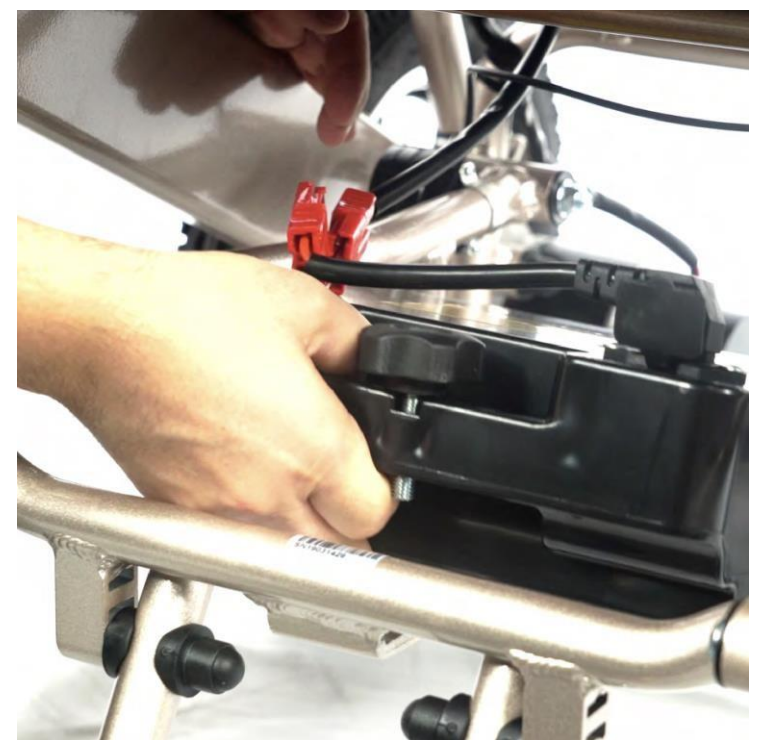

Afbeelding 9

3. Gebruik en bediening



Voetplaat

De voetplaat kan omhoog of omlaag worden getrokken.

De anti-tipper installeren en demonteren

Druk op de knop om de anti-tipper te installeren/demonteren (Afbeelding 10-11).



Afbeelding 10



Afbeelding 11

Uw armleuning omhoogklappen

Druk met een hand op de armsteunknop en klap met de andere hand uw armsteun omhoog (Afbeelding 12). Druk de armsteun naar beneden in de juiste positie om het vast te zetten. (Afbeelding 13).



Afbeelding 12




Afbeelding 13




3. Gebruik en bediening

Schakelen tussen handmatige modus en elektrische modus

Handmatige modus: Schake! de stroom uit en trek de rem aan, trek dan de koppeling uit de groef en draai hem 30° (Afbeelding 14 - 15).

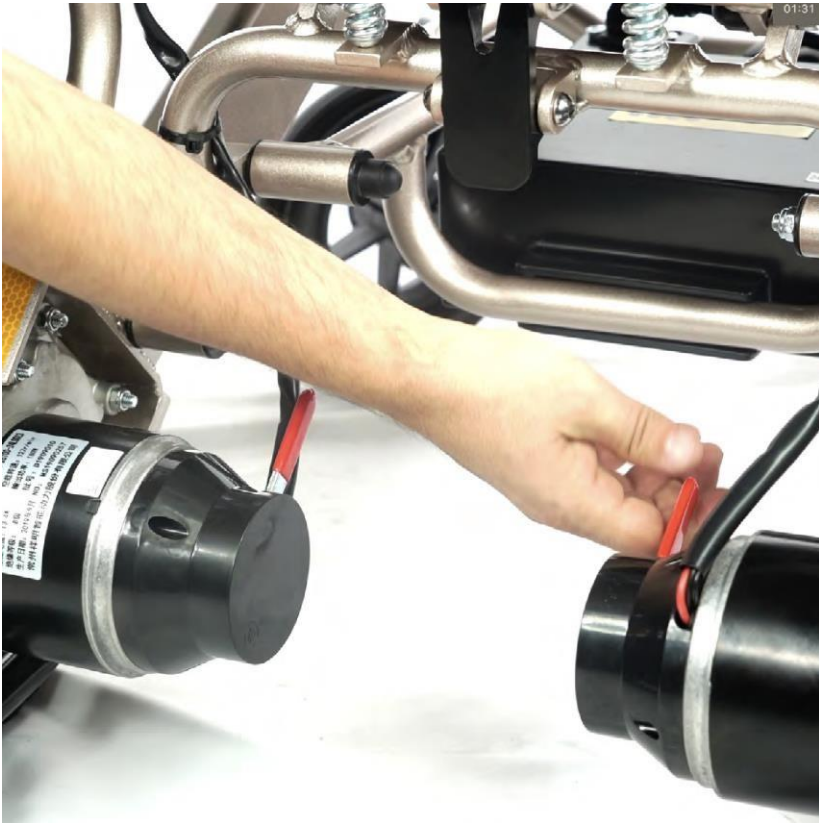


Afbeelding 14

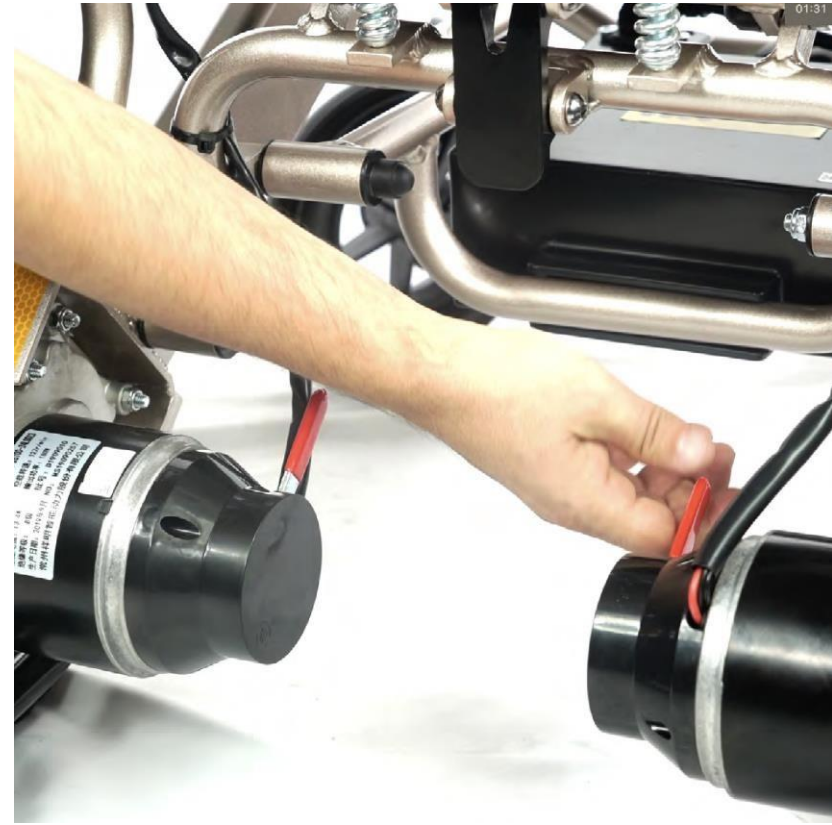

Afbeelding 15

Electrische modus: Draai de rode koppeling en plaats deze terug in de groef, duw de rolstoel lichtjes totdat u een klikgeluid hoort (Afbeelding 16)

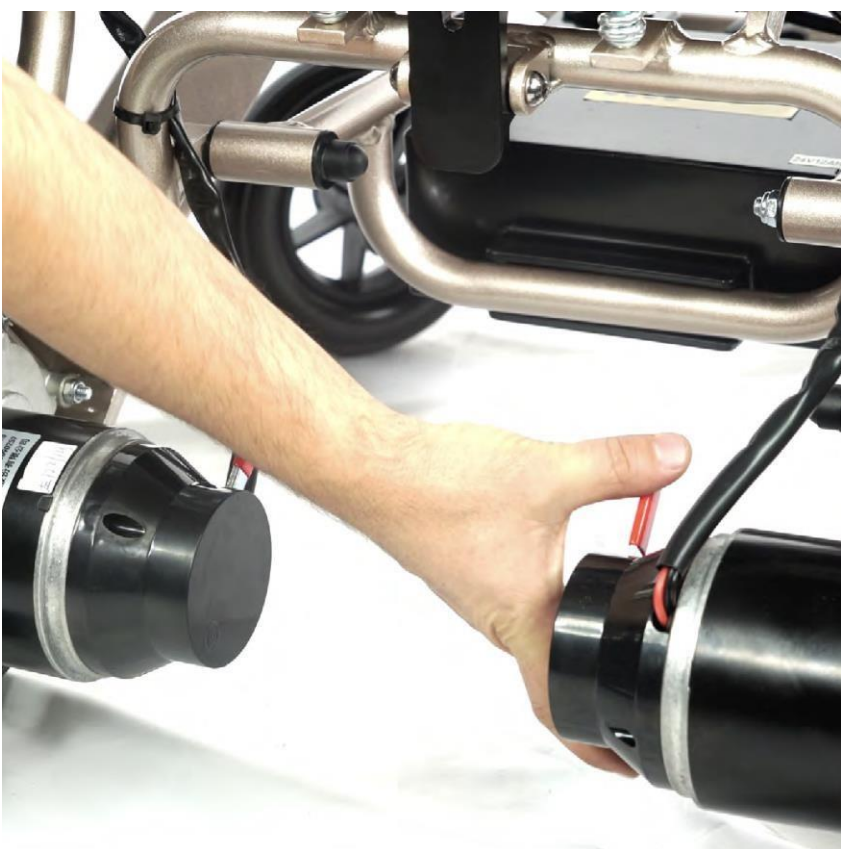

Afbeelding 16

Controleer bij het overschakelen van handmatige naar elektrische modus of beide zijkoppelingen in de groeven zijn geplaatst. Als een van de zijkoppelingen niet volledig in de groef is geplaatst, kan dit ertoe leiden dat de eenheid omvalt.

4. Accu en oplader



4.1 Opladerveisten

De oplader mag alleen worden gebruikt voor het opladen van de accu. Gebruik uw rolstoel niet tijdens het opladen.

Technische gegevens oplader:

Ingangsspanning: AC220V (110V) $\pm 10\%$

Uitgangsspanning: 24V/DC Uitgangsstroom: 1.5~5

Beschermingsniveau

tegen binnendringing: IPX1

Voldoet aan vereiste: GB 4706.1-2005 en GB 4706.18-2005

4.2 Gebruik en onderhoud van de oplader

BELANGRIJK :

-Een volledige lading vereist tussen de 8 - 10uur, laad niet meer dan 24uur op.

Om de levensduur van uw accu niet te verkorten, dient u de accu minimaal een keer per maand op te laden als de rolstoel niet wordt gebruikt.

-Stop niet met opladen totdat het oplaadproces is voltooid.

-Herhaald gebruik van minder dan volledig opgeladen batterijen zal de levensduur van uw accu verkorten.

-Wanneer de accu volledig is opgeladen, wordt de stroomindicator groen. Stop niet met opladen voordat deze volledig is opgeladen. Deze indicator brandt.

-Nadat het opladen is voltooid, moet u ervoor zorgen dat u de voedinguitschakelt, anders zal de accu langzaam ontladen.

-Laad niet langer dan 24 uur op. Overladen is gevaarlijk.

Volg deze regels om problemen met opladers te voorkomen

- De elektrische rolstoel wordt niet geleverd met een oplader. Gebruik een nationale standaard oplader met een uitgangsspanning van 24V/DC 1,5A~5A.

- De oplader moet tijdens het opladen altijd goed geventileerd zijn.

- Stel de rolstoel niet bloot aan zonlicht en vochtigheid.

- Tijdens het opladen moet het temperatuurbereik tussen 10 en 50 graden Celsius liggen. (50 tot 122 graden Fahrenheit)

- Als de accu wordt opgeladen bij temperaturen buiten dit bereik, kan de accu beschadigd raken.

- Gebruik of zit nooit op de elektrische rolstoel tijdens het opladen.





4. Accu en oplader

Het is normaal dat de ventilator een geluid maakt tijdens het opladen. Dit is om de oplader te koelen en vormt geen probleem.

- Voorkom dat er tijdens het opladen vloeistof in de oplader komt.
- Plaats uw oplader niet op brandbare voorwerpen zoals: brandstof, voetsteun of zitkussen.
- Blijf uit de buurt van vlammen tijdens het opladen van de batterij, aangezien vlammen een batterijbrand of -explosie kunnen veroorzaken.
- Rook niet tijdens het opladen.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact als het stopcontact of uw handen nat zijn, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken.

4.2.1 Type 1, De rolstoel direct opladen terwijl de accu is aangesloten op de rolstoel

Om de accu op te laden, sluit u de lader aan met een voeding en accubakstekker.

Volg de onderstaande instructies om het laadproces te voltooien:

Stap 1: Zorg ervoor dat de groef van de oplader niet geblokkeerd is.

Stap 2: Zorg ervoor dat de elektrische rolstoel is uitgeschakeld.

Stap 3: Koppel de verbindingen tussen de accubak en de controller los

Stap 4: Sluit de uitgangstekker van de lader aan op de stekker van de accubak

Stap 5: Sluit de stekker van de oplader aan op de voeding, het rode lampje gaat branden.

4.2.2 Type 2, Opladen via je controller

Om de accu op te laden, sluit u de oplader aan op de voeding.

Volg de onderstaande instructies om het laadproces te voltooien:

Stap 1: Zorg ervoor dat de groef van de oplader niet geblokkeerd is.

Stap 2: Zorg ervoor dat de elektrische rolstoel is uitgeschakeld.

Stap 3: Zorg ervoor dat de accu en de controller zijn aangesloten.

Stap 4: Sluit de uitgangstekker van de oplader aan op de aansluiting onder de controller

Stap 5: Sluit de hoofdstekker van de lader aan op de stroomvoorzieningen het rode lampje gaat branden.

4. Accu en oplader



4.3 Gebruik en onderhoud van accu

- Het onjuist plaatsen van de accu kan explosiegevaar veroorzaken. Gebruik alleen accu's die bij dit apparaat zijn geleverd.
- Neem contact op met uw verkoper als u vervangende accu's nodig heeft.
- Let er bij het plaatsen van de accu op dat de batterijpolen correct zijn geplaatst. Raadpleeg altijd de oplaadinstructies die hier worden gegeven om een optimale levensduur van uw accu's te behouden





5. Systeemdiagnostiek

De LED-indicatoren geven diverse technische storingen aan die van invloed kunnen zijn op de volgende onderdelen: de motor, de remmen, de accu, de draadverbindingen. Gebruik de onderstaande tabel om het specifieke technische probleem op te lossen. Technische problemen kunnen meestal worden opgespoord zonder andere service-instrumenten, maar aarzel niet om contact met ons op te nemen als dat toch nodig is:

Raadpleeg de tabel voor audiosignaalindicatie.

5. Systeemdiagnostiek



Beschrijving van LED-licht	De betekenis van LED-licht	Uitleg & Oplossing
Alle LED-lampjes zijn uit, er is geen geluid.	De stroom is uitgeschakeld, de rolstoel staat in stand-by of slaapstand.	Er is slecht contact met de voeding. Zekering is doorgeslagen of doorgebrand.
Alle LED-lampjes branden.	De stroom is ingeschakeld en de zelfdiagnose staat in de werkmodus	Geen
LED-lampjes zijn gedeeltelijk uit.	Lichten geven aan hoeveel acculading er nog is.	Lichten die gedeeltelijk uit zijn, geven aan dat de accu gedeeltelijk is opgeladen.
Het meest linkse rode LED-lampje brandt.	De accu is bijna leeg.	Het apparaat moet vóór gebruik worden opgeladen of de accu werkt niet goed en kan niet worden opgeladen.
Twee korte pieptonen, LED-lampjes knipperen twee	De linkermotor werkt niet goed	De linkermotorverbinding is mogelijk verbroken of de draad is mogelijk losgekoppeld.
Drie korte pieptonen, LED-lampjes knipperen drie keer	De linker magneetrem werkt niet	De linker magneetremverbinding is verbroken of de draad is mogelijk losgekoppeld.
Vier korte pieptonen, LED-lampjes knipperen vier keer	De rechtermotor werkt niet	De juiste motorverbinding is verbroken of de verbindingsdraad is mogelijk losgekoppeld.
Vijf korte pieptonen, LED-lampjes knipperen vijf keer	De rechter magneetrem werkt niet	De rechter magneetremverbinding is verbroken of de verbindingsdraad is mogelijk losgeraakt
Zes korte pieptonen, LED-lampjes knipperen zes keer.	Controller is in de hogestroombeveiligingsstatus gekomen	Controleer de remmen en het motoraandrijfmechanisme om er zeker van te zijn dat deze niet vastloopt. Controleer de stroom met een ampèremeter en als de stroom niet te hoog is, werkt uw controller mogelijk niet goed.
Zeven korte pieptonen, LED-lampjes knipperen zeven keer.	Joystick is defect	Joystick reset niet of de connector zit los
Acht korte pieptonen, LED-lampjes knipperen acht keer	Controller kan defect zijn	Raadpleeg uw handelaar voor onderhoud
Negen korte pieptonen, LED-lampjes knipperen negen keer	Controller werkt mogelijk niet goed	Raadpleeg het servicecentrum voor onderhoud



6. Controller

6.1 Controller Paneel



6.2 Controller Gebruik

De aan/uit-schakelaar

Druk op de aan/uit-knop, het scherm licht op en de controller wordt ingeschakeld. Druk op de aan / uit-knop, het scherm gaat uit en de controller is uitgeschakeld.



In een noodgeval kunt u de stroom direct uitschakelen door ook op de aan/uit-knop te drukken.

Slaapstand

Als de joystick langer dan 20 minuten niet wordt gebruikt, wordt de stroom automatisch uitgeschakeld en gaat het systeem naar de slaapstand. Het systeem kan opnieuw worden geactiveerd door op de aan/uit-knop te drukken.

Snelheidsaanpassing

De rijnsnelheid van de rolstoel kan worden aangepast aan de voorkeur en omstandigheden van de gebruiker. Pas de snelheid aan met behulp van de afnameknop en de toenameknoppen dienovereenkomstig.



6. Controller



De snelheid is verdeeld in vijf secties, in de volgende bereiken: 20%, 40%, 60%, 80%, 100% van de maximale snelheid.

Eerste versnelling: 20% of maximale snelheid.

Vijfde versnelling: 100% van de maximale snelheid.

Claxon

Druk op de claxonknop om de claxon te gebruiken.


Acculadingsmeter

De acculadingsmeter werkt wanneer de stroom is ingeschakeld. De acculadingsmeter geeft ook het resterende vermogen aan. Op de getoonde afbeelding wordt de batterij gevoed. Wanneer alleen rode of gele LED-lampjes branden, duidt dit op een laag stroomverbruik en moeten de batterijen worden opgeladen. Als u een lange afstandsrit gaat maken, zorg er dan voor dat uw accu volledig is opgeladen. Gebruik het apparaat niet als alleen het rode lampje brandt, dit betekent dat het apparaat moet worden opgeladen.

De joystick gebruiken

Gebruik de joystick om de snelheid en richting van de rolstoel te regelen. De mate waarin u de joystick indrukt, bepaalt de bewegingssnelheid. Zet de joystick altijd in de middelste stand om het apparaat aan of uit te zetten.

Er klinkt een signaal als de joystick niet in de middenstand staat bij het in- of uitschakelen. Beweeg de joystick in het midden om het signaal te stoppen. Als het signaal stopt wanneer u de joystick in de middenstand zet, kan dit wijzen op een storing, neem dan contact op met uw dealer.

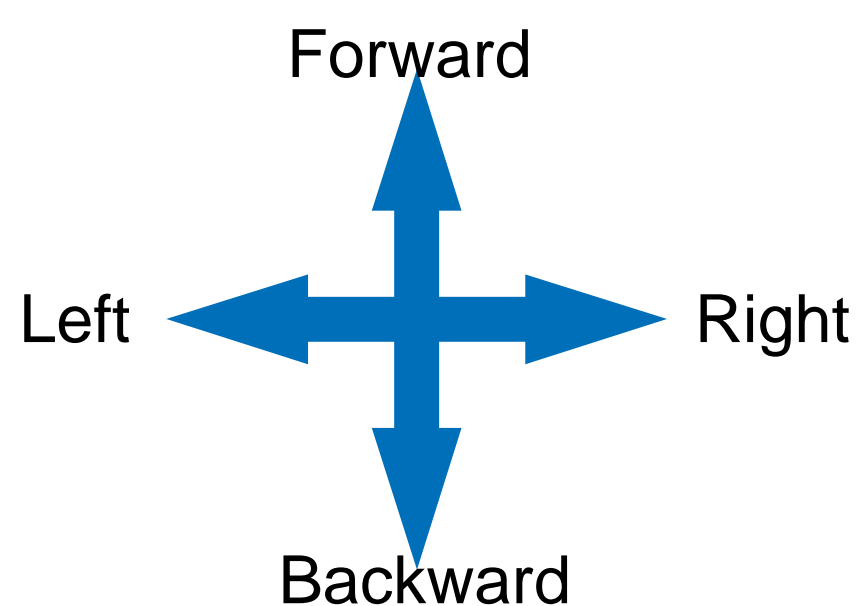



6. Controller

6.3 Installatie op afstandsbediening

Bezoek ons YouTube-kanaal voor een gedetailleerde video-uitleg over Remote Pairing. Gedetailleerde informatie vindt u op pagina 9.



6. Controller



1. Druk op de aan-toets om de joystick te openen (Afbeelding 17).
2. Zet de joysticksnelheid op het laagste niveau (Afbeelding 18).
3. Houd de vertragingknop op de joystick ingedrukt totdat u een "piep"-geluid hoort (afbeelding 19).
4. Druk op de claxonknop totdat u een "piep"-geluid hoort, het snelheidslampje gaat uit (afbeelding 20).
5. Open de afstandsbediening (afbeelding 21).
6. Houd de vertragingknop van de afstandsbediening ingedrukt totdat u een "piep"-geluid hoort en de joystick uit en weer aan gaat (Afbeelding 22).
7. Schakel de joystick in en de afstandsbediening is gekoppeld



Afbeelding 17



Afbeelding 18



Afbeelding 19



Afbeelding 20



Afbeelding 21



Afbeelding 22



7. Onderhoudsgebieden

7.1 Uw rolstoel onderhouden

Goed onderhoud van uw rolstoel omvat het schoonmaken van uw rolstoel, het inspecteren van het wiel en de accu op gebreken en het opladen van de accu's. Neem voor meer informatie over onderhoud contact op met uw dealer. We raden u aan uw rolstoel elke zes maanden te laten controleren en een jaarlijkse onderhoudsbeurt te laten plannen via uw dealer.

7.2 Uw rolstoel schoonmaken

U kunt uw rolstoel, ook de onderdelen die veel met het lichaam van een gebruiker worden aangeraakt (zoals zitkussen, armleuning, controller), regelmatig schoonmaken met een schone en licht vochtige doek. Gebruik geen organische/schurende oplosmiddelen om te reinigen, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen.

De rolstoel moet ongeveer één keer per week worden schoongemaakt. Als de rolstoel wordt gebruikt door een besmettelijke patiënt, moet het tussen elk gebruik worden gereinigd en gedesinfecteerd met desinfecterende middelen.

7.3 Banden

Controleer regelmatig de bandenspanning en slijtage. Wanneer de diepte van het loopvlakpatroon van de band is teruggebracht tot 1 mm, moeten de banden worden vervangen. (.0393 inch)

7.4 Accu

Zorg ervoor dat de accu volledig zijn opgeladen. Om de levensduur van de accu te verlengen, raden we ten zeerste aan het apparaat niet op te laden totdat de batterijen leeg zijn (rode of gele LED-lampjes branden).

Raadpleeg ook hoofdstuk 4 van deze handleiding voor gedetailleerde instructies voor het onderhoud en opladen van de accu die u kunnen helpen de levensduur van uw accu te verlengen.



7.5 Storingssignalen rolstoel

Wanneer er storingen optreden tijdens het gebruik van deze rolstoel, schakel de stroom uit voordat u het apparaat controleert.

Symptoom: valt volledig uit en alle LED-lampjes op het controllerpaneel zijn uit.

Instructies:

Stap 1: Controleer of de stekker van de controller los zit.

Stap 2: Controleer of de verbinding met de controllerstekker en accubak goed is zijn los.

- Plaats de stekker terug door de stekker vast te houden bij het uittrekken.

Trek niet aan de draad om onnodige schade aan de draadlijn te voorkomen.

Na het uitvoeren van bovenstaande stappen, en als de rolstoel niet meer stroom krijgt hersteld of neem bij vragen contact op met uw dealer.

- De controller heeft een diagnosesysteem om de controller te bewaken en motor. Elke storing van deze onderdelen wordt door de controller aangegeven.

Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk over de audiosignaalindicatie.

7.6 Onderhoudscontrole

Uw elektrische rolstoel moet om de zes maanden worden gecontroleerd en onderhouden jaarlijks zoals voorgesteld. Het gebruik van deze rolstoel vereist continuaandacht voor de veelgebruikte elementen die hieronder worden opgesomd:

Gebied A: Controleer voor elk gebruik of de volgende onderdelen goed werken:

1. Rugleuning
2. ArMLEuning
3. Controllerpositie
4. Voetsteun
5. Batterijvoeding
6. Koppelings-/afstelhendel voor omschakeling tussen handmatige modus en elektrische modus

Gebied B: De volgende onderdelen moeten maandelijks worden gecontroleerd om losraken of overmatige slijtage te voorkomen.

1. Schroeven
2. Remmen
3. Koppelings-/afstelhendel voor omschakeling tussen handmatige modus en elektrische modus
4. De voor- en achterwielen en hun profieldiepte
5. Connectoren van controller en lading



8. Leuning



8. Leuning



De IQ-8000 kan achterover leunen door middel van de handgreep aan de rechterkant. Als u achterover wilt leunen, knijp dan in de handgreep en duw tegen de rugleuning. Als u naar voren wilt leunen, knijp dan in de handgreep en forceer de rugleuning niet.



Rijd niet met de rolstoel wanneer deze achterover ligt. Dit kan ernstig letsel veroorzaken.





9. Hoofdleuning

- Plaats de hoofdsteun bovenaan de rugleuning en lijn de gaten uit. Steek de twee meegeleverde bouten in het hoofdsteunframe en gebruik de meegeleverde moeren om de hoofdsteun aan de rugleuning te bevestigen.
- De hoofdsteun is in hoogte verstelbaar. Om de hoogte van de hoofdsteun aan te passen, houdt u de hoofdsteun gewoon met uw hand vast en oefent u druk uit.



10. Koplamp

Om de koplamp en de USB-lader te installeren, steekt u de koplamp in de oplaadpoort van de joystick.



Aan/uit knop
USB lader





10. Technische Ondersteuning

Ga naar <https://www.comfygomobility.eu/product-registration/> en registreer uw product nu.

Wanneer u uw ComfyGO elektrische rolstoel registreert, zorgt u ervoor dat u mogelijk in aanmerking komt voor verlengde garanteservice. U ontvangt dan ook product updates en belangrijk nieuws van ComfyGO producten. (Scan gewoon de QR-code met uw telefoon voor de registratielink).



-De snelste manier om ondersteuning te krijgen, kunt u mailen naar support@ComfyGoMobility.eu

Voor alle garantie- en retouraanvragen kunt u terecht op: <https://www.comfygomobility.eu/warranty-or-return-request> (Scan de QR-codemet uw telefoon voor de garantie Link)



Hier zijn een paar manieren om uw accu's gezond te houden.

- Bewaar uw accu op kamertemperatuur. Warmte is verreweg de grootste factor als het gaat om het verkorten van de levensduur van de accu.
- Accu gaat na verloop van tijd achteruit, of het nu worden gebruikt of niet.
- Batterijdeskundigen stellen voor dat u de accu na 30 ladingen bijna volledig laat ontladen. De stroommeter zal opnieuw worden gekalibreerd.
- Vermijd het volledig ontladen van de accu, tenzij er voordien 30 gedeeltelijke ladingen hebben plaatsgevonden.
- De prestaties zullen geleidelijk afnemen wanneer de accu in ontladen toestand is achtergelaten.

11. Garantiebeleid

Ons doel is ervoor te zorgen dat u tevreden bent met uw aankoop.

- Volgens onze garantieovereenkomst hebben alle nieuwe producten een beperkte garantie. Alle accu's hebben een garantie van zes maanden. Reserveonderdelen hebben een garantie van één jaar. De beperkte garantie omvat niet: arbeid of defecten aan het apparaat als gevolg van verkeerd gebruik of nalatigheid van de eigenaar, niet-duurzame onderdelen en onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en die van tijd tot tijd moeten worden vervangen (bijvoorbeeld rubberen materialen, accessoires, wielen of remmen, en kunststof onderdelen). Alle garantieclaims vereisen een aankoopbewijs en het serienummer.

Houd er rekening mee dat uw garantie deze voorwaarden niet dekt:

- Functionele problemen: Problemen die verband houden met normaal gebruik en veroudering, zoals coating en beplating van het oppervlak, natuurlijke vervaging van harsen
- Vervanging van verbruiksmaterialen door slijtage, zoals banden, zekeringen, kunststof onderdelen, glazen onderdelen, smeermiddelen etc.
- Eventuele kosten voor inspectie, afstelling, olie bijvullen, schoonmaken etc.
- Vergoedingen voor service en onderhoud uitgevoerd door dealers zoals gespecificeerd door onze fabriek
- Onderhoudskosten bij ongeautoriseerde servicecentra
- Als u niet regelmatig de problemen controleert zoals beschreven in deze handleiding, sectie 7
- Onjuist of verkeerd onderhoud
- Als ongeautoriseerd onderhoud is uitgevoerd
- Anders bedienen dan in onze handleiding staat beschreven of als u de rolstoel overbelast
- Ongeoorloofde wijzigingen aan de rolstoel
- Externe factoren zoals: roet, farmaceutica, vogelpoep, zure regen, rondvliegende stenen, metaalpoeder, etc.
- Natuurrampen zoals: tyfonen, overstromingen, branden, aardbevingen etc. beschadigen het apparaat.

Het milieu bescherming

- Gooi deze rolstoel of zijn onderdelen en vooral de accu's niet weg. Breng ze in plaats daarvan terug naar ons servicecentrum of volg de lokale afval verwerkingsvoorschriften.



COMFY 
mobility


makes life easier



www.ComfyGoMobility.eu



info@ComfyGoMobility.eu

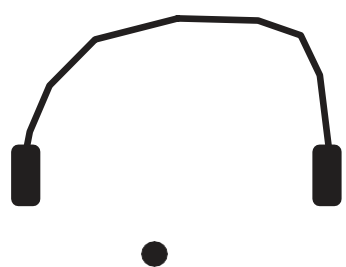

+31 208097031