

Vitamine E-Stick is een wattenstaafje welke gevuld is met olie welke vitamine E bevat. Deze Vitamine E-stick wordt gebruikt voor het beschermen en tegengaan van uitdrogende lippen.

Onze vitamine E sticks zorgen voor gehydrateerde lippen tijdens de behandeling. Met het easy-snap systeem breekt u eenvoudig de tip bij het randje af, waardoor de vitamine E olie zal gaan vloeien en in de andere tip trekt. Zo kunt u eenvoudig en hygiënisch de lippen insmeren.

Individueel verpakt voor 100% Hygienisch en vertrouwd werken.

Vitamine E sticks voor het beschermen van de lippen. Dit wordt aangebracht voordat u de mondspreider inbrengt.

Gebruiksaanwijzing Vitamine E Stick:

- Breek de bovenkant van de vitamine E stick open bij de rode streep.
- Wacht tot de onderkant van de vitamine E stick doordrenkt is met de vloeistof.
- Strijk met het doordrenkte gedeelte zachtjes over de lippen.
- Bij Tanden Bleken met name de hoek van de mond.
- Breng de vloeistof aan op de lippen, zoveel en zo vaak als nodig.

Toepassing: Prive gebruik, Tandensbleeksalon, schoonheidssalon, Beautysalon en tandartspraktijk