
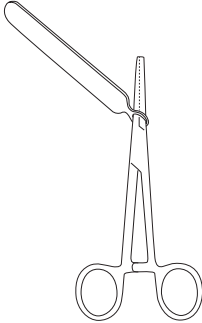
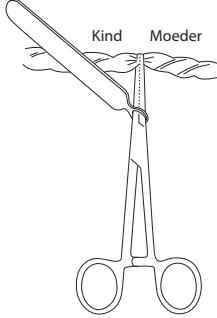
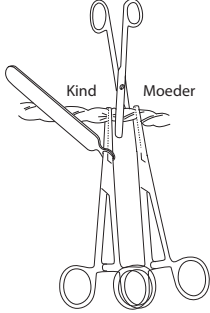
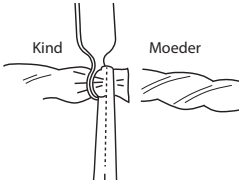
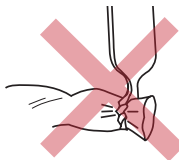


Gebruiksaanwijzing navelstrenging

NL

 <p>1. Rijk de navelstrenging op de hemostaat.</p> <p>! <u>Rek de ring niet meer uit dan nodig is, hierdoor kan de ring kapot gaan.</u></p>	 <p>2. Draai de navelstreng vast met de hemostaat in de buurt van de baby. NB: zorg ervoor dat de punt van de hemostaat rand tegen rand met de samengedrukte kant van de navelstreng staat.</p>	 <p>3. Plaats de ene hemostaat naast de andere in de richting van de moeder. Knip de navelstreng tussen de hemostaten met de navelschaar door.</p>
 <p>4. Pak de trekplaat van de navelstrenging vast en trek de navelstreng van de homostaat af en over de navelstreng heen.</p>	 <p>!</p> <p>5. Laat de navelstrenging niet zoals afgebeeld verdraaien. Hierdoor kan de ring losraken.</p>	 <p>6. Knip de trekplaat van de navelstrenging af op minimaal 1 mm van de navelstrenging, die nu om de navelstreng zit. Maak de hemostaat los.</p>

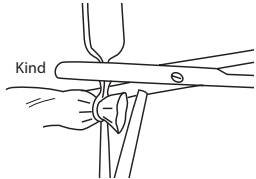

Controleer de navelstrenging de eerste 24 uur daarna zorgvuldig.

 Lees de	 Fabrikant	 Niet hergebruiken. Wegwerpproduct.
 gebruikershandleiding Artikelnummer	 Te gebruiken voor	 Voldoet aan de richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEC (0402).
 Lotnummer	 Gebruik geen kapotte verpakking.	 Gesteriliseerd met ethyleenoxide.

REF: 9607 en 9607S

40-9607/9607S-210315

Kwaliteit ISO 9001 Milieu ISO 14001 Medical ISO 13485

Wing Plast - Quality Medical Instruments

Wing Plast AB, Nitgatan 11, 333 33 Smålandsstenar, 0371 330 30, info@wingplast.se, www.wingplast.se



Wing Plast AB