

Vervaardigd in overeenstemming met de normen en het kwaliteitssysteem voor medische hulpmiddelen overeenkomstig Richtlijn 93/42/ECC van juni 14,1993 en ISO : 13485 2003 .

Omschrijving :

De stethoscoop bestaat uit een borststuk , Y - vormige slang , hoofdbeugel en oordopjes die wordt gebruikt voor auscultatie , of het luisteren naar de verschillende geluiden geproduceerd door het lichaam .

Een stethoscoop wordt ook gebruikt in combinatie met een bloeddrukmeter ( sphygmomanometer ). De stethoscoop detecteert geluiden van het stromen van het bloed.

Twee categorieën stethoscopen in het algemeen :

Enkelvoudige stethoscoop



Dubbele borststuk stethoscoop :

Dit model stethoscopen hebben een tweezijdige sound - detectie kop die de gebruiker kan keren , afhankelijk of ze hoge of lage frequentie geluid willen horen, Door het borststuk 180 ° te draaien, kan men gebruik maken van het membraan of de belzijde.



Instructie voor gebruik:

Plaats voorzichtig de hoofdbeugel in het oor.

Plaats het borststuk op het gerelateerde lichaamsdeel . Beweeg het borststuk langzaam voor het verkrijgen van maximale versterking en duidelijkheid.

Voorzichtig :

De hoofdbeugel en borststuk zijn kwetsbaar houdt scherpe instrumenten uit de buurt.

Gebruik het instrument niet op een locatie in de buurt van een extreme hitte of koude bron.

Laat het instrument niet achter op een plaats met veel stof of zand , vocht of regen .

Wij adviseren stethoscopen te reinigen na elk gebruik om de verspreiding van infectie te voorkomen . Deze voorzorgsmaatregel is vooral belangrijk wanneer ze direct op de blote huid worden geplaatst .

Onderhoud :

Wij adviseren het gebruik van een schone, zachte doek gedrenkt in ontsmettende alcohol om de stethoscoop schoon te maken .

Het gebruik van andere chemische producten op stethoscoop is niet te adviseren.

Onderdompelen van de stethoscoop in vloeistoffen voor reiniging is niet te adviseren.

Autoclaveren en steriliseren in de hete luchtsterilisator is niet mogelijk.