

Laserbehandeling voor schimmelnagels

Inleiding

Dit is een therapietoestel met laag vermogen, dat gepulseerde laserstraling combineert met de energie van blauw licht voor een synergetisch therapeutisch effect.

Het behandelt infecties van de nagels met schimmels (Onychomycosis) zonder dat er gebruik gemaakt moet worden van medicijnen of zalven. Laserstraling dringt door in de geïnfecteerde nagelplaat en richt zich op de pathogenen op het nagelbed die dit veroorzaken. Dit zal de infectie doen verdwijnen.

Niet-invasieve behandeling	Eenvoudig in gebruik
Geen bijwerkingen	Veilig in gebruik
Pijnloos	Compact en eenvoudig mee te nemen

Gebruiksaanwijzing

- 1 Plaats het toestel op de geïnfecteerde nagel en druk op de bedieningsknop.
- 2 Het behandelingslichtje begint te knipperen en het toestel geeft een zichtbaar blauw licht.
- 3 Het toestel werkt gedurende 7 minuten en gaat automatisch weer uit.

Opmerking: Het toestel mag niet gebruikt worden terwijl de batterij aan het opladen is. Laat de batterij volledig opladen voor gebruik.

Instructies voor de behandeling

Geïnfecteerde nagels moeten dagelijks behandeld worden.

Elke geïnfecteerde nagel moet ten minste eenmaal daags behandeld worden.

De behandeling van dezelfde nagel kan herhaald worden op dezelfde manier als hierboven aangegeven. Er zijn maximum drie behandelingen per dag toegestaan.

Indien er meer dan een nagel geïnfecteerd is, moeten alle geïnfecteerde nagels behandeld worden om te voorkomen dat de ziekte zich verspreidt tussen de nagels.

Veiligheid

Het toestel moet strikt overeenkomstig de gebruiksaanwijzingen en de veiligheidsinstructies uit deze handleiding gebruikt worden.

Lees a.u.b. de handleiding voor het eerste gebruik. Het is belangrijk om deze handleiding in de buurt te houden.

Geen nevenwerkingen.

Direct oogcontact met directe of gereflecteerde laserstraling dient voorkomen te worden.

Zwangere vrouwen mogen het toestel niet vlakbij de baarmoeder gebruiken.

Houd het toestel weg van kinderen.

Kinderen onder de leeftijd van 18 jaar moeten behandeld worden onder toezicht van een volwassene.

Verzorging en schoonmaken

De buitenzijde van het toestel kan schoongemaakt worden met een vochtige doek. Om de paar behandelingen wordt aanbevolen om de rubber vulling aan de binnenkant van het toestel eruit te nemen en deze schoon te maken met medische alcohol.

Het toestel mag niet gebruikt worden door andere mensen zonder eerst de vulling binnenin schoon te maken.

Opslagtemperatuur: -20°C-50 °C

Problemen oplossen

Fout	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het lichtje van de batterij is rood	De herlaadbare batterij is leeg	Sluit het toestel aan op de lader tot het lampje van de batterij groen wordt. Het toestel mag niet gebruikt worden tijdens het laden.
Het toestel werkt niet	Technische fout	Neem contact op met de verkoper/fabrikant

Vaak gestelde vragen

Wat voel ik tijdens de behandeling?

Vaak voelen mensen niets. In zeldzame gevallen voelen mensen een licht opwarmend effect. Hoewel u misschien niets voelt tijdens de behandeling, zal de laserstraling inwerken op de geïnfecteerde nagel en zich richten op de pathogenen die aan de oorzaak liggen.

Wanneer wordt de verbetering van het nagelbed duidelijk zichtbaar?

De duur van de behandeling kan verschillen van individu tot individu, afhankelijk van variabelen zoals de leeftijd, de ernst van de infectie enzoverder. De geschatte behandelduur is 3 tot 6 maanden.

Kan de laser me verbranden?

Nee, dit is een lasertoestel van klasse 1M.

Technische Informatie

Laser golflengte:905nm

Golflengte blauw licht:470nm

Laserintensiteit: 25W

Maximum pulsintensiteit:22W

Toestel van Klasse II, gebruikt onderdeeltype B lasertype 1M(IEC60825-1)

Specificaties adapter

Voltage:5V

Stroom:5VDC

Max:0.5A

Laadtijd:3-4 uren

Input:100-240V 50/60Hz 0.2A