



# Eenvoudig te gebruiken

De reinigungsset van Bestman is gemakkelijk te bedienen en kunt u zonder begeleiding zelf thuis gebruiken. Vul de spuit fles met oor reinigungsloeistof of met lauw water en zuiveringszout. Schroef eenvoudig de spuitmond op de fles en vervang na ieder gebruik de tip. Om er zeker van te zijn dat de reinigungsloeistof goed doorspoelt, test u met een enkele kneep of alles goed doorstroomt. De oorreiniger is nu gereed voor gebruik. Knijp gedoseerd de vloeistof door uw gehoor kanalen en ervaar direct het effect van schone oren.

