

JT Products

Handleiding



Orthodontische
bitjes voor
rechte tanden



TAAT SHOP

3022ML Rotterdam NL

Instructies

Draag de orthodontische bitjes van JT Products tenminste 10 uur per dag. 1-2 uur overdag en de rest van de tijd kunt u het 's nachts inhouden. Er is echter geen strikte limiet voor het dragen. In het begin is het erg wennen voor de tong. Plaats uw tong op het tonglipje, houd uw lippen gesloten, adem door uw neus en bijt lichtjes op het bitje.

Voor een optimale mondgezondheid is niet alleen rechte tanden belangrijk, maar ook de verzorging van uw gebit en tandvlees. Zorg ervoor dat u twee keer per dag uw tanden poetst met een fluoride tandpasta en gebruik één keer per dag een rager, stoker, flossdraad voor tussen de tanden. Wanneer u eet of drinkt neem dan te allen tijden het bitje uit uw mond. Na het eten spoelt u uw mond na met water en plaatst u het bitje weer terug in uw mond.

Schoonmaken

Het bitje dient één keer per dag schoongemaakt te worden. Dit doet u met een (tanden)borstel en milde zeep (zoals dreft). Schrob de binnenkant van het bitje en spoel het af met lauw water. Droog het af en plaats het terug in uw mond of in het meegeleverde opbergdoosje.

Let op: Poets het bitje niet met tandpasta. Dit kan het bitje beschadigen.

Voorzorgsmaatregelen

1. Geschikt vanaf 12 jaar.
2. Plaats de bitjes niet in heet water boven 70 °C om vervorming te voorkomen.
3. De bitjes zijn even wennen. Aan het begin van het gebruik kunnen sommige mensen kwijlen, pijnlijke tanden, misselijkheid en beknelde tongzenuw ervaren. Dit is een normale fysiologische reactie. Na enige tijd nemen deze ongemakken af. Als u echter te veel ongemak ervaart, kunt u tijdelijk stoppen met de bitjes of een kortere periode het bitje in houden. Dit heeft echter wel invloed op hoe snel uw tanden verplaatsen.
4. Sluit op een natuurlijke wijze uw mond. Kauw niet hard op de bitjes
5. Niet geschikt voor mensen die een deelprothese dragen of implantaten hebben.

Fase 1

bij de eerste correctiefase kunt u het bitje in houden voor 1-2 maanden. Deze brace is gemaakt van zacht elastische siliconen. In deze fase past het bitje zich aan de stand van uw tanden. De eerste verplaatsingen (bij crowding) vinden plaats en u wordt voorbereid op fase 2.



Crowding

Fase 2

Bij de tweede correctiefase kunt u het bitje in houden voor 2-3 maanden. Deze brace is gemaakt van licht elastische siliconen met een gemiddelde hardheid. In deze fase wordt de juiste uitlijning van de tanden en kaken gestimuleerd.



Fase 3

bij de derde correctiefase kunt u het bitje in houden voor 3-6 maanden. Deze brace is gemaakt van harde siliconen. In deze fase vindt de laatste uitlijningen plaats waarna u rechte tanden heeft. Dit bitje draag u ook om verplaatsing naar de oude situatie te voorkomen. Dan hoeft u het enkel 's nachts in te doen. Dit bitje helpt namelijk ook tegen klemmen en knarsen. Ook neemt uw tong de juiste positie aan, namelijk met het puntje van de tong tegen uw gehemelte aan.

Details

Dental arch orbit

Improve the alignment of anterior teeth through bidirectional mechanics

Tongue block

Restrict full tongue extension to change mouth breathing habits

Lip beads

Can reduce overactive lip muscles

Top of tongue

Avoid dislocation caused by the tip of the tongue acting on the teeth

Can slow down the contraction of the mental muscle

Dit product is bedoeld voor gebruik door normale, gezonde (jong)volwassenen vanaf 12 jaar. De distributeurs of producenten van de orthodontische bitjes (Taat Shop, JT Products) zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade of gevolgschade door het gebruik of misbruik van dit product.

TAAT SHOP
3022ML ROTTERDAM NL

