



GEBRUIKSHANDLEIDING

**DirectGoods Oorsmeer
Verwijderaar met Camera**




Gelieve de gebruikshandleiding
aandachtig te lezen voor optimaal
gebruik.

Download en open de app
Scan de QR-code en download
de EarPro app




Zet het apparaat aan en
verbind met WiFi


Verbind de telefoon / tablet via WiFi
zoek naar: "earpick-xxx"

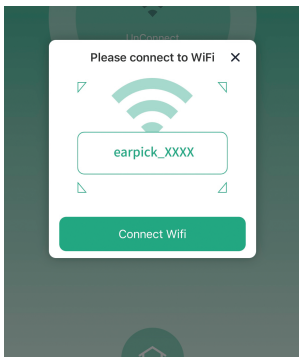


Open de app en druk op de home button om de camera te activeren

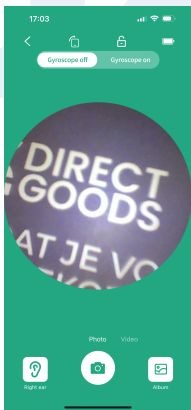

Door op het tandwielte te drukken kun je de instellingen wijzigen

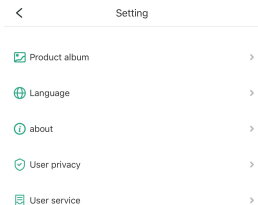

Funcities van het apparaat

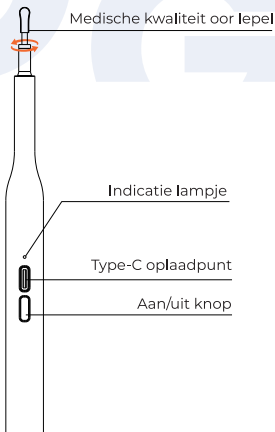

Wat zit er in de verpakking?


1

4x Medische
kwaliteit oor lepel



2

Oplaadkabel

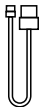

Specificaties

Gewicht	: 40 gram
Afmetingen	: 143*13.8*13.8MM
Batterij capaciteit	: 150mAh
Gebruiksduur	: 1 uur
Oplaadtijd	: 1 uur
Oplaadkabel	: Type-C
Camera lens	: HD
Kleur	: Wit

Tips

Gebruik desinfectiemiddel om de oorsmeerverwijderaar schoon te maken.

Zorg voor een rustige omgeving bij gebruik, zodat niemand per ongeluk tegen het oor stoot.

Via de app kun je foto's en video's maken van het oor.

Vervang de medische oor lepel afhankelijk van het gebruik.

Let op!

Het product is niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar.

Buiten gebruik van kinderen houden.

Het product kan niet worden gebruikt door mensen die niet weten hoe een oorsmeerverwijderaar werkt

Inwealth BV.
Trompstraat 35
1271SX Huizen

klantenservice@directgoods.nl



DIRECT
GOODS

