

PHYSIOMER is een verzorgingsgamma voor de neus met een 100 % natuurlijke formule, die efficiënt en zonder de minste bijwerking symptomen verlicht die te wijten zijn aan aandoeningen van de sinussen en neusholtes. De producten van **PHYSIOMER** behouden integraal de 80 oligo-elementen en minerale zouten die van nature aanwezig zijn in zeewater. Meer dan bij eenvoudig fysiologisch serum, zorgt deze bijzondere samenstelling van **PHYSIOMER** voor ontstekingswerende eigenschappen en een cellulair herstel. **PHYSIOMER** verlicht de geïrriteerde slijmvliezen en draagt bij tot het herstel van hun fysiologische evenwicht. Het spoelen van de neus met **PHYSIOMER** is een efficiënte, preventieve maatregel tegen NKO-complicaties, zoals otitis of sinusitis¹.

SAMENSTELLING

Natuurlijk, steriel en isotoon zeewater, overeenkomend met een concentratie van 9 g/l natriumchloride. Zonder bewaarmiddelen en chemische producten.

EIGENSCHAPPEN

- Reinigt en verlicht in geval van verstopte neus of loopneus.
- Reinigt en desinfecteert de neusholtes.
- Verwijdert ziektekiemen en allergenen.
- Bevochtigt en verlicht een droge neus.
- Vermindert het risico op een bijkomende infectie van de bovenste luchtwegen².

WANNEER PHYSIOMER® GEBRUIKEN?

Hygiëne en verzorging van neus en oogjes	Bevochtiging van de neusholtes	Dynamische reiniging van de neusholtes		
PHYSIOMER® Neusreiniger	PHYSIOMER® Mini 23 ml	PHYSIOMER® Soft Spray 135 ml	PHYSIOMER® Normal Jet 135 ml	PHYSIOMER® Strong Jet 210 ml
Met voepel ureinde aangepast aan het delicate neusje van baby	Handig en compact om overal mee te nemen. De ideale aanvulling op Soft Spray, Normal Jet en Strong Jet voor buitenshuis.	Aangepast aan gevoelige neuzen, in het bijzonder deze van baby's en jonge kinderen.	Aanbevolen bij vloeibare en overmatige secreties.	Aanbevolen bij dikke, taale secreties of bij korsten aan de neus na operatie.
Unidoses 30 x 5 ml Voor dagelijkse verzorging				
Zuigelingen en baby's	Volwassenen Kinderen vanaf 2 weken	Volwassenen Kinderen vanaf 2 jaar	Volwassenen Kinderen vanaf 6 jaar	

Isotone samenstelling. Geen gebruiksbeperking.

Niet alle producten zijn in Nederland verkrijgbaar.

AANTAL AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

- Bij verkoudheid, rhinitis, rino-faryngitis, rinosinusitis: **4 toepassingen per dag.**
- Bij hygiëne en preventie: **1 toepassing per dag.**


Bij een zwaar verstopte neus, meer bepaald bij sinusitis al dan niet van allergische oorsprong, raadt **PHYSIOMER®** het gebruik van **PHYSIOMER® Sinus** aan, waarvan de hypertonische formule de neus ontzwelt en het oedeem vermindert.

GEBRUIKSWIJZE

PHYSIOMER® Soft Spray **zuigelingen:**

1. Leg de baby op de rug in een stabiele houding.
Draai het hoofdje opzij en breng voorzichtig de neusverstuiver in het bovenste neusgat.
2. Oefen 2 à 3 seconden een krachtige druk uit op de verstuiver. Bij een langdurige verstuiving is het mogelijk dat de oplossing langs het andere neusgat naar buiten vloeit, waardoor de secreties goed worden verwijderd.
Draai het hoofdje naar de andere kant en herhaal in het andere neusgat.
3. Laat de baby rechtop zitten zodat het overige slijm naar buiten kan vloeien. Reinig met een proper doekje.
4. Reinig en droog de verstuiver na elk gebruik.

Niet verstuiven wanneer uw kindje het hoofdje naar achteren buigt om te vermijden dat de oplossing verkeerd in de keel terechtkomt.

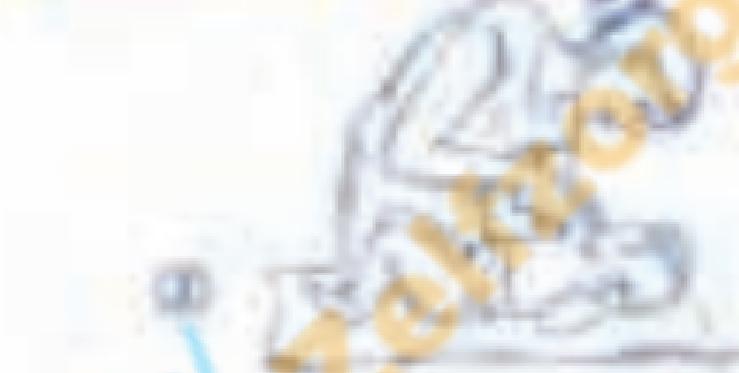

PHYSIOMER® Soft Spray/Normal Jet **Strong Jet**

kinderen en volwassenen:

1. Draai het hoofd opzij boven een wastafel of onder de douche en breng voorzichtig de neusverstuiver in het bovenste neusgat.
Oefen 2 à 3 seconden een krachtige druk uit.
2. Draai het hoofd langs de andere kant en herhaal in het andere neusgat.
3. Snuit de neus.
4. Reinig en droog de verstuiver na elk gebruik.



PHYSIOMER® Mini:

1. De facon schuin houden en er gedurende 1 seconde hard op drukken.
2. Herhaal deze handeling tot u de eerste verstuiving bekamt.
3. Verstuiven in elk neusgat.
4. De neus snuten.
5. Na elk gebruik de neusverstuiver spoelen met warm water. De verstuiver goed drogen.

Te gebruiken binnen de 28 dagen na eerste verstuiving.

De **PHYSIOMER®** producten zijn medische hulpmiddelen conform de Europese Richtlijn 93/42, zijn getoetst na de eerste gebruiksdosis op de veiligheid van het kind.

Kaak het binnenvol kinderen bezemen