

**Ohrenschmalz ist eine natürliche, ölige Substanz, die zum Schutz des Trommelfells gebildet wird. Bei manchen Menschen kann sich dieses Ohrenschmalz festsetzen, was zu Ohrenschmerzen oder teilweise Hörverlust führen kann.**

Olivenöl ist ein natürliches Schmiermittel, das das Ohrenschmalz sanft aufweicht und entfernt. Olivenöl kann während der Schwangerschaft und der Stillzeit verwendet werden. Je nach Schwere des Problems mit dem Ohrenschmalz kann Ihnen der Arzt, die Krankenschwester oder der Facharzt spezifische Anweisungen für die Anwendung der Tropfen geben. Sie sollten die Anweisungen befolgen, um sicherzustellen, dass das Wachs entfernt wird.

#### **Gebrauchsanweisung**

Vergewissern Sie sich vor der Anwendung, dass die Düse und die Flasche nicht beschädigt oder zerbrochen ist.

Bevor Sie eine neue Flasche Olivenöl verwenden, schütteln Sie sie gut und drücken Sie dann den Sprühkopf 3 bis 4 Mal nach unten, bis Sie einen Sprühstoß erhalten. Dadurch wird das Produkt für den ersten Gebrauch vorbereitet.

- 1.** Neigen Sie den Kopf zur Seite, so dass das betroffene Ohr nach oben zeigt.
- 2.** Halten Sie die Flasche in aufrechter Position mit der Düse im Gehörgang und drücken Sie den Sprühkopf 1 bis 2 Mal ganz herunter.
- 3.** Massieren Sie sanft die Außenseite des Ohrs.
- 4.** Bei Bedarf das Ohr leicht mit Watte verschließen, um ein Auslaufen zu verhindern.
- 5.** Zum Entfernen des Öls den Kopf so neigen, dass das Ohr nach unten gerichtet ist, und das Öl ablaufen lassen. Wischen Sie die Außenseite des Ohrs vorsichtig ab, um Rückstände zu entfernen.
- 6.** Nach der Anwendung die Düse sanft mit sauberer Watte abwischen.

**Verwenden Sie das Spray zweimal täglich für bis zu 5 Tage. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf am anderen Ohr.**

Bitte lesen Sie das beiliegende Merkblatt. Text am xx/xx überarbeitet

