

Otrivin Baby Aspirator (zacht neusdopje) – Nieuwsgereinigd
voor baby's, zuigelingen en kinderen.
Het leegzuigen van de neus wordt aanbevolen bij elke verstopte neus van uw baby en dit zo vaak als nodig en vooral vóór de maaltijd of slapengaan van uw baby. Dit product helpt het neusje van uw baby te reinigen door neusslijm op een zachte manier te verwijderen. Eenvoudig en hygiënisch in gebruik.
Otrivin Baby Aspirator helpt uw baby normaal te ademen, te eten, te slapen en zich weer beter te voelen.
Het verwijderen van neusslijm helpt om verdere complicaties zoals ootitis (otitis), infecties van de sinussen (bijholte ontsteking) of hoesten te voorkomen. Het verbetert ook de kwaliteit van de slaap van de baby tijdens een verkoudheid. U kunt Otrivin Baby Aspirator ook gebruiken na een zoutoplossing of zeewateroplossing voor de neus zoals Otrivin Baby Monodose, Otrivin Baby Zoutoplossing. Het maakt het gemakkelijker om neusslijm uit de neus van het kind te verwijderen en maakt de neus vrij. Dit product is bedoeld voor wie niet zelf de neus kan snuiten, zoals pasgeboren baby's, zuigelingen en kinderen. Voor gebruik bij een pasgeboren baby dient u eerst medisch advies in te winnen.

Wie moet de Otrivin Baby Aspirator hanteren?
Om veiligheidsredenen moet Otrivin Baby Aspirator worden gebruikt door de ouder of verzorger die de gebruiksaanwijzing kan lezen en begrijpen, mond, neus, oor en ogen kan onderscheiden en basiskoncepten voor hygiëne kan begrijpen. Er worden 2 zachte wegwerpdopjes geleverd bij Otrivin Baby Aspirator. Elk dopje bevat een absorberende filter wat slijm vasthoudt, voor een hygiënisch proces. De wegwerpdopjes zijn ook apart verkrijgbaar in verpakkingen per 10 stuks.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik alleen Otrivin Baby Wegwerpdopjes met de Otrivin Baby Aspirator. Raadpleeg een arts voordat u Otrivin Baby Aspirator gebruikt na een verwonding of een recente neusoperatie. Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor één van de materialen (zie samenstelling).

Geen gebroken of beschadigd product gebruiken.
Gebruik geen gebruikt of beschadigd neusdopje of een neusdopje met een ontkennende of beschadigde filter. Gebruik het product wanneer uw baby in een rustige houding ligt. Het mondstuk dient stevig tussen de lippen worden gehouden. Elk ernstig incident met betrekking tot Otrivin Baby Aspirator moet worden gemeld aan de lokale contactpersoon van de fabrikant en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Om hygiënische redenen en om besmetting te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de verschillende componenten van Otrivin Baby Aspirator correct zijn gemonteerd en niet zijn gemonteerd met een gebruikt neusdopje.

1. Was uw handen zorgvuldig voor gebruik van Otrivin Baby Aspirator.
2. Plaats een zacht neusdopje (A) op het centrale gedeelte (B) van het hulpmiddel. Plaats geen gebruikte neusdopjes.
3. Plaats het mondstuk (C) in uw mond (ouder, verzorger) en plaats het einde van het neusdopje (A) in één van de neusgaten van uw baby. Voor een betere werking van het hulpmiddel is het aangeraden om het andere neusgat dicht te houden tijdens het leegzuigen.
4. Zuig zachtjes, traag en regelmatig door het mondstuk (C).
5. Indien het neusdopje vol raakt tijdens het leegzuigen, vervang dan het neusdopje.
6. Herhaal deze handelingen in het andere neusgat.
7. Schoonmaak instructie:
Verwijder het gebruikte neusdopje (A). Veeg de buitenkant

van het mondstuk of (C) met een schone vochtige tissue met warm water. Droog de buitenkant van het mondstuk met een tissue. **ALLEEN** in geval van neusslijm in het centrale deel: maak het centrale deel (B) los van de plastic slang. Spoel het centrale deel (B) af met warm water en laat het uitlekken om te drogen, voordat u de slang opnieuw beweegt. Was uw handen zorgvuldig.



Vraag advies aan uw arts, apotheker of drogist indien u verdere vragen heeft over het gebruik van dit product.

0 °C 30 °C Bewaren tussen 0°C en 30°C.

Niet gebruiken na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Gooi het product weg volgens uw lokale voorschriften en houd altijd rekening met het milieu. Gooi de gebruikte aspirator en neusdopjes bij het restafval. Gooi de plastic omdoos bij het plastic afval of restafval afhankelijk volgens de sortering van uw gemeente.

Geen gebroken of beschadigd product gebruiken.

Voorzichtig: Lees aandachtig de instructies op de verpakking alvorens dit product te gebruiken.

Éénmalig gebruik: De dopjes zijn voor éénmalig gebruik. De andere onderdelen van het product kunnen hergebruikt worden.

Samenstelling: Aspirator: polypropyleen, styreen-ethyleen-butyleen-styreen, siliconen. Neusdopje: PVC en melamine schuim.

Inhoud: 1 aspirator (bestaande uit het centrale gedeelte (B) met 1 flexibele slang en 1 mondstuk (C) en 2 zachte wegwerpdopjes (A).

Haleon CH SARI, Route de l'Etraz, 1197 Prangins Switzerland

EC REP Haleon Medical Devices, Clocharane Youghal Road

Dungan Co. Waterford, X35 Y983, Ireland

Lokale contactpersoon:

0800 4090005

mystory.nl@haleon.com

www.otrivin.nl

Trade marks are owned by or licensed to the Haleon group of companies.

©2023 Haleon group of companies or its licensor.

UDI



datum: juni 2023

05ET272NL000620