



### Lichtgewicht rollator MultiMotion Duo

Kleurvarianten: 10050015 Antraciet



**N.B. Deze rollator zal geïnstalleerd moeten worden door een competent persoon. Overschrijdt het maximale gebruikersgewicht van 113 kg niet – hierdoor men groot gevaar.**

#### Beoogde doel en gebruiker

Lichtgewicht rollators zijn uitsluitend bedoeld voor een gebruiker die niet goed meer kan lopen zonder ondersteuning of een beperkte mobiliteit heeft, voor eigen persoonlijk gebruik binnen en buiten op droge, stevige en vlakke ondergronden.

Het maximale gebruikersgewicht (zowel de gebruiker als het eventuele gewicht van de accessoires die op de rollator zijn gemonteerd) staat vermeld op het label, deze zit op het frame van de rollator bevestigd. Garantie kan alleen worden aangegaan als het product is gebruikt onder de gespecificeerde voorwaarden en voor de beoogde doeleinden. Gebruik of monteer GEEN onderdelen van derden op de rollator, tenzij deze officieel zijn goedgekeurd door de fabrikant.

#### Voor gebruik

- Verwijder zorgvuldig alle verpakkingen. Vermijd het gebruik van messen of andere scherpe instrumenten, omdat dit het product kan beschadigen.
- Controleer het product voor eventuele zichtbare schade. Als u schade of verdachte fouten ziet verzoeken wij u geen gebruik te maken van het product, maar neem contact op met uw leverancier voor ondersteuning.



1. Handvatten
2. Remhendel met parkeerfunctie
3. Rugband
4. In hoogte verstelbaar handvat
5. Knop voor hoogteverstelling
6. Zitting
7. Tas
8. Stokhouder
9. Voorwiel
10. Achterwiel
11. Zwenkbare voetsteunen



Als u het idee heeft dat u een afwijking aan het product ziet neemt u dan aub contact op met uw leverancier.

## Montage instructies :



Foto 1

### Stap 1:

Plaats de voorwielen in het frame en zorg ervoor dat het gat waar de bout doorheen komt op de juiste plek zit. Stop de bout door het gat en plaats daarna de kunststof opvulling en de schroefknop over de bout, draai deze goed vast.



Foto 2

### Stap 2:

Monteer de achterwielen door deze in de openingen van het frame te drukken. Er is een duidelijke klik te horen wanneer de achterwielen vastzitten, de sluitingspin zal in het gaatje klikken.

Let er goed op dat de achterwielen aan de buitenzijde van het frame zitten en dat de remkabel aan de onderkant van het frame zit.



Foto 3

### Stap 3:

Plaats de handgreep hendels in de juiste opening van het frame. Zorg ervoor dat u de sluitingspin ingedrukt houdt terwijl u hem plaatst. Herhaal dit voor de andere zijde.

Wanneer u de hendels geïnstalleerd heeft zouden de handgrepen naar de achterwielen moeten wijzen. De vinnen van de ergonomische handgrepen moeten naar binnen wijzen.

U kunt de hoogte van de handgrepen eenvoudig aanpassen om een goede loophouding te garanderen. Ga zo recht mogelijk achter de rollator staan:

- Houd uw armen straks langs uw lichaam naar beneden.
- De vuistregel is dat de handvatten van de rollator op polshoogte moeten zitten.

Druk op de knop en trek de handgreep naar boven of naar beneden. Laat de knoppen los wanneer hij voor het juiste gaatje zit. Deze knop borgt zit automatisch vast in het frame. Herhaal dit proces totdat de gewenste hoogte is bereikt.



Foto 4

### Stap 4:

Bevestig de tas aan de 2 haakjes van het frame die aan de voorkant van de zitting zitten. De boodschappentas kan gemakkelijk weer worden verwijderd indien nodig.



Foto 5

### Stap 5:

Plaats de stokhouder in de plastic houder, deze zit aan de zijkant van het frame.

### Stap 6:

Plaats de voetsteunen met de gaatjes over de 2 pinnetjes

(afb. 6)

### Stap 7:


Draai de voetsteun nu in positie, de bevestigingsclip zit dan tegen het frame aan

(afb. 7)

### Stap 8:

Druk tegen de bevestigingsclip zodat de voetsteun vast klikt

(afb. 8)

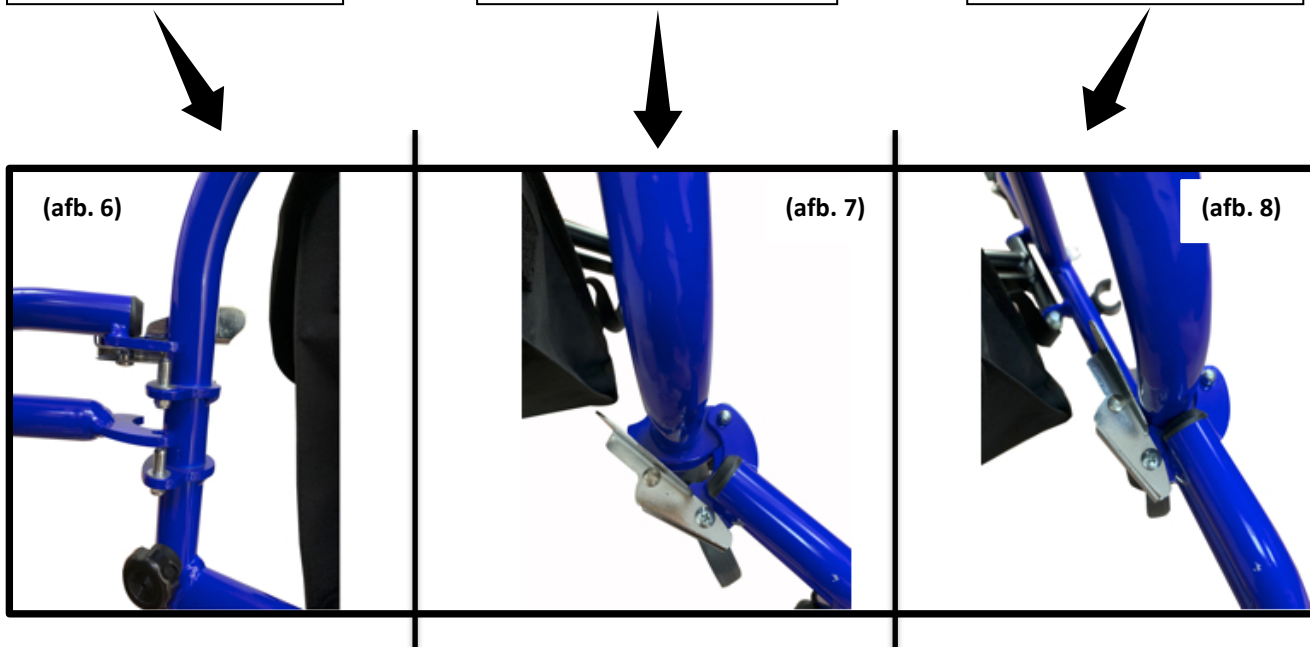

Aan de onderkant van de voetsteunen zit een bout, wanneer deze los word gedraaid kunnen de voetplaten op de juiste hoogte worden gezet. Als de juiste hoogte is bereikt draait u de bout weer vast.

Wanneer de voetsteunen niet worden gebruikt kunnen deze opzij worden geklapt. Aan de zijkanten zit een kunststof klem waar de voetsteunen dan in vast geklikt kunnen worden.

### De rollator in- en uitklappen:

Om de rollator in te klappen trekt u de zitting naar boven aan de zwarte hendel, deze zit midden op de zitting. Nu kunt u de rollator eenvoudig inklappen.

(afbeelding 9)



(afb. 9)



(afb. 10)

Klap de rollator uit door de handgrepen van elkaar af te trekken. Vergrendel de vervolgens door de zitting aan beide zijde omlaag te drukken tot deze in vergrendeling klikt.

(afb. 10)



(afb. 11)

## Bediening van de remmen


1. Knijp voorzichtig de remhendels in om de rollator af te remmen. Zie **foto 6**

2. De remmen beschikken ook over een parkeeroptie. Druk beide remhendels volledig naar beneden tot ze vast komen te staan. De achterwielen worden op deze manier geblokkeerd en het is dan veilig om op de rollator te zitten. **Foto 7**

3. Om de rollator van de parkeerrem af te halen knijpt u voorzichtig in de remhendels. De rollator is dan weer eenvoudig te gebruiken.



(afb. 12)

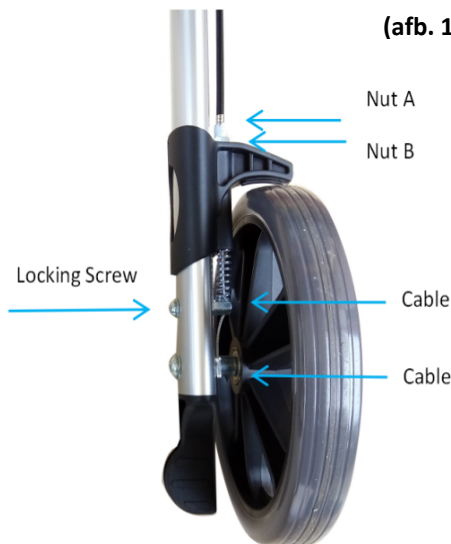

(afb. 13)

## Rem bijstelling

De remmen van uw rollator zullen periodieke bijstelling vereisen.

Om de remmen bij te stellen draait u moer **B** los en draait u moer **A** aan om de rem strakker te zetten (of los om minder strak te zetten). Wanneer dit juist is aangepast (controleer dit door te voelen aan de remmen) draait u moer **B** weer aan.

Indien verdere bijstelling noodzakelijk is, draai de sluitschroef los (locking screw) en trek vervolgens met een tang de kabel ongeveer een millimeter naar beneden. Draai de sluitschroef weer vast. De remmen kunnen dan verder aangepast worden door het losmaken van moer **B** en moer **A** zoals voorheen aangegeven.

---

## Rem

Remmen tijdens het lopen: Trek de remhendels omhoog.

Parkeerrem tijdens stilstand of gebruik van de zitting: Duw de remhendels omlaag.

## Hulp bij stoepranden (Hellinghulp)

Indien u achter op het verlengde frame met uw voet op de hellinghulp duwt (langs het achterwiel), maakt u het makkelijker de voorwielen te liften.

## Veiligheidsinstructies

- Overschrijdt nooit de minimum en maximum toegestane hoogte van de handvatten.
- Hang niet op de handvaten, gevaar om te kantelen!
- Gebruik de remmen tijdens het lopen op steilere hellingen (trek de hendels omhoog).
- Gebruik de rollator op een vaste en stevige ondergrond.
- Gebruik de rollator nooit om voort te bewegen wanneer deze nog is ingeklapt. Er bestaat een gevaar dat de rollator kantelt.
- Bij het in- en uitklappen van de rollator kunnen kleding of lichaamsdelen bekneld raken.
- Gebruik voor doeleinden anders dan lopen, zoals het transporteren van zware goederen, is niet toegestaan en gevaarlijk.

## Schoonmaak










Het schoonmaken en desinfecteren zou regelmatig uitgevoerd mogen worden. Gebruik een milde zeep zonder schuurmiddelen. De standaardmethoden voor desinfectie kunnen gebruikt worden. Gebruik in geen geval stoomreinigers of schoonmaakmiddelen met bijtende stoffen.


## Technische Specificatie:


- Maximaal gebruikersgewicht: 113 kg
- Totale gewicht: 9,4 kg
- Maximaal gewicht boodschappentas: 5 kg

## Label en symbolen

Dit is een voorbeeld label. Het label op uw product kan er anders uit zien.

					
TYPE: <b>XXXXX</b>					
				<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Barcode</b> </div>	
					
GARANTIE: <b>X</b> jaar garantie (uitgezonderd de onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage) WARRANTY: <b>X</b> year warranty (parts subject to normal usage wear and tear are excluded from warranty) GARANTIE: <b>X</b> Jahre Garantie mit Ausnahme der Teile, die dem Verschleiß unterliegen GARANTIE: <b>X</b> ans de garantie à l'exclusion des pièces sujettes à l'usure				<b>VERSION:</b> <b>XXXXXX</b>	
 MultiMotion B.V.   Weezenhof 61-58, 6536 AM Nijmegen   The Netherlands   <a href="http://www.multi-motion.nl">www.multi-motion.nl</a>					


 Maximale gebruikersgewicht

 CE keurmerk


 Medisch hulpmiddel

 Lot/Batch nummer

 Let op, instructies bijgevoegd

 Adresgegevens importeur

 Adresgegevens fabrikant

 Handleiding raadplegen voor gebruik

 Adresgegevens Authorized representative

 Artikelnummer

 Productiedatum

Achter "TYPE:" staat wat voor een product het is.

Achter "VERSION" staat het versienummer van het label.

In het vak "Barcode" staat de scanbare barcode.

---

## Service en Garantie

De importeur stelt zich niet verantwoordelijk voor verwondingen aan de gebruiker of schade aan eigendommen, indien bij het gebruik van de rollator de aanbevelingen en waarschuwingen niet zijn opgevolgd. De rollator is, indien de omgangsregels zoals deze beschreven staan in deze handleiding worden opgevolgd, een uiterst veilig en stabiel product. Het is echter wel mogelijk dat, wanneer de gebruiksaanwijzingen niet correct wordt nageleefd, er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Op deze rollator zit een garantietermijn van 24 maanden. Neem voor garantie en service contact op met de gemachtigde dealer waar u uw product hebt gekocht. Hebt u na deze termijn van 24 maanden toch (technische) problemen met het product dan kunt u ook de gemachtigde dealer benaderen voor een eventuele oplossing.

Als het voorkomt dat u niet naar tevredenheid wordt geholpen wat betreft de garantie en service, stuurt u dan alstublieft een email naar MultiMotion afdeling klantenservice op onderstaand adres: [info@multi-motion.nl](mailto:info@multi-motion.nl)

### **Importeur:**

MultiMotion B.V.  
Weezenhof 61-58  
6536 AM Nijmegen  
Nederland  
Tel. 024-6794583

### **Authorized representative:**

Sungo Europe B.V.  
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7  
2909 VA Capelle aan den IJssel  
Nederland

### **Fabrikant:**

Foshan Oscar Medical Instrument CO.,LTD  
Add:No. 2 (Workshop C), Nanhai National Eco-industrial Demonstration Park  
Danzao Town, Nanhai District  
Foshan city, Guangdong Province  
China

