

voor zachte contactlenzen


BELANGRIJK

- Geopende fles niet langer dan 90 dagen gebruiken.
- De fles goed sluiten.
- Gebruik het product niet als de verzegeling ontbreekt of kapot is.
- U kunt de lenzen tot 30 dagen bewaren in een gesloten lenshouder.
- De vloeistof niet innemen en buiten bereik van kinderen bewaren.
- Elk contact met de schenktuit vermijden om contaminatie te voorkomen.
- Nooit leidingwater gebruiken voor het afspoelen van de lenshouder.
- Niet gebruiken na de vervaldatum.
- Op kamertemperatuur bewaren.
- In geval van oogirritatie, raadpleeg direct een specialist.
- Voordat u medicatie voor uw ogen gebruikt, informeer uw arts dat u contactlenzen draagt.
- Niet gebruiken vanneer u allergisch bent voor één van de bestanddelen.

Gebruik uitsluitend Procornea producten; deze passen bij elkaar.

SAMENSTELLING

EDTA 0,1%, Poloxameer 0,25%, PVP 0,05%, Polyhexanide 0,0001% in een steriele, gebufferde, isotonische vloeistof.

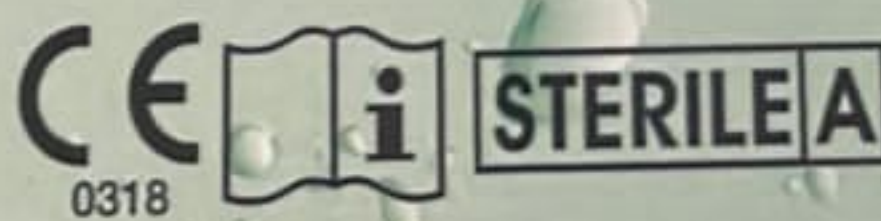

Avizor S.A.
La Cañada, 13-17
28850 Torrejón de Ardoz