

# Vette Watten

HeltiQ Vette Watten kunnen worden gebruikt voor het voorkomen van blaren en bij blaren die nog dicht zijn. Door de vette watten tussen de tenen te vouwen wordt de wrijving, waarbij blaren kunnen ontstaan, verminderd. Dit product is een medisch hulpmiddel.

- Ter preventie van blaren
- Ter bescherming van dichte blaren
- Vermindert de wrijving

## Gebruiksaanwijzing

Voor de preventie van blaren en bij gesloten blaren.

1. Knip een stuk vette watten van 15 tot 20 cm af.
2. Splits dit stuk vette watten omdat het anders te dik is.
3. Vouw het dunne stuk vette watten zigzaggend tussen de tenen.
4. Splits het stuk vette watten wederom en sla het terug boven en onder de tenen.
5. Trek zeer voorzichtig je sok weer aan, omdat de vette watten anders direct stuk gaan.

## Let op!

De eerste paar minuten zullen de vette watten in de sokken wat warm aanvoelen, maar dit verdwijnt snel bij het lopen.



Scan de code voor meer informatie over het gebruik van dit product.

## Samenstelling

100% ongebleekt katoen

Importeur:

Koninklijke Utermöhlen NV  
De Overweg 1 8471 ZA Wolvega,  
Nederland, [www.heltiq.nl](http://www.heltiq.nl)

🏭 Jianerkang Medical Co., Ltd  
No. 1 Jianerkang Road  
Zhixi Town Industrial Zone  
Jintan District, Changzhou City  
Jiangsu Province, China

🇪🇺 **EC REP** Shanghai International  
Holding Corp. GmbH (Europe)  
Eiffestraße 80 20537 Hamburg,  
Germany

REF 1141056 - V5.20211207



2022-01



22032



8 717484 000304