



Itemnummer 1000021283




## Slips, ABENA Slip, MO, blauwe kleurcode, Premium

- ✓ Hoogwaardige kern met Top-Drytechnologie
- ✓ 360° anti-lekkranden voor volledige bescherming
- ✓ Voorgevormde beenelastieken voor een optimale pasvorm
- ✓ Urineverzadigingsindicator met blokverdeling
- ✓ Ondersteunt een gezonde huidbalans



### Productomschrijving

ABENA Slip is ons premium assortiment volledig ademende, anatomisch gevormde slips voor matig tot zwaar urineverlies. De hoogwaardige kern met Top-Drytechnologie zorgt voor snelle absorptie en een droog oppervlak, zelfs na herhaaldelijk urineren. De combinatie van verschillende anti-lekkranden (zichtbaar en onzichtbaar) en elastieken (voorgevormde beenelastieken) zorgt voor volledige bescherming tegen lekkages. Voor een optimale bescherming van de huid en behoud van de natuurlijke pH-balans van de huid. Het speciale geurfilter beperkt nare luchtjes tot een minimum. De hoogwaardige, flexibele combi-plakstrips met dubbele plakfunctie zorgen voor een optimale pasvorm en zijn meerdere keren te gebruiken. De urineverzadigingsindicator met blokverdeling helpt de gebruiker en verzorger het product met het juiste absorptieniveau te vinden en geeft aan wanneer het product vervangen moet worden. De dermatologisch geteste producten zijn voorzien van het Nordic Swan Ecolabel.

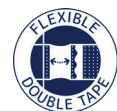

### Specificaties

Basisnaam	Slips
Merk	ABENA
Submerk	Slip
Formaat	MO
Kleur	Wit
Functies	Blauwe kleurcode
Materiaal	BTBS, ECF fluff, elastaan, elasticated combi tape, nonwoven, PE, PP, hars, SAP
Lengte/diepte	840 mm
Breedte	670 mm
Heupomvang	70-110 cm
Tolerantie	+/- 10%
Absorptie Rothwell	1500 ml
Geslacht	Unisex
Kwaliteitsniveau	Premium
Certificaten	CE, MD, Nordic Swan-milieukeurmerk, UKCA
CE-klasse	Class I
Product- of testnormen	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Richtlijnen, voorschriften en wetten	MDR (EU) 2017/745
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	Buiten bereik van kinderen houden.
Houdbaarheid	5 jaar.
Bewaarinstructies	Opslag: droog, kamertemperatuur en geen zonlicht.

**Instructies voor productverwijdering** Afvoeren met huishoudelijk afval.

**Instructies voor verwijdering van de verpakking** Kan worden gerecycled of verbrand.

## Gebruiksaanwijzing/toepassing

Absorberende slips voor matig tot zwaar urineverlies. Zeer geschikt voor bedlegerige patiënten. Productafmeting te herkennen aan kleurcodes, productnamen en maat-/absorptieaanduidingen. Het is belangrijk om altijd de heupomtrek te meten om de juiste maat te kiezen en om het juiste absorptieniveau te kiezen om lekkage te voorkomen. Vouw de slip in de lengte dubbel met de buitenlaag naar buiten gedraaid zodat er een gootje gevormd wordt. Trek de slip van voren naar achteren omhoog. Strijk de slip aan de voorzijde glad en zorg dat er zich een gootje vormt tussen de benen. Bevestig de onderste plakstrips iets naar boven gericht aan beide zijden en bevestig vervolgens de bovenste plakstrips naar beneden gericht voor een veilige en comfortabele pasvorm. U kunt de producten staand (zelfstandig of met hulp) of liggend aanbrengen. Zie de aanleginstructies in onze brochure voor gedetailleerde informatie.

## Verpakkingsgegevens

Eenheid	Bevat	Lengte	Breedte	Hoogte	EAN
cII	108 st	57.6 cm	40 cm	36.7 cm	5713571000090
pak	27 st	37 cm	17.5 cm	24.5 cm	5713571000083
st	1 st				



Het Nordic Swan Ecolabel is een officieel Scandinavisch milieulabel. Producten met het Nordic Swan Ecolabel voldoen aan strenge milieueisen met betrekking tot grondstofproductie, gebruik, documentatie en veiligheid.



Producten die zijn gelabeld met MD, worden geclassificeerd als medische hulpmiddelen.



De CE-markering garandeert dat een product veilig te gebruiken is en voldoet aan alle veiligheidsmaatregelen. CE staat voor Conformité Européenne (Europese conformiteit) en komt vooral voor op elektronische apparatuur, veiligheidsuitrusting, bouwproducten en medische apparaten.



De UKCA-markering garandeert dat een product veilig is te gebruiken en voldoet aan alle veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de productnormen en wetgeving van het VK.



Anti-lekrandjes in de beuuitsnijding en rond de absorberende kern helpen doorlekken te voorkomen en zorgen voor een optimale pasvorm.



Het product is volledig ademend voor het comfort van de gebruiker, ook bij langdurig gebruik. Voor een intacte en gezonde huid.



Uw garantie dat onze producten zijn getest op ingrediënten die mogelijk huidirritatie kunnen veroorzaken. Tests zijn uitgevoerd door een onafhankelijk extern laboratorium.



Het product heeft flexibele plakstrips voor de beste combinatie van comfort, pasvorm en bescherming tegen doorlekken. De blauwe dubbele plakstrip garandeert een extra



De unieke structuur van onze hoogwaardige kern is ontworpen voor de snelle verspreiding en inkapseling van urine, waardoor het oppervlak droog blijft, zelfs na herhaaldelijk plassen.



Het Odor Control-geurfilter is een cruciaal voor de discretie van de gebruiker. De incontinentieproducten van ABENA zijn ontworpen en ontwikkeld om ervoor te zorgen dat er een minimale geur vrijkomt uit het product.



Unieke Top-Dry-technologie die zorgt voor een snelle absorptie en een droog oppervlak, zelfs na herhaaldelijk plassen.



De urineverzadigingsindicator is een vloeistofgevoelige strip die van kleur verandert of vervaagt wanneer het tijd is om het product te verschonen.



Een combinatie van 100% ademend vermogen, Top-Dry en lekbescherming zorgt voor een droog oppervlak en een gezonde huid, zelfs na herhaaldelijk plassen, waardoor de natuurlijke pH-balans van de huid behouden blijft.



Het product bevat geen latex.



Druppelsysteem dat absorptie aangeeft. Hoe meer druppels, hoe hoger de absorptie. Loopt van 1 tot 9 druppels.

