

PHYSIOMER[®]

Strong Jet

WANNEER PHYSIOMER[®] Strong Jet GEBRUIKEN?

Spray 1 tot 2 seconden per neusholte, 1 tot 4 keer per dag:

- **In geval van een dikke, plakkerige of slijmerige afscheiding of in geval van korsten.**
- **Bij behandeling van chronische neusholte aandoeningen*.**
- **Bij verzorging na chirurgische ingreep aan neusholtes*.**

*Wanneer dit door een arts is vastgesteld.

GEBRUIKSWIJZE

Toezicht door volwassenen wordt aanbevolen voor gebruik bij kinderen.

Voor gebruik: controleer of de verstuiver goed werkt.

1. Draai het hoofd opzij, breng de verstuiver in het bovenste neusgat en druk de verstuiver eenmaal stevig in gedurende 1 à 2 seconden.
2. Laat enkele seconden inwerken.
3. Draai het hoofd naar de andere kant en herhaal in het andere neusgat.
4. Snuit de neus.
5. Was de verstuiver na elk gebruik met warm water en droog het daarna goed af.



Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voor gebruik.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking vermeld staat.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren.

STERILE

A

C **€ 0459**
Medisch hulpmiddel