

**Toepassing:** Neem de oppervlakken zorgvuldig af. Let op dat het oppervlak volledig moet worden bevochtigd om een optimale desinfectie te waarborgen. Niet geschikt voor reiniging van de huid. Tissues na gebruik op de juiste wijze afvoeren. Te desinfecteren oppervlak: ca. 1m<sup>2</sup>/tissue. **Opmerking:** Niet geschikt voor acrylglas (Plexiglas®) en andere oppervlakken of lakken die gevoelig zijn voor alcohol (voer eventueel een test uit op een onopvallende plek). Contact met eet- en drinkwaren vermijden totdat het gedesinfecteerde oppervlak volledig droog is. Niet geschikt voor invasieve medische instrumentaria. Het middel is uitsluitend bestemd voor professional gebruik.

**Werkzame stoffen:** Propan-1-ol 4 Etanol 47 mg/g. **Etikettering:** Waarschuwing (CAS 71-23-8). Ontvlambare vloeistof, irriterend voor de ogen, kan de ogen irriteren. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. **Waarvoor bestemd:** Niet geschikt voor oppervlakken, vonken, open vuur, roken. Beschermende handschoenen dragen. Niet roken. Beschermende handschoenen dragen. **OGEN:** voorzichtig afspoelen met water. **contactlenzen verwijderen, indien aanwezig.** **aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.** **van de tekst: 08/2018.**

9814401 FP 06.20.3



N-66841

2820

