



uide pour
lilles de
ntact

⚠ CE 0344

sterile A

GEBRUIKSAANWIJZING
Eye Fresh is geschikt voor het reinigen, desinfecteren en inzetten van alle soorten harde contactlenzen.

Was uw handen, spoel de lens grondig af met water en maak ze droog. Neem de lens voorzichtig uit de lenshouder en leg deze in het oog en leg deze in het oog. Giet nu 5-10 druppels Eye Fresh op de lens en wrijf met de lens vervoegens de lens grondig af met Eye Fresh gevulde lenshouder minimaal 6-8 minuten. Bewaar de lenshouder in een infectie vrije omgeving.

0,03%