



VULPES HEALTHCARE

VERNEVELAAR PRO


HANDLEIDING

INHOUD

1. Waarschuwingen voor gebruik	3
2. Gebruikersgids	4-6
3. Schoonmaken	7-9
4. Service & Garantie	10

WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK

1. Voeg de vloeistof toe voordat je de vernevelaar aanzet.
2. Gebruik geen gezondheidsproducten die vernevelde olie kunnen bevatten.
3. Volg het advies van de arts over medicijnkeuze, medicijngebruik en behandel tijd.
4. Gebruik geen gedistilleerd water, meervoudig gezuiverd water of oliesubstanties voor verneveling.
5. Reinig en onderhoud het apparaat na ieder gebruik.
6. Maak het apparaat, het medicijnenkopje en de accessoires droog na elk gebruik.
7. Raak de mesh nooit aan met scherpe of harde voorwerpen, doe dit ook niet wanneer de vernevelaar storing heeft of niet functioneert zoals gebruikelijk is
8. Gelieve de vernevelaar minimaal 30 minuten op te laden, alvorens je de vernevelaar voor de eerste keer gaat gebruiken.

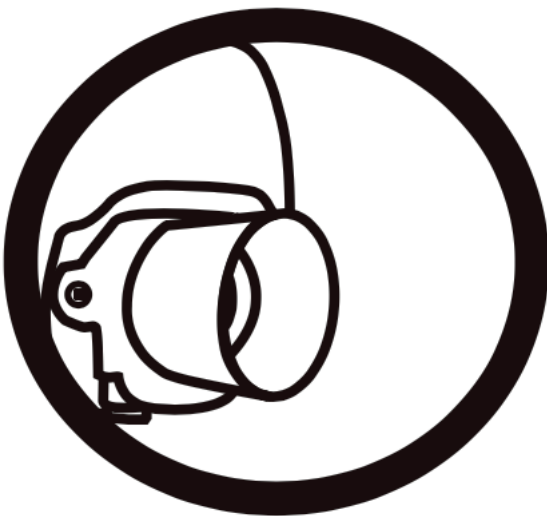

GEBRUIKERSGIDS

1



Open het dopje van het medicijnenkopje (let op de afsluitring op het dopje van het medicijnenkopje).

2



Voeg de juiste hoeveelheid van het vloeibare geneesmiddel toe. Overschrijdt het maximum niet.

3



Sluit de dop van het medicijnenkopje.




Sluit de vernevelaar aan op het masker.



Bevestig het masker aan je hoofd en begin met de verneveling. (Het wordt aanbevolen de strakheid aan te passen aan jouw eigen persoonlijke situatie.)

Schudt voor dat je begint met vernevelen de vernevelaar lichtjes. Dit zorgt uiteindelijk voor betere verneveling van de medicatie.


Let op! Zit er meer dan genoeg vloeistof in de vernevelaar maar blijft het oranje lampje toch flitsen? Druk dan 1x op de schakelaar om er voor te zorgen dat de vernevelaar blijft werken.

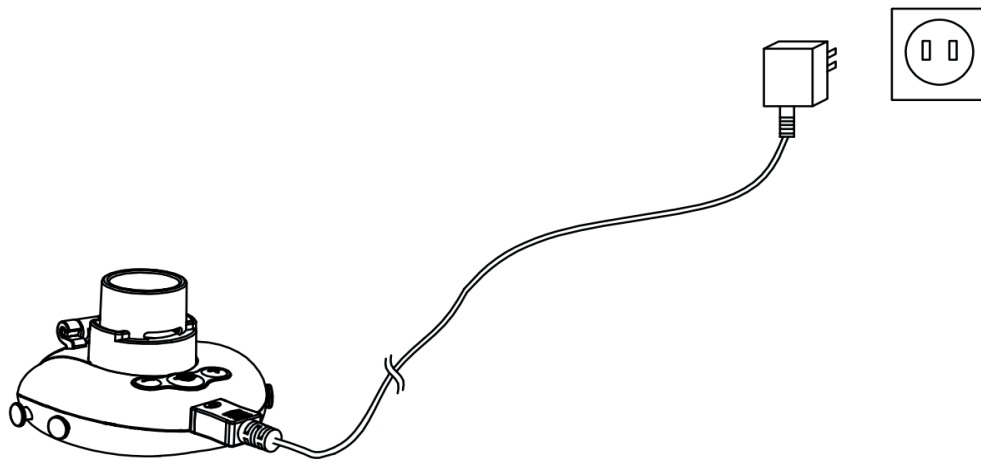

Let op! Alvorens je de vernevelaar oplaadt, controleer dan of het aangesloten stopcontact normaal geladen is.

Let op! Laadt de vernevelaar altijd alleen op en niet in combinatie met andere elektronische apparaten.

Bij het installeren van de vernevelaar moet de metalen sonde zich in de cirkelvormige groef van de hoofdmotor bevinden en gericht zijn op de verbinding tussen beide zijden van de vernevelaar en de kaartgleuf van de hoofdmotor. (Zie afbeelding hieronder)

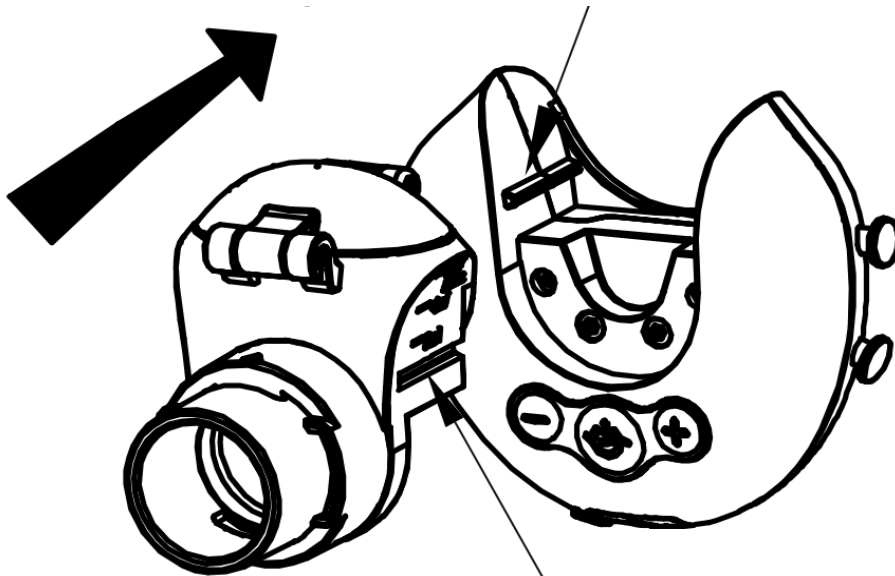

Let op! Zorg ervoor dat de contactpunten na gebruik worden gereinigd en gedroogd.

SCHOONMAKEN

Voorreinigen



Verwijder alle onderdelen van de vernevelaar.



Open de dop van het medicijnenkopje en giet de resterende vloeistof uit de medicijnbeker (Let op de afsluitring op de dop van het medicijnenkopje)



Voeg de juiste hoeveelheid warm water toe (de aanbevolen temperatuur is niet hoger dan 40 graden Celsius). Gebruik geen gedistilleerd water of gezuiverd water dat meerdere malen is gefilterd.



Sluit de dop van de medicijnbeker.



Veeg het apparaat af met een schoon medisch gaasje na het vernevelen. Raak het midden van het gaas niet aan om beschadiging aan het gaas te voorkomen.

Regelmatig schoonmaken



Verwijder de vloeistofbeker op horizontale wijze.



Maak de binnenkant van de medicijnbeker schoon.



Maak de buitenkant van de vernevelaaraansluiting schoon.



Maak de binnenkant van de vernevelaaraansluiting schoon.

Voeg de juiste hoeveelheid warm water toe (niet warmer dan 40 graden) en reinig herhaaldelijk de binnenkant van het medicijnenkopje, de vernevelaaraansluiting en andere onderdelen.

Veeg het apparaat na de vernevelingsreiniging af met een schoon medisch gaasje. Raak het midden van het gaas niet aan om beschadiging aan het gaas te voorkomen.

Zet de onderdelen in elkaar en bewaar de vernevelaar volgens de instructies.

Tip: Maak het instrument na gebruik schoon met 3 druppels zuiver water en 1 druppel witte azijn. Het vernevelingseffect is dan beter

SERVICE & GARANTIE

Bedankt voor je bestelling van de Vulpes HealthCare® Vernevelaar PRO.

Hopelijk ervaar je veel gemak van ons product.

Wanneer je niet tevreden bent over ons product, kun je het tot 30 dagen na je aankoop, kosteloos aan ons retour sturen! Daarnaast bieden wij de garantie: niet tevreden is geld terug!

Mocht het apparaat niet werken of wanneer je een andere vraag voor ons hebt, neem dan gerust contact met ons op via: +31 85 004 1705 of stuur ons een mailtje naar vulpesshipment@gmail.com wij kijken dan graag samen met jou naar een gepaste oplossing of alternatief.