

Aantrekken & vervangen van de Depend Comfort Protect Pants

U draagt de Depend Comfort Protect Pants in plaats van uw normale ondergoed.



Stap 1: Haal het broekje uit de verpakking en trek deze aan zoals normaal ondergoed. Het gekleurde blokje/ovaaltje geeft de achterzijde aan. Let op: klop de pants niet uit of wrijf deze niet los tussen de handen. Hierdoor ontstaat lekkage.

Stap 2: Trek het broekje goed omhoog voor een goede aansluiting in het kruis. Zorg dat eventuele huidplooiën, met name aan de binnenkant van de dijen, aan de buitenkant van de pants zitten, om lekkage en schuurplekken te voorkomen.

Stap 3: Gebruikte pants trekt u eenvoudig en hygiënisch uit door de zijnaden open te scheuren.

Na gebruik: Gooi de gebruikte pants bij het restafval in de prullenbak. Het materiaal is niet doorspoelbaar.

Tip:

Gebruik voor het weggooien van de door u gebruikte pants geparfumeerde zakjes om vervelende geurtjes te voorkomen.



Depend® Pants zijn ontworpen om onvrijwillig verloren urine te absorberen. Ze zijn ontworpen om matige tot zware incontinentie te absorberen en om als kledingstuk te worden gedragen in plaats van ondergoed. Het product komt in direct contact met de huid van de gebruiker en is bedoeld voor eenmalig gebruik. De gebruiker kan het product voortdurend dragen. In zeldzame gevallen, zoals bij inactieve gebruikers, kan de gebruiker last hebben van een open wond, zoals een doorligwond