



Importeur:
Kunming
Shanghai Int'l
De Overweg 1
8471 ZA Wieringa,
Nederland
www.heltiq.nl

Taihou Jinhong
Medical Materials Co.,
Ltd. No. 18, Wuzhou
South Road 225300
Taihou, Jiangsu
PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

Shanghai
International Holding
Corp. GmbH Europe
Eiffelstraße 60
20037 Hamburg
Germany

REF 1171220
554063
VT 30491223



MD
STERILE R



je eerste eerste hulp

Wondsnelverband

HeltiQ Wondsnelverband is een wondkussen en buiswonddeel in één, waarmee op een snelle manier sterk bloedende wonden, vooral kanten wonden afgedekt. Met de hechtplaatse die bevestigd is aan de buis wonddeel van het wondsnelverband, kun je het ook zelf gemakkelijk met één hand aanbrengen. Dit product is een medisch hulpmiddel.

- Wondkussen en buiswonddeel in één
- Snel en effectief wonden afdekken
- Geen extra hulpmiddel nodig

Gebruiksaanwijzing

1. Haal het wondsnelverband nog ongebruikt uit de verpakking.
2. Plaak met beide handen de kanten en rechterzijde van het elastisch buiswonddeel. Let erop dat de wonddeel aan de bovenzijde liggen. Het wondkussen houd je aan de onderzijde.
3. Trek je handen uit elkaar zodat het wondsnelverband een gaat. Leg het wondsnelverband direct goed op de wond. Het wondsnelverband mag nu niet meer verschuiven.
4. Zet het wondsnelverband vast door eerst het korte wonddeel vast te zetten. Daarna het lange wonddeel bevestigen, deze overtuigt het wondkussen. Het wondkussen snelt zichzelf worden afgedekt dat er geen openingen meer zichtbaar zijn.

Let op! Leg het wonddeel niet te strak aan!

Bewaaradvies

Bewaar het wondsnelverband op een droge en donkere plaats in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking.

Let op!

Steriliteit gewaarborgd, tenzij de houdbaarheidsdatum is verstreken. De verpakking geopend of beschadigd is.

XPC260220

2023-02

2023-02



8 717484 008164

Hoe te gebruiken bij:

Snijwond

1. REINIGEN

Spoel de wond schoon met HeltiQ Ong & Wond Spray. Droog droog met een steriel gasdrukpomp. (Zien de wondranden uit elkaar). Breng de buis samen door de HeltiQ Wondsnelverband te gebruiken.

2. AFDRIJKEN/AFDEKEN

Druk de buis samen af met het wondsnelverband.

Schaafwond

1. REINIGEN

Spoel de schaafwond schoon met HeltiQ Ong & Wond Spray. Droog droog met een steriel gasdrukpomp. Rijng de huid rondom de schaafwond met een wondsnelverband. Droog droog met een steriel gasdrukpomp.

2. AFDRIJKEN/AFDEKEN

Druk de schaafwond af met het wondsnelverband.

Diepe wond

1. AFDRIJKEN

Druk de wond af met het wondsnelverband.

2. OEBRU/AFDEKEN

Gebruik het HeltiQ Cascodeel Verband voor het geven van extra druk op de wond bij veel bloedingen. Of gebruik een HeltiQ Cascodeel Verband en zet vast met een HeltiQ Wondsnelverband.

First-aid dressing
To quickly cover
wounds

FR
Pansement
d'urgence
pour plaies
Pour couvrir
rapidement
les plaies

DE
Wundschnell-
verband
Zum schnellen
Abdecken von
Wunden



Scan de code
voor meer
informatie
over het
gebruik van dit
product.