

PÜRDOUX™

CPAP HOSE BRUSH

BROSSE TUYAU CPAP / CPAP-SCHLAUCHBÜRSTE

Anytime moisture sits in a confined space, you risk the chance of growing mold or algae. The CPAP Hose Brush is designed to gently clean your CPAP tubing to prevent this. Made with soft nylon bristles that are flexible to fit slim or standard hoses.

Chaque fois que l'humidité se trouve dans un espace clos, vous courez le risque de l'apparition des moisissures ou des algues. La Brosse Tuyau CPAP est conçue pour nettoyer en douceur votre tube CPAP afin d'empêcher que cela se produise. Fabriqué avec des poils en nylon doux flexibles pour s'adapter au tuyau standard ou étroit.

Immer wenn Feuchtigkeit auf engstem Raum vorhanden ist, besteht die Gefahr, dass sich Schimmel bildet oder Algen. Die CPAP-Schlauchbürste dient zum sanften Reinigen Ihres CPAP-Schlauchs, um dies zu verhindern. Hergestellt aus weichen Nylonborsten, die flexibel für schlanke oder normale Schläuche sind.

INSTRUCTIONS

When hose brush by unwinding and maintaining a hold on both ends. Once unwound, hang the brush. Note: winding and unwinding may result in a broken stem / Redressez la brosse du tuyau en la déroulant et en gardant une emprise aux deux extrémités. Une fois déroulée, accrochez la brosse. Note : l'enroulement et le déroulement peuvent entraîner la brisure du tronc / Richten Sie die Bürste gerade aus, indem Sie beide Enden abwickeln und festhalten. Hängen Sie die Bürste nach dem Abwickeln auf. Hinweis: Ein Enrollen und Abwickeln kann zu einem gebrochenen Schaft führen.

Use CPAP hose with mild detergent and luke-warm water / Lavez le tube CPAP avec un détergent doux et à l'eau tiède / Verwenden Sie das CPAP-Röhrchen mit einem milden Reinigungsmittel und lauwarmem Wasser.

Use the hose as straight as possible, gently work brush back-and-forth in short strokes, gradually working further inside the tube. When done cleaning, thoroughly rinse tube with a stream of cool water / Gardez le tube aussi droit que possible, faites des coups de brosse courts et répétés, travaillant progressivement à l'intérieur du tube. Lorsque vous avez terminé le nettoyage, rincez soigneusement le tube à grande eau froide / Halten Sie das Rohr so gerade wie möglich und arbeiten Sie die Bürste in kurzen Strichen hin und her, wobei Sie schrittweise weiter im Rohr arbeiten. Spülen Sie das Röhrchen nach der Reinigung gründlich mit kaltem Wasser ab.

Hang CPAP hose to dry / Accrochez le tuyau CPAP pour le faire sécher / CPAP-Schlauch zum Trocknen aufhängen.

Size / Taille / Größe:
6ft/1.8m



EC REP

CE

Advena Ltd. Tower Business
Centre, 2nd Fl., Tower Street,
Swatar, BKR 4013 Malta
Made in China /
Fabriqué en Chine /
In China Hergestellt