



de pour
les de
act



fresh

⚠ CE 0344

sterile A

ing: Polysorbaat 80
middel: PHMB 0,0002%
ing: Polysorbate 80
ing: PHMB 0,0002%

GEBRUIKSAANWIJZING

Eye Fresh is geschikt voor het reinigen, desinfecteren, bewaren en inzetten van in principe alle zachte contactlenzen.

Was uw handen, spoel ze af met schoon water en maak ze droog. Neem uw contactlenzen uit het oog en leg deze in uw lenshouder. Giet nu 5-10 druppels Eye Fresh op de lens en wrijf met uw vinger de lens voorzichtig schoon. Spoel de lens grondig af met Eye Fresh. Giet de lens vervolgens in de lenshouder gevuld met Eye Fresh. Het is de optimale desinfectie- en reinigingsmethode gedurende de nacht in de lenshouder. Na desinfectie kunt u de lens direct inzetten. Wanneer u de lens niet wilt inzetten, moet de lenshouder worden bewaard in de lenshouder.