

Ecosym is een vooruitstrevende reinigingsmanier voor kunstgebitten en gebitsprothesen, ontwikkeld door een Nederlandse tandprotheticus. Ecosym reinigt grondig, zonder het kostbare materiaal aan te tasten. De natuurlijke bestanddelen zijn zorgvuldig geselecteerd en zorgen iedere dag opnieuw voor een optimaal schoon en gezond gebit, dat er bovendien goed blijft uitzien. De Ecosym reinigingsmanier is eenvoudig en veilig in gebruik en heeft een frisse smaak.

Wekelijks gebruik

- Giet 3 à 4 dopjes Ecosym Forte in de Ecosym Gebitsbox.
- Neem uw prothese uit de mond en leg deze op het rooster van de gebitsbox.
- Vul de gebitsbox aan met lauw water totdat uw prothese geheel is ondergedompeld.
- Enkele uren laten inwerken is meestal voldoende.
- Neem het rooster uit de gebitsbox en spoel uw prothese goed af met lauw water.
- Doe enkele druppeltjes Ecosym Gel op de prothese.
- Poets de prothese schoon met de speciale Ecosym Gebitsborstel.
- Spoel uw prothese goed af met lauw water.