



CHAISE DE DOUCHE



VB499FC

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la chaise de douche réglable en hauteur Aidapt.

Veillez examiner votre produit pour tout dommage visible avant de l'utiliser / de l'installer. Si vous voyez des dommages ou suspectez un défaut, veuillez ne pas utiliser, mais contactez votre fournisseur.

Ces instructions doivent être lues attentivement et laissées à l'utilisateur du produit pour référence future.

UTILISATION PRÉVUE

La chaise de douche réglable en hauteur est idéale pour les utilisateurs à mobilité réduite et ceux qui ne peuvent pas se tenir debout pendant de longues périodes. Ce produit ne doit être utilisé que sur des surfaces planes et stables.

REGLAGE DES PIEDS EXTENSIBLES

Saisissez le pied de la chaise d'une main tout en poussant la goupille de verrouillage métallique vers le bas de l'autre main pour que la goupille de verrouillage se rétracte complètement dans le pied (voir fig.1).

Sélectionnez la hauteur requise en ajustant la section supérieure dans un mouvement vers le haut ou vers le bas et relâchez la goupille de verrouillage métallique devant la position de trou requise (voir fig.2, fig.2 (a)).

N'installez jamais les pieds de manière inégale ou inclinée, cela compromettrait la sécurité de l'utilisateur.

Avant l'utilisation, assurez-vous toujours que la goupille de verrouillage dépasse complètement de la position de trou sélectionnée.

Appliquez une pression vers le bas sur les poignées de la chaise de douche pour vérifier que la chaise de douche a été assemblée correctement.



fig. 1



fig. 2



fig. 2a

UTILISATION D'HUILES DE BAIN

Des précautions doivent être prises si vous utilisez toute forme d'huiles de bain ou de préparation pour peau grasse avec votre chaise de douche car cela peut altérer la résistance naturelle de votre peau.

En cas d'utilisation d'une telle huile, votre siège doit être soigneusement nettoyé avec un détergent approprié pour décomposer tout résidu huileux. Le non-respect de cette recommandation peut compromettre votre sécurité.

NETTOYAGE

Tous les composants du produit sont fabriqués à partir de matériaux de qualité. Cependant, il est très important de nettoyer votre chaise de douche uniquement avec un nettoyeur non abrasif ou un détergent doux avec un chiffon doux

Évitez d'utiliser un détartrant. Les nettoyeurs abrasifs ou les tampons de nettoyage abrasifs endommageront gravement votre produit et cela sera irréversible.

En cas de désinfection à la chaleur, l'une des trois températures et durée d'exposition suivantes peut être utilisée:

- a) une température de 90 ° C pendant 1 minute**
- b) une température de 85 ° C pendant 3 minutes**
- c) une température de 80 ° C pendant 10 minutes**

Veuillez noter qu'il est recommandé de nettoyer et de sécher la chaise tous les jours. Cela aidera également à réduire l'accumulation de tartre sur le produit.

ENTRETIEN

Veuillez vérifier périodiquement la chaise de douche pour déceler tout signe de dommage et en cas de doute, contactez votre fournisseur.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Largeur	545 mm
Profondeur	470 mm
Hauteur	820-920mm
Poids net	3,9kg

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations données dans ce livret d'instructions ne doivent pas être considérées comme faisant partie ou établissant un engagement contractuel ou autre de la part d'Aidapt Bathroom Limited ou de ses agents ou de ses filiales et aucune garantie ou représentation concernant les informations n'est donnée.

Faites preuve de bon sens et ne prenez pas de risques inutiles lors de l'utilisation de ce produit. En tant qu'utilisateur, vous devez accepter votre part de responsabilité pour votre propre sécurité lors de l'utilisation du produit.

GARANTIE

Aidapt Bathroom Ltd garantit le produit exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un an.

Si ce produit doit être utilisé dans des conditions autres que celles recommandées, la garantie est alors annulée. De même, toute tentative faite pour réparer ou modifier le produit annulera la garantie.

Le produit que vous achetez peut différer légèrement des illustrations. Cette garantie s'ajoute à et n'affecte vos droits statutaires.

Notre garantie est gérée par nos revendeurs.

Si votre produit arrive endommagé, vous devez contacter le revendeur chez qui vous l'avez acheté.

Ses coordonnées seront sur la facture qui est arrivée avec le produit, ou sur l'e-mail que vous avez reçu lorsque vous avez passé la commande. Ne contactez pas Aidapt Bathroom Ltd, seul votre revendeur peut organiser un remplacement ou remboursement.

Si votre produit tombe en panne pendant la période de garantie, veuillez contacter le revendeur chez qui vous l'avez acheté.

Si vous avez reçu votre produit et avez besoin d'une assistance technique, veuillez appeler notre service d'assistance au 01744745000.

Une copie de la notice d'instructions peut être téléchargée sur notre site Web.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX

Telephone: +44 (0) 1744 745 020 Fax: +44 (0) 1744 745 001

Web: www.aidapt.com

Email: sales@aidapt.co.uk