

Easybaby

Anti Krampjes Band

Helpt krampjes en buikpijn te verlichten
Helpt bij verlichten van jeuk bij muggenbeet
Afmeting: 60X9.5cm(23.6X3.7)



KENMERKEN:

Herbruikbare met gel gevulde verpakking voor warmte- en kou-behandeling. Geschikt voor gebruik in een magnetron en een vriezer. Veilig en niet giftig. Wordt geleverd met een zachte tailleband met verstelbaar klittenband. Inclusief een gel-pack zakje, vlaszaadzakje en een lavendelzakje (naar keuze te gebruiken).

HANDLEIDING:

Opwarmen en koelen uitvoeren zonder tailleband.

INSTRUCTIE VOOR KOELLEN:

1. Plaats verpakking min. 1 uur in de vriezer of koelkast, of tot de gewenste temperatuur is bereikt.
2. Controleer voor aanbrengen of de temperatuur geschikt is voor de baby.

INSTRUCTIE VOOR OPWARMEN (Magnetron):

1. Zorg dat de gel-pack, vlaszaadzak en /of lavendelzakje op kamertemperatuur is.
2. Wikkel in een vochtige doek of keukenpapier en plaats de verpakking in het midden van een schoon magnetrondraaiplateau (zonder de zijanten te raken). Schakel alle extra magnetronfuncties uit, zoals "grill".
3. Verwarm volgens onderstaand schema.
4. Als er meer warmte nodig is, verwarm dan opnieuw in de hieronder aangegeven tijd, totdat de veilige gewenste temperatuur is bereikt voor een comfortabele toepassing. Controleer voor het opwarmen of de temperatuur van delen van de verpakking te hoog is (normaal gebeurt dit aan de rand van de verpakking) en kneed de verpakking om de temperatuur gelijkmatig te maken, draai de verpakking vervolgens 180 graden en verwarm opnieuw in de magnetron.
5. Test voor gebruik altijd om een gelijkmatig en veilig warmteniveau te krijgen en om verbranding te voorkomen.

Magnetron	Opwarmtijd vanaf kamertemperatuur	Extra opwarmtijd indien meer warmte nodig is
700 Watt	10 Seconden	5 Seconden
1000 Watt	5 Seconden	5 Seconden

INSTRUCTIE VOOR OPWARMEN (in warm water) - Geldt alleen voor gel-pack

Plaats gel-pack in heet water gedurende 5 minuten. Controleer of de temp. geschikt is voor de baby.

WAARSCHUWINGEN:

• Dit product is geen speelgoed en mag niet aan kinderen worden gegeven om te spelen. • Niet doorslikken. Alleen voor uitwendig gebruik. • NIET oververhitten. Laat tijdens het verwarmen niet onbeheerd achter. • Wees voorzichtig bij het verwijderen uit de magnetron, de verpakking kan erg heet zijn • Om bevroering of brandwonden te voorkomen, legt u het apart tot het een temperatuur bereikt die de babyhuid kan verdragen. • Niet meer dan 20 minuten per keer aanbrengen, met een pauze van 20 minuten tussen de toepassingen. • NIET dragen tijdens het slapen. Controleer de huid regelmatig tijdens gebruik. • NIET gebruiken op een ongezonde, beschadigde of kapotte huid of warm gebruiken op plekken met blauwe plekken of zwellingen die binnen 48 uur zijn opgetreden of op het lichaam waar je geen warmte of kou kunt voelen of met etherische vormen van warmte of kou. • NIET gebruiken bij mensen die het product niet kunnen verwijderen, inclusief kinderen, zuigelingen en ouderen, of bij mensen die niet alle gebruiksinstructies kunnen volgen. Baby's of kinderen moeten onder toezicht van een volwassene staan. • Oefen GEEN extra druk uit op het product • Niet doorboren! Als de gel in contact komt met de ogen of de huid, was het aangetaste gebied dan onmiddellijk met water. Als de gel per ongeluk wordt ingeslikt, drink dan veel water en zoek onmiddellijk professioneel medisch advies. • NIET gebruiken als de inhoud van warme of koude verpakkingen lekt en / of de verpakking beschadigd of gescheurd is. • Stop het gebruik en vraag een arts als de pijn erger wordt of langer dan 7 dagen aanhoudt, of als u last heeft van een branderig gevoel, zwelling, uitslag of veranderingen aan uw huid. • Vraag voor gebruik advies aan een arts wanneer u lijdt aan diabetes, bloedsomloop of hartaandoeningen, reumatoïde artritis of als u zwanger bent.

VEILIG BEWAREN EN SCHOONMAKEN:

Doe de gel-pack in een plastic zak en bewaar in de koelkast om de levensduur te verlengen. Afnemen met een vochtige doek en laten drogen. De gel-pack is niet geschikt voor in de wasmachine. Gooi weg als er tekenen van schade, scheuren of gaten zijn. Het vlaszaad - en lavendelzakje in een droge ruimte op kamertemperatuur bewaren. Wassen met de hand.

Schoonmaken doe je grondig in warm water en afwasmiddel. Na elk gebruik op kamertemperatuur drogen.

BELANGRIJK BIJ WEGGOOIEN:

Dit materiaal is geen gevaarlijk afval. Gooi de verpakking weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.