

Andere producten van het Hulpmiddelenexpert assortiment die u in combinatie met deze kunnen interesseren:

L35324: Dycem antislipmat



De verstelbare kanteftel voor bed of stoel en de Dycem antislipmat maken deel uit van een assortiment van meer dan 3000 producten voor ondersteuning in het dagelijks leven die beschikbaar zijn via Hulpmiddelenexpert.

Om het volledige assortiment te zien, bezoek onze website, www.hulpmiddelenexpert.nl, of vraag een catalogus aan op het onderstaande nummer.

Hulpmiddelenexpert, Venkelbaan 22,
2908 KE Capelle aan den IJssel,
The Netherlands.

Tel. 0031 (0)10 242 0913
Email: info@hulpmiddelenexpert.nl
www.hulpmiddelenexpert.nl

Hulpmiddelenexpert is een toonaangevende leverancier van gemeenschaps- en levensondersteunende apparatuur. Voor ons volledige assortiment kunt u terecht op de website: www.hulpmiddelenexpert.nl



Hulpmiddelenexpert.nl

Gebruiksaanwijzing M66832 Verstelbare kanteftel voor bed of stoel

Algemene waarschuwing

Lees en volg deze instructies zorgvuldig op, want als u dit niet doet, kan dit leiden tot letsel voor de gebruiker. Bewaar de instructies op een veilige plaats

1.0 Aangegeven gebruik

Deze veelzijdige tafel kan worden gebruikt op stoelen of eenpersoonsbedden. Het heeft vier zwenkwielen hanteren en te positioneren maken. De hoogte kan worden ingesteld tussen 700 mm en 900 mm en de breedte tussen 900 mm en 1100 mm. Het tafelblad kan worden gekanteld en gefixeerd onder elke hoek, tot een maximale helling van 55°, door middel van een handmatig bediende gasveer. De tafel bevat twee bijzettafels die altijd horizontaal blijven; hierdoor kan de gebruiker het centrale tafelblad kantelen en de bijzettafels gebruiken om bijvoorbeeld een frisdrank te plaatsen. De bijzettafels kunnen worden verwijderd als ze niet nodig zijn. Alle oppervlakken zijn eenvoudig te reinigen.



2.0 Uitpakken

- Dit product wordt gedemonteerd geleverd, dus het is noodzakelijk om het voor gebruik te monteren.
- Er is geen gereedschap nodig.
- Haal het product uit de verpakking en controleer het op beschadigingen. Als u schade opmerkt of een defect vermoedt, monteer het product dan niet en neem onmiddellijk contact op met uw leverancier.
- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn (zie de inhoud op de achterzijde).


Index	
Beschrijving	Aantal
Bord montage	1
Zijtafel	2
Aanpassingsbeugel	2
Afstelwiel (borgschroef)	4
Set van poten	2

3.0 Veiligheidsmaatregelen

- Overbelast het tafelblad niet; het maximale gewicht dat het kan dragen is 15 kg met het tafelblad in een horizontale positie.
- Gebruik de tafel niet om voorwerpen te vervoeren.
- Het is raadzaam om de wielen te blokkeren voordat u de tafel gebruikt.
- Voordat u het tafelblad omhoog of omlaag brengt, moet u alle voorwerpen die in de weg kunnen zitten, verwijderen.

4.0 Montage-instructies


- 1 - Plaats de plank op de grond met de beeldzijde naar beneden, zoals weergegeven in diagram 1
- 2 - Schuif het kortere uiteinde van de verstelbeugel op de middenstang van het tafelblad tot de gewenste breedte is bereikt. Vervolgens de gaten van de twee stukken uitlijnen en met het stelwiel vastzetten (zie diagram 1).

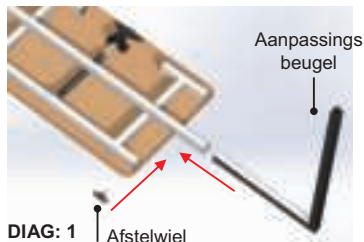

DIAG: 1 Afstelwiel

- 3 - Herhaal stap twee aan de andere kant van de tafel.

- 4 - Bevestig de beenconstructie aan de instelbeugel en schuif deze op de juiste hoogte. Lijn de gaten uit en zet de onderdelen vast met het stelwiel (zie diagram 2).

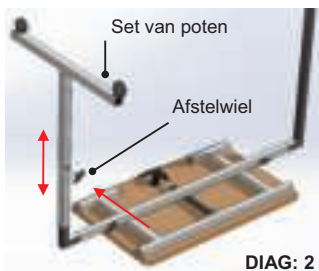


DIAG: 2


- 5 - Herhaal stap vier met het andere poot.

- 6 - Draai het tafelblad om en blokkeer de wielen.

- 7 - Installeer de bijzettafels door de rechthoekige buizen in de overeenkomstige buizen van het tafelblad te steken. Druk bij het insteken op de bevestigingsvorken om ze te laten zakken en duw tot ze perfect passen (zie diagrammen 3 en 4).

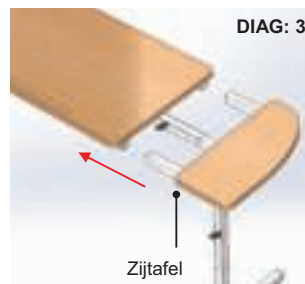


DIAG: 3

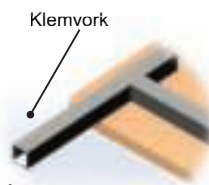

DIAG: 4

5.0 Gebruiksaanwijzing

Om het tafelblad te kantelen, drukt u het handvat naar de onderkant van de tafel en brengt u het tafelblad omhoog of omlaag. Om het tafelblad te vergrendelen, laat u de zwengel los (zie diagram 5).

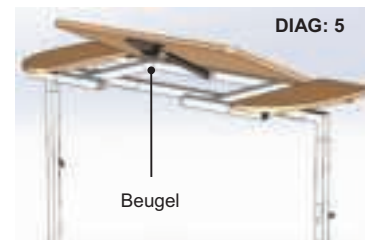

6.0 Schoonmaken

- Reinig regelmatig met een zachte doek en een mild reinigings- of desinfectiemiddel.
- Gebruik geen schurende producten.

7.0 Verzorging en Onderhoud

Controleer regelmatig de stabiliteit en de sterkte van het product en zorg ervoor dat alle schroeven goed en in goede staat zijn aangedraaid.