



## ***Glory of White***

### Gebruiksaanwijzing

1. Vul een glas of kom met heet water (80 graden).
2. Stel de snurkbeugel af op de gewenste stand
3. Leg de snurkbeugel circa 30 seconden in het hete water.
4. Haal de snurkbeugel uit het water met een lepel. Raak het zachte gedeelte niet aan met je vingers.
5. Plaats de beugel op de juiste manier in je mond.
6. Bijt nu je tanden in de snurkbeugel zodat er een afdruk wordt achtergelaten.
7. Verwijder de beugel na 20 seconden en koel het af in koud water.
8. De snurkbeugel is nu klaar voor gebruik.
9. Indien de snurkbeugel nog niet de gewenste vorm heeft, herhaal dan de stappen 3 t/m 8

### Garantievoorwaarden

1. Spoel de snurkbeugel na ieder keer dat u het gebruikt hebt schoon met kamertemperatuur water.
2. Bewaar de gebruikte beugel in het bewaardoosje.
3. Leg de beugel niet in de directe zon of op een stoffige plek.
4. Bewaar de beugel niet bij temperaturen boven de 38 graden.
5. Houd de beugel buiten het bereik van kinderen in verband met kleine onderdelen.
6. Deel de snurkbeugel niet met anderen.
7. Gebruik de snurkbeugel niet in combinatie met gebitsprothesen of epileptische symptomen.

Wanneer u voor de eerste nacht met de snurkbeugel in gaat slapen kan het in sommige gevallen zo zijn dat u wat last krijgt van gevoelige kaken en verhoogde speekselaanmaak. Deze klachten zullen in de loop van der tijd verminderen.

Indien u na aankoop toch besluit geen gebruik te willen maken van de snurkbeugel, dan kunt u (mits nog in het plastic) met complete verpakking en inhoud terugsturen via [bol.com](https://www.bol.com).