

1 | Inleiding

Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor dit toestel.



Lees de gebruiksaanwijzing, de voorzorgsmaatregelen en de toepassingsinstructies. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik en geef deze door aan andere gebruikers.



Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar

2 | Gebruik volgens de bestemming

Dit apparaat is niet voor commercieel of klinisch gebruik bedoeld, maar uitsluitend voor eigen gebruik in het particulier huishouden. De inhalator wordt bij de behandeling en verlichting van luchtwegenziektes gebruikt. Het gebruik is aangeraden bij verkoudheid, griepinfecties, astma en chronische longziektes.



3 | Waarschuwing

- Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (kinderen inbegrepen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of bij gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of van hun aanwijzingen hebben gehoeven, hoe het apparaat gebruikt moet worden.
- Bij gevoel van duizeligheid moet men het inhaleren direct onderbreken.
- Bij eventuele verdere vragen raadpleeg uw arts!
- Na het vullen met het hete inhalatiemiddel het apparaat niet meer transporteren
- Heet water verhit ook het materiaal van de inhalator. Daarom mag de gevulde inhalator alleen aan de voorziene grepen aangerast worden.
- Controleer het apparaat regelmatig op tekenen van slijtage of schade. Als er zulke tekenen zijn of als het apparaat verkeerd gebruikt is, breng het afen terug naar de leverancier voordat u het verder gebruikt.

4 | Gebruik

- a Schroef het bovenste en het onderste deel van de inhalator van elkaar met een lichte draaiing tegen de richting van de wijzers van de klok in.
- b Vul het onderste deel voor de helft met heet water en doe er evt. wat etherische olie bij. Het is ruim voldoende, het water tot 50°-60° C op te warmen
- c Plaats het bovenste deel met het ademmasker weer op het onderste en vergrendel het door middel van een lichte draaiing in de richting van de wijzers van de klok. Controleer of het goed vastzit.
- d Plaats het apparaat zodanig, dat het niet kan kantelen en let bij het inhaleren op een gemakkelijke en ontspannen zithouding.
- e Plaats neus en mond in het ademmasker en haal diep adem. Voor het uitademen de lucht gedurende ca. twee seconden inhouden.



5 | Reiniging

- De inhalator na elk gebruik onder vloeiend heet water of in de vaatwasmachine reinigen
- Het bestaat uit milieuvriendelijk polypropyleen, is tegen koken bestand en vaatwasmachinebestendig.
- Bewaar het toestel op een droge, zilverre plaats.

6 | Omvang van de levering

- Bovendeel, Onderdeel, Roze mond-neus opzetstuk, Lichtblauw mond-neus opzetstuk, Gebruiksaanwijzing

7 | Technische Daten

Materiaal: 100% Polypropylen

Volume: 700 ml

Afmetingen: 26 x 12,4 x 23,5 cm

Dit product kan zonder problemen met het huisvuil meegegeven worden.

8 | Garantie

De waarborg bedraagt 24 maanden vanaf de verkoopsdatum op fabricagefouten die materiaal en kwaliteit betreffen. De fabrikant staat niet garant voor schade die het gevolg is van een gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is of voor schade die het gevolg is van een foutief gebruik.