



TANDENBLEEKSET

HANDLEIDING

Bedankt voor uw bestelling!

AANBRENGEN VAN DE WHITENING GEL

Plaats een kleine druppel van de whitening gel op beide kanten van het bitje. Gebruik niet te veel gel, dat kan zorgen voor een slechter en onevenredig resultaat. Plaats het bitje in je mond en pas de positie aan tot dat al je tanden goed bedekt zijn. Voer lichte druk uit met je tanden op het bitje door lichtjes dicht te bijten. Hierdoor wordt elke tand volledig bedekt met whitening gel.

GEBRUIK VAN DE LED LAMP

Neem allereerst het plastic laagje tussen de batterijen van het lampje uit. Dit doe je eenvoudig door het lampje te openen, één batterij en het plasticje eruit te halen. Stop vervolgens de batterij terug. Doe het lampje aan door op het witte knopje te drukken. Houd het lampje zo dicht mogelijk tegen de tanden aan gedurende de hele bleekbehandeling. De LED-versneller zorgt ervoor dat resultaten sneller behaald zullen worden.

BLEKEN VAN DE TANDEN

Houd het bitje voor ongeveer 20-45 minuten in. Wij raden aan om met losse behandelingen van 20 minuten te beginnen. Je kan de lengte en frequentie van de behandelingen laten toenemen wanneer je tanden gewend zijn aan het proces. Haal het bitje na gebruik uit je mond en spoel deze af met water.

NA ELKE BEHANDELING

Spoel na elke behandeling je mond met lauw water en poets alle overgebleven gel van de tanden met een tandenborstel, dit voorkomt irritatie. Vergeet niet je tandenborstel goed af te spoelen om de resten whitening gel hiervan te verwijderen.

Herhaal de behandelingen wekelijks tot je het gewenste resultaat hebt behaald.

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

MAIL: JSJBESTELLINGEN@GMAIL.COM

WIJ VINDEN HET LEUK OM AL JULLIE RESULTATEN TE ZIEN!