



# Rollator

Handleiding

**Artikelnummer:** ALR-2023-LW / RA-RL016Q



# Belangrijke informatie

Bij uw product ontvangt u een handleiding die beschikbaar blijft na levering. Houd er rekening mee dat we de handleiding kunnen wijzigen vanwege technologische ontwikkelingen.

Belangrijk voor uw Aluminium Rollator: Overschrijd het **maximale gebruiksgewicht van 136 kg** niet. Neem gerust contact met ons op via onze mail : [info@eldrly.nl](mailto:info@eldrly.nl)

# Onderdelen

- |                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Rugsteun                                | 7. Achterwielen             |
| 2. Handvaten                               | 8. Inklap mechanisme        |
| 3. Remhendels                              | 9. Inklap mechanisme        |
| 4. Hoogte verstelbare buizen van handvaten | 10. Voorwielen              |
| 5. Zitting                                 | 11. Opbergtas               |
| 6. Stokhouder                              | 12. Reflector               |
|                                            | 13. Reflecterende opbergtas |



# Montage instructies



## Stap 1

Plaats de handvatbuizen in het frame en druk op de zilveren sluitpin om de gewenste hoogte van de handvatten in te stellen. Zorg ervoor dat de zilveren sluitpin uit het frame steekt om te vergrendelen.



Open de rollator door de handvatten uit elkaar te trekken (zie fig. 1). Vergrendel de rollator vervolgens door de zitting aan beide zijden omlaag te drukken totdat deze vastklikt in de vergrendelpositie (zie fig. 2 en 3).



## Stap 2

Laat de achterpoten met de achterwielen zakken door de rode vergrendelclip aan beide zijden omhoog te trekken (zie fig. 4) en laat ze zakken totdat de vergrendelclip weer vastklikt. Herhaal deze stap voor het andere achterwiel aan de tegenovergestelde zijde.



## Stap 3

Laat de voorwielen zakken door de rode vergrendelclip naar beneden te duwen (zie fig. 5) en breng het wiel in positie totdat het vastklikt. Herhaal deze stap voor het andere voorwiel aan de tegenovergestelde zijde.


## Stap 4

Bevestig uw tas eenvoudig aan de rollator met behulp van de tasophanging (kunststof pinnen). Zo heeft u al uw benodigdheden handig bij de hand tijdens het gebruik van de rollator. Houd uw rollator veilig op zijn plaats met de parkeerrem!

Om de parkeerrem in te schakelen, drukt u eenvoudig de remhendel naar beneden. Dit zorgt ervoor dat uw rollator stevig op zijn plek blijft staan. Wanneer u weer wilt gaan lopen, trekt u de remhendel omhoog om de parkeerrem te ontgrendelen. Op deze manier kunt u veilig en gemakkelijk verder gaan met uw wandeling.

## Neem uw wandelstok gemakkelijk mee!

Als u uw wandelstok wilt meenemen, plaatst u deze eenvoudig in de houder en gebruikt u klittenband om de bovenkant stevig vast te zetten. Op deze manier kunt u uw wandelhulpmiddel veilig en handig meenemen tijdens uw wandelingen.

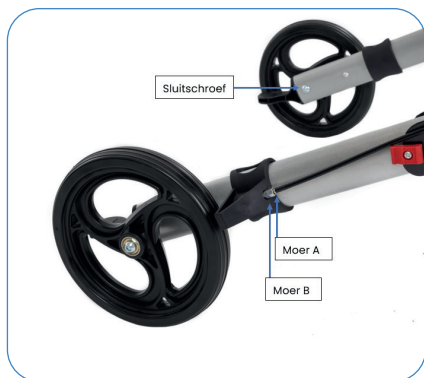

## De remmen van uw rollator zullen periodieke bijstelling vereisen.

Houd uw rollatorremmen goed afgesteld voor optimale prestaties. Periodieke bijstelling van de remmen is vereist om ervoor te zorgen dat ze naar behoren functioneren. Volg deze eenvoudige stappen om de remmen bij te stellen:

- Draai moer B los en gebruik moer A om de rem strakker te zetten (of losser te maken) naar uw voorkeur. Controleer de remmen door eraan te voelen en zorg ervoor dat ze correct zijn aangepast.
- Draai moer B weer stevig vast om de aanpassingen te vergrendelen.

Indien verdere bijstelling nodig is, volg dan deze extra stappen:

- Draai de sluitschroef (locking screw) los met een geschikte schroeven-draaier.
- Gebruik een tang om de kabel ongeveer een millimeter naar beneden te trekken.
- Draai de sluitschroef weer stevig vast om de kabel op zijn plaats te houden.

Nu kunt u de remmen verder aanpassen door moer B en moer A los te draaien volgens de eerder genoemde instructies.

Zorg ervoor dat uw remmen goed afgesteld zijn voor een veilige en comfortabele rollatorervaring. Raadpleeg indien nodig een professional of de handleiding voor gedetailleerdere instructies.



# Gebruiksaanwijzing

In- en uitklappen van de rollator: eenvoudige stappen voor senioren

## Uitklappen

1. Plaats de rollator voor u in de looprichting en vergrendel de parkeerrem.
2. Met beide handen drukt u de zijkanten van de zitting naar beneden totdat deze stevig vastklikt. Let op: Houd uw handen niet onder de zitting om verwondingen te voorkomen.
3. Gebruik de vergrendelclips om de voor- en achterwielen op hun plaats vast te klikken.
4. Hang de tas aan het daarvoor bestemde hangmechanisme.
5. Stel de hoogte van de handvatten in naar uw wens door de zilveren sluitpin aan beide zijden in te drukken en het handvat omhoog of omlaag te schuiven. Er zijn acht beschikbare posities. Zorg ervoor dat de zilveren sluitpin uit het frame steekt om te vergrendelen.

## Inklappen

1. Verwijder de tas van het frame.
2. Trek aan de trekband in het midden van de zitting omhoog – de rollator vouwt zich in.
3. Gebruik de vergrendelclips om de rollator zo compact mogelijk in te klappen.

## Remmen

1. Tijdens het lopen: Trek de remhendels omhoog om te remmen.
2. Tijdens stilstand of bij gebruik van de zitting: Duw de remhendels omlaag om de parkeerrem in te schakelen.
3. Hulp bij stoepranden (Hellinghulp): Indien nodig, duwt u met uw voet op de hellinghulp aan de achterkant van het verlengde frame, langs het achterwiel. Dit vergemakkelijkt het optillen van de voorwielen bij het oversteken van stoepranden.

## Veiligheidsinstructies voor senioren

### Handvatten

- Overschrijd nooit de minimum en maximum toegestane hoogte van de handvatten.
- Hang niet op de handvatten, dit kan leiden tot kantelen van de rollator.

### Remmen

- Gebruik de remmen tijdens het lopen op steilere hellingen door de hendels omhoog te trekken.

### Ondergrond

- Gebruik de rollator op een vaste en stevige ondergrond.

### Inklappen

- Gebruik de rollator niet om voort te bewegen wanneer deze nog is ingeklapt. Dit kan leiden tot kantelen.
- Let op dat kleding of lichaamsdelen niet bekneld raken tijdens het in- en uitklappen van de rollator.

### Gebruik

- Gebruik de rollator uitsluitend voor lopen en niet voor het transporteren van zware goederen. Dit is niet toegestaan en gevaarlijk.

### Schoonmaak

- Maak de rollator regelmatig schoon en desinfecteer deze. Gebruik een milde zeep zonder schuurmiddelen. Standaardmethoden voor desinfectie kunnen worden gebruikt. Gebruik geen stoomreinigers of schoonmaakmiddelen met bijtende stoffen.

## Technische specificaties

|                                                               |                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Maximale gebruikersgewicht:                                   | 136 kg                                                     |
| Gewicht:                                                      | 7,8 kg                                                     |
| Hoogte handvatten:                                            | Verstelbaar 78 - 95,5 cm                                   |
| Zithoogte:                                                    | 53 cm                                                      |
| Materiaal frame:                                              | Aluminium                                                  |
| Kleur:                                                        | Metallic silver                                            |
| Banden:                                                       | Lekvrij comfort banden (PU)                                |
| Gebruik:                                                      | Geschikt voor binnen en buiten                             |
| Totale breedte                                                | Breedte punt 65 cm                                         |
| Zitbreedte:                                                   | 46 cm                                                      |
| Afstand tussen duwhandvatten:                                 | 47,5 cm                                                    |
| Afmetingen staand ingeklapt:<br>(handvatten in laagste stand) | 66,5 x 25 x 78 cm (L x B x H)                              |
| Afmetingen 3-dubbel ingeklapt:                                | 60,5 x 25 x 41 cm (L x B x H)                              |
| Extra voorzieningen:                                          | Reflecterende strip, stokhouder<br>en comfortabele rugband |
| Opvouwbaar:                                                   | Drie dubbel inklapbaar<br>(d.m.v. schuifknoppen)           |

## Beoogd doel en gebruiker

De lichtgewicht rollator is bedoeld voor gebruikers die ondersteuning nodig hebben bij het lopen of een beperkte mobiliteit hebben.

De rollator is geschikt voor gebruik binnen en buiten op droge, stevige en vlakke ondergronden.

Let op het maximale gebruikersgewicht, vermeld op het label op het frame van de rollator.

## Garantie

Garantie is alleen geldig als het product wordt gebruikt volgens de gespecificeerde voorwaarden en voor het beoogde doel. De beoogde levensduur van de rollator is 5 jaar. Gebruik of monteer geen onderdelen van derden op de rollator, tenzij deze officieel zijn goedgekeurd door de fabrikant.

# Service en Garantie

De importeur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor letsel aan de gebruiker of schade aan eigendommen als de aanbevelingen en waarschuwingen niet worden opgevolgd bij het gebruik van de rollator. Als u de instructies in deze handleiding volgt, is de rollator een zeer veilig en stabiel product. Het is echter belangrijk om te weten dat het negeren van de gebruiksaanwijzingen kan leiden tot gevaarlijke situaties. Wees daarom extra voorzichtig bij het gebruik ervan. Op deze rollator zit een garantietermijn van 12 maanden. Neem voor garantie en service contact op met ons. Hebt u na deze termijn van 12 maanden toch (technische) problemen met het product dan kunt u ons ook benaderen voor een eventuele oplossing.

Als het voorkomt dat u niet naar tevredenheid wordt geholpen wat betreft de garantie en service, stuurt u dan alstublieft een email naar Eldrly afdeling klantenservice op onderstaand adres: [info@eldrly.nl](mailto:info@eldrly.nl)

## **Fabrikant**

Zhenjiang Rapid Rehab & Instrument  
Co.,LTD Add.: NO.35 HUANCHENG SOUTH  
ROAD DANBEI TOWN, ZHENJIANG  
JIANGSU, P.R.CHINA 212311



