

balance activ

Vaginale Gel

Onaangename geur? Ongewone afscheiding? Ongemak? U bent niet de enige...

De vagina is het woongebied van verschillende soorten bacteriën. De bacteriën die normaal in grote aantallen aanwezig zijn, zijn lactobacteriën. Lactobacteriën produceren melkzuur, dat verantwoordelijk is voor de normale lage vaginale pH en beschermt tegen infectie. Als het aantal lactobacteriën daalt, neemt de pH-waarde toe en wordt de groei van 'slechte' bacteriën gestimuleerd. De medische term voor deze aandoening is 'bacteriële vaginose (BV)'. De symptomen van BV zijn een onaangename geur, een ongewone afscheiding en vaginaal ongemak. BV is een veel voorkomende vaginale aandoening. BV kan worden veroorzaakt door vele factoren, waaronder een lange menstruatie, veelvuldig douchen, het gebruik van intieme hygiëneproducten en geslachtsgemeenschap. Antibiotica en het gebruik van een intra-uterine Device (IUD, algemeen bekend als het spiraaltje) kunnen ook het evenwicht in de vagina verstoren.

Balance Activ® Vaginale Gel behandelt BV en voorkomt op natuurlijke wijze dat BV terugkomt

Balance Activ® Vaginale Gel bevat melkzuur, dat onmiddellijk de onaangename geur neutraliseert door het herstel van de normale pH-waarde van de vagina. De gel bevat tevens glycogeen, een voedselbron voor lactobacteriën. Een normale pH en voedingsstoffen helpen de lactobacteriën te groeien, waardoor de natuurlijke vaginale balans wordt hersteld en abnormale afscheiding, ongemak en herhaling van de onaangename geur worden voorkomen.

Wanneer moet ik Balance Activ® Vaginale Gel gebruiken?

Balance Activ® Vaginale Gel bestrijdt onaangename geur, ongewone afscheiding en ongemak, en herstelt de normale pH-waarde.

U kunt ook gebruik maken van Balance Activ® Vaginale Gel om een natuurlijke vaginale pH-waarde te behouden en herhaling van de symptomen te voorkomen.

Dosering:

Behandeling	
Voor de effectieve verlichting van vervelende geur, ongewone afscheiding, ongemak en BV	Gebruik 1 tube gedurende 7 dagen
Onderhoud en preventie	
Om de natuurlijke pH-balans te behouden en herhaling van de symptomen te voorkomen	Gebruik 1 tube elke derde dag gedurende 3 maanden
Om het pH-niveau tijdens een antibioticakuur te helpen behouden	Gebruik 1 tube dagelijks aan het einde van uw cursus voor 4-5 dagen
Als u een herhaling van de symptomen merkt rond de tijd van uw menstruatie	Gebruik 1 tube dagelijks aan het einde van de periode voor de 1-2 dagen

Balance Activ® Vaginale Gel is eenvoudig te gebruiken

Draai het deksel eraf en steek de hals van de tube in uw vagina. Knijp de inhoud uit de tube. Blijf in de tube knijpen als u deze verwijderd, en gooi deze dan weg. De beste tijd om Balance Activ® Vaginale Gel gebruiken is rond bedtijd. Het kan raadzaam zijn om een inlegkruisje te gebruiken omdat het product een beetje kan lekken. Dit is normaal en betekent niet dat de behandeling niet heeft gewerkt.

Balance Activ® Vaginale Gel is uitgetest en klinisch getest

Onderzoek heeft aangetoond dat de formule van Balance Activ® Vaginale Gel veilig en effectief is in het herstellen en handhaven van de vaginale pH-balans.

Balance Activ® Vaginale Gel is veilig in het gebruik

Balance Activ® Vaginale Gel wordt geleverd in hygiënische wegwerptubes. Het kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap en tijdens de menstruatie. U moet echter wel uw arts raadplegen als u denkt dat u een vaginale infectie hebt tijdens de zwangerschap. Balance Activ® Vaginale Gel kan een stekende pijn veroorzaken tijdens schimmelinfecties (bijvoorbeeld spruw) of als er scheurtjes zijn in het vaginale weefsel. Dit is slechts tijdelijk.

Wanneer moet u contact opnemen met uw arts?

U moet contact opnemen met uw arts als de symptomen erger worden, als u pijn ervaart, als het ongemak aanhoudt, als de afscheiding bloed bevat of als u afscheiding hebt tijdens de menopauze. U moet uw arts raadplegen als u tijdens de zwangerschap denkt dat u een vaginale infectie hebt. Als de symptomen niet beter worden na het gebruik van Balance Activ® Vaginale Gel volgens de instructies, moet u ook contact opnemen met uw arts voor verder advies.

Praat met uw arts over een mogelijke diagnose van BV.

Wanneer u Balance Activ® Vaginale Gel niet moet gebruiken

Gebruik Balance Activ® niet als u probeert zwanger te worden. Aangezien de gel een lage pH heeft, kan het een omgeving creëren die minder gunstig is voor sperma. Dit is geen anticonceptiemiddel.

Dit pakket bevat 7 wegwerptubes van 5 ml. Niet gebruiken als de tube beschadigd is.

Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum op de tube. Buiten het bereik van kinderen houden.

Inhoud: Melkzuur, glycogeen, propyleenglycol, methylhydroxypropylcellulose, natriumlactaat, water, pH 3,8. Bevat geen conserveringsmiddelen. Zonder hormonen

Let op: Lactal Vaginale Gel kan veilig worden gebruikt tijdens de zwangerschap. U moet echter wel uw arts raadplegen als u denkt dat u een vaginale infectie hebt tijdens de zwangerschap. Gebruik Lactal Vaginale Gel niet als u probeert om zwanger te worden.



Rolf Kuligren AB, Ågatan 4,
646 30 Gnesta Sweden

Distributeur: OTC Medical BV
Markt 30a
2611 GV Delft
Nederland
www.otc-medical.nl

341 11-09



0344

