

Glory of White

Handleiding

Tandenbleek set


Inhoud van de tandenbleek set

1




1x Ledlamp

2

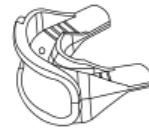


1x Mondstuk

3

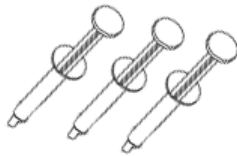

3x Gelspuiten

4

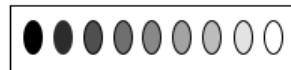

1x Tintengids

5



1x Gebruiksaanwijzing

6



1x Oral Brush doekje


Beginnen met bleken

1




Spoel uw mond en poets uw tanden

2

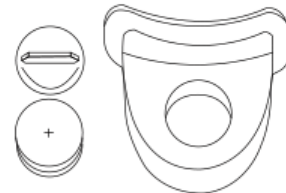


Verwijder het plastic tussen de batterijen

3

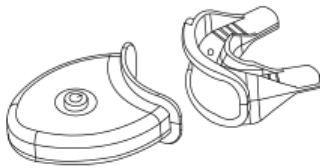

Bevestig het mondstuk op het LED licht

4

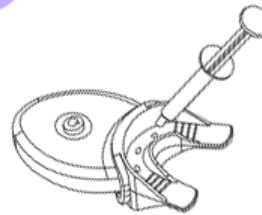

Breng de gel aan in het mondstuk

5



Bleek uw tanden gedurende 30 minuten

6



Spoel uw mond nadat u klaar bent met het bleken

Hoe gebruik ik de tandenbleek set?

1. Spoel het mondstuk met water en poets uw tanden voordat u de tandenbleek set gaat gebruiken.
2. Bepaal aan de hand van de tintengids de tandkleur die nu het beste overeen komt met uw eigen tanden.
3. Verwijder het plastic tussen de twee batterijen van het LED licht. En plaats het siliconen mondstuk op het LED licht.
4. Verwijder het plastic kopje van de gel pen door hier aan te draaien. Breng de gel aan in het mondstuk en op uw tanden, dit geldt voor uw boven en onder tanden. Breng niet teveel gel aan, dit helpt niet om uw tanden sneller/beter te bleken. Gebruik ongeveer 0.5ML – 0.7ML per keer.
(Gebruik de gel alleen voor op het mondstuk of voor op uw tanden. Gebruik dit niet voor op uw lippen, dit zal leiden tot een brandend gevoel dat vanzelf weer weggaat als u het afwast met water)
5. Plaats het mondstuk in uw mond en bijt erop. Activeer vervolgens het LED lampje door op het knopje te drukken.
6. De tandenbleker zal na ongeveer 10 minuten automatisch uitgaan. Wanneer u verder wil met bleken drukt u nogmaals op het knopje.
7. Bleek uw tanden +/- 30 minuten. Na het bleken kan u gerust wat water pakken maar wacht nog even met het nuttigen van andere etenswaren. Dit kan u het beste een half uur na het bleken doen.

Ingrediënten van de gel

Glycerol, Propyleenglycol, Gedeïoniseerd water, Natriumbicarbonaat, Xanthaangom, Aloë-sap, Carbomeer, Menthol, Citroenzuur, Natriumchloriet, Granaatappelzaadolie, Kamille bloem

Opbergen van de tandenbleek set

De tandenbleek set kan u het best bewaren op kamertemperatuur. De gel kan u bewaren in de koelkast.

Houdbaarheid van de gel

12 maanden

Voorwaarden

- Gebruik de tandenbleker niet als uw jonger bent dan 18 jaar.
- Gebruik de tandenbleker niet als u gevoelige tanden hebt.
- Het product is gemaakt om alleen uw tanden te bleken.
- De tandenbleker maakt alleen uw tanden wit en geen vullingen en/of kronen.
- Gebruik de tandenbleker niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
- Gebruik de tandenbleker niet als u allergisch bent voor de ingrediënten.
- Houd het uit de buurt van kleine kinderen.

De tandenbleek set van de Glory of White zorgt ervoor dat u weer een mooi wit gebit krijgt na ongeveer 5 tot 7 behandelingen van 30 minuten. Onze tandenbleek set is getest door 250 vrijwilligers. Het resultaat dat uit deze test naar voren kwam is dat 97% van de gebruikers zeer tevreden was met het resultaat. Zij haalden het resultaat van 6-9 tinten wittere tanden na een behandeling van 5 tot 7 keer. De overige 4% kwam uit op een resultaat van 3-5 tinten wittere tanden.

Wanneer kan ik het best gebruik maken van de tandenbleek set?

Wij raden aan om de tandenbleek set in de avond te gebruiken nadat u hebt gegeten. De reden hiervoor is dat u dan minder kleurstoffen binnen krijgt. Kleurstoffen hebben effect op uw tanden. Om optimaal resultaat te behalen met de tandenbleek set is het dus verstandig om het pas te gebruiken op het moment dat u geen kleurstoffen meer binnen krijgt.