



Importeur:
Koninklijke
Utermöhlen NV
De Overweg 1, 8471 ZA
Wolvega, Nederland
www.heltiq.nl

Changzhou Hualian
Health Dressing Co., Ltd.
No.55 Yuejin Road,
Zouqu Town 213144
Changzhou
PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

EC REP Shanghai
International Holding
Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537
Hamburg, Germany

REF 1200217
554014
V12.20220217



STERILE EO

HeltiQ

jouw eerste hulp

Eilandpleister Watervast

HeltiQ Eilandpleister Watervast biedt een optimale bescherming voor medium en grote wonden onder de douche na bijvoorbeeld een operatieve ingreep. Door de ultradunne en elastische kleefrand rondom het wondkussen komt er geen water bij de wond tijdens het douchen. Dit product is een medisch hulpmiddel.

- Ultradunne en elastische kleefrand
- Hecht niet aan de wond
- Per stuk steriel verpakt

Let op!

Breng na gebruik van de eilandpleister watervast onder de douche, een gewone HeltiQ Eilandpleister aan.
Vervang de eilandpleister regelmatig.

Gebruiksaanwijzing

1. Verwijder de papieren bescherm laag waardoor de kleeflaag vrijkomt.
2. Houd de eilandpleister watervast boven de wond en breng het folie aan. Druk de eilandpleister watervast stevig aan om deze goed aan de huid te laten hechten.
3. Verwijder tenslotte het transparante schutvel aan de bovenzijde van de folie vanuit de split in het midden.

Bewaaradvies

Koel en droog bewaren. Houd de eilandpleisters uit de zon.

LOT HLA2304662

2028-07-15

2023-07-15



Hoe te gebruiken bij:

Snijwond

1 REINIGEN

Spoel de snijwond schoon met HeltiQ Wond & Oog Spray. Dep droog met een steriel gaaskompres.

2 AFDEKKEN

Staan de wondranden uit elkaar? Breng ze dan samen door de HeltiQ Wondhechtstrips te gebruiken. Dek voor het douchen de snijwond af met de eilandpleister watervast. Vervang na het douchen de eilandpleister watervast door een gewone HeltiQ Eilandpleister.

Schaafwond

1 REINIGEN

Spoel de schaafwond schoon met HeltiQ Wond & Oog Spray. Dep droog met een steriel gaaskompres. Maak de huid rondom de schaafwond schoon met een HeltiQ Reinigingsdoekje. Dep droog met een steriel gaaskompres.

2 AFDEKKEN

Dek de schaafwond voor het douchen af met de eilandpleister watervast. Plaats na het douchen een gewone HeltiQ Eilandpleister.

Operatiewond

1 REINIGEN

Reinig de huid rondom de operatiewond met een HeltiQ Reinigingsdoekje. Dep droog met een steriel gaaskompres.

2 AFDEKKEN

Dek voor het douchen de operatiewond af met de eilandpleister watervast. Vervang na het douchen de eilandpleister watervast door een gewone HeltiQ Eilandpleister.

EN
Absorbent
adhesive
dressing
waterproof

For use in the shower to protect medium and large cuts and scrapes or surgical wounds

FR

Pansement
couvrant
adhésif
imperméable

À utiliser sous la douche pour protéger les blessures moyennes et grandes telles que coupures, éraflures ou opératives.

**Wundverband
Wasserdicht**

Zur Verwendung unter der Dusche für die Behandlung von Schnittwunden und Schürfwunden sowie für operative Wunden



Scan de code voor meer informatie over het gebruik van dit product.