



**VULPES GOODS**

BABY CARE

**BABY DOPPLER**

# **INHOUD**

Product informatie	3 - 6
Gebruik	7
Waarschuwingen	8 - 9
FAQ	10
Product parameters	11

# PRODUCT INFORMATIE

Koptelefoon  
Aansluiting

Display

Volume +  
Aan/uit  
Volume -


Speaker

Achterzijde:  
Batterijen

Sonde

Aansluitkabel

## LED Display

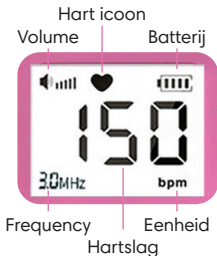

### Volume

Kies het gewenste volume waarop de hartslag te horen is.

### Hart icoon

Het icoon zal knipperen zodra er hartslag is gemeten.

### Batterij

Toont de huidige batterij status.

### Frequency

Toont de huidige frequentie die gebruikt wordt.

### Hartslag

Toont de gemeten hartslag. **Let op:** Als er geen hartslag aanwezig is, zal het scherm - - - tonen. Dit kan soms 3 seconden duren.

### Eenheid

Toont de huidige eenheid die gebruikt wordt.

## **Koptelefoon**

Sluit uw oortjes of koptelefoon aan door deze bovenin in te pluggen.

## **Display**

De display geeft alle benodigde informatie en is toeglicht op de vorige pagina. Kies voor een verlichte display door een keer op de aan/uit knop te drukken zodra het apparaat is ingeschakeld.

## **Volume + / -**

Kies het gewenste volume door op de pijl omhoog of omlaag te drukken. Voor de koptelefoon werkt dit hetzelfde.

## **Aan/uit**

Druk de aan/uit knop in om het apparaat aan te zetten. Druk nogmaals om de display verlichting aan/uit te zetten. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

## **Speaker**

Vanuit de speaker kunt u meeluisteren met de hartslag. Het volume van de speaker wordt bepaald door de volume knop. Zodra u oortjes aansluit, zal de speaker overgaan op de aangesloten oortjes.

## **Sonde**

Door de sonde juist te plaatsen, kunt u meeluisteren met een hartslag. **Let op:** Als er geen hartslag aanwezig is, zal het scherm - - - tonen. Dit kan soms 3 seconden duren.

## **Aansluitkabel**

De aansluitkabel is te verbinden met de sonde. Zorg dat de aansluiting correct is voor de juiste werking.

## **Ultrasone gel**

De meegeleverde gel kunt u te gebruiken tijdens het meten. Dit zorgt ervoor dat het geluid beter geleid wordt.

# GEBRUIK

Om de doppler juist te gebruiken, dient u gebruikt te maken van de juiste batterijen. Check ook altijd of de sonde correct is aangesloten.

Activeer de doppler door de aan/uit knop in te drukken. Meet vervolgens eerst uw eigen hartslag om de werking te checken. Maak gebruik van de juiste gel en vervolgens kunt u aan de slag.

Verwijder de aansluitkabel nooit als de doppler aan staat. Dit kan interne schade veroorzaken en zorgen dat de meting niet klopt.

## **Let op:**

Als de doppler een minuut niet gebruikt wordt, zal de doppler zichzelf uitschakelen. Hierna kunt u de doppler direct weer inschakelen.

# WAARSCHWINGEN

- De doppler is geen speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen. De aanbevolen leeftijd is 16 jaar. Houd kinderen op een veilige afstand van het apparaat.
- Het apparaat werkt op batterijen. Zorg dat er geen water of vocht bij de batterijen komt. Gebruikt u de doppler voor langere tijd niet, verwijder de batterijen dan.
- De bewaartemperatuur van het product mag niet lager zijn dan -10 of hoger zijn dan + 45 graden celsius. Een opslagtemperatuur die te koud of te heet is, verkort de levensduur van het apparaat.
- Zorg dat er direct contact gemaakt wordt met de huid en de gel. Dit verbetert de werking.
- Schakel de doppler uit als u de sonde wenst te verwisselen. Doe dit nooit als de doppler is ingeschakeld.
- Zet het apparaat direct uit wanneer er tijdens gebruik ongebruikelijke geluiden ontstaan of wanneer het apparaat opeens heel erg warm wordt.



- Gebruik het apparaat in een schone en droge omgeving. Laat de doppler niet in aanraking komen met water.
- Zorg dat de sonde schoon blijft. Een vieze of defecte sonde kan zorgen voor een incorrecte meting.

## FAQ

### **Q. Ik hoor geen geluid?**

**A.** Check of de batterijen vol genoeg zijn. Een lage batterij kan resulteren in zachter geluid.

**A.** De probe is niet goed aangesloten, hierdoor is de meting niet correct en kunt u niks horen

### **Q. Als ik geen hart meet, zie ik alsnog een hartslag**

**A.** Het duurt doorgaans 3 seconden voordat de probe hartslag meet. Zodra er geen hartslag aanwezig is ziet u - - - op de display.

### **Q. Hoe weet ik of ik mijn hart meet?**

**A.** Het beeldscherm toont de hartslag en het hart icoon zal gaan kloppen.

### **Q. De sonde meet geen hartslag?**

**A.** Check of u correct meet en de locatie van het hart klopt.

**A.** De sonde kan beschadigd of vies zijn. Hierdoor is de meting incorrect of kan er niks gemeten worden.

**A.** Check of de aansluiting correct is vanaf de aansluitkabel.

# PRODUCT PARAMETERS

Model:	VG-T501
Gewicht :	190Gr
Afmeting (LxBxH):	9.2cm x 3.4cm x 13.5cm
Werktijd:	4 uur
Opslag temperatuur:	-10 - + 45 °C