

## GEBRUIKSAANWIJZING EXTRA VROEGE ZWANGERSCHAPSTESTSTRIPS

De extra vroege zwangerschapstest van [thuistestenkopen.nl](http://thuistestenkopen.nl) is eenvoudig thuis uit te voeren. De test is al 6 dagen voor de verwachte menstruatie uit te voeren. Een zwangerschapstest detecteert het humaan choriongonadotrofine (hCG) in je urine dat al in een zeer vroeg stadium van je zwangerschap aanwezig is.

Bij een vroege zwangerschap neemt het zwangerschapshormoon in de eerste dagen snel toe. Wanneer u test op de dag van de uitgebleven menstruatie, dan kunt u op elk gewenst moment van de dag de test uitvoeren. Test u eerder, dan raden wij aan om ochtendurine te gebruiken omdat de concentratie hCG dan hoger is. Vermijd het teveel drinken, voordat u start met testen.

De resultaten van deze test zijn zeer betrouwbaar (>99%) en gemakkelijk af te lezen van het controlevenster.

Lees voor gebruik aandachtig de testprocedure door!

### Testprocedure


1. Haal de strip uit de verpakking.
2. Vang wat urine op in een schoon bakje of bekertje
3. Dompel de strip in de urine met het pijluiteinde in de richting van de urine.  
Let op! De strip mag niet verder dan de MAX-streep ondergedompeld worden.
4. Houd de strip tenminste voor 15 seconden in de urine zodat de strip voldoende urine bevat.
5. Leg de test op een vlakke niet-absorberende ondergrond met het testvenster naar boven.
6. U ziet nu dat er in het testvenster 1 of 2 lijnen tevoorschijn komen. Lees tussen de 2 en 5 minuten het testresultaat af. Let op: wacht niet langer met beoordelen van de testresultaten dan 10 minuten. Deze uitslag kan namelijk ongeldig zijn.



DOMPEL  
DE STRIP  
IN DE URINE

Dompel de strip  
niet verder dan  
de MAX-streep

### Resultaat

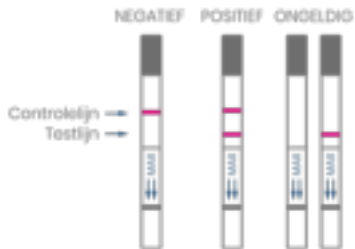

**Negatief (niet zwanger):** als er slechts één roze lijn verschijnt in het controlevenster (C), kunt u ervan uitgaan dat u niet zwanger bent.

**Positief (zwanger):** als er roze lijnen verschijnen in zowel het controlevenster (C) en het testenvenster (T), kunt u ervan uitgaan dat u zwanger bent.

**Ongeldig:** als er geen duidelijke roze-paarse gekleurde lijn zichtbaar is in het testenvenster, is de test ongeldig. Het wordt aanbevolen om in dit geval de test te herhalen. Neem contact op met [thuistestenkopen.nl](http://thuistestenkopen.nl) als het probleem aanhoudt.

## Verpakkingsinhoud

1. Strip in foliezakje
2. Droogmiddel
3. Bijsluiter

## Benodigheden

1. Klok of timer
2. Schoon bakje

## Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

1. Lees deze bijsluiter goed door voordat u begint met testen.
2. Alleen voor in-vitro gebruik
3. Alleen voor extern gebruik, niet doorslikken
4. Gebruik deze test niet na de houdbaarheidsdatum.
5. Open het foliezakje pas wanneer u klaar bent om te testen. Gebruik de test niet wanneer u ziet dat het foliezakje is beschadigd of al open is.
6. Deze test is niet geschikt voor hergebruik. Na gebruik kan de test bij het afval.
7. Raak de absorberende strip van de test niet aan. Houd de test vast aan het blauwe uiteinde.
8. Houd deze test buiten het bereik van kinderen.

## Bewaren

De thuisstestenkopen.nl zwangerschapstrips moeten worden bewaard in het ongeopende foliezakje bij een kamertemperatuur tussen de 2 en 30 °C. Vries de test niet in.

## Beperkingen

1. Vermijd veel drinken voordat u de test uitvoert.
2. Heeft u negatief resultaat, maar vermoedt u toch zwanger te zijn, neem dan contact op met een arts.
3. Vruchtbaarheidsmedicijnen met hCG kunnen misleidende resultaten geven.
4. Buitenbaarmoederlijke zwangerschap, cysten op de eierstokken en menopauze kunnen een vals positieve uitslag geven.
5. Wanneer je de test binnen 8 weken na een bevalling of miskraam uitvoert bestaat er een kans op een vals positieve uitslag. U dient in dit geval een arts te raadplegen voor het interpreteren van het resultaat.
6. Alcohol kan een versturende werking hebben op het resultaat van de test. Vermijd daarom het drinken van alcohol voordat u de test uitvoert.

## Prestatiekenmerken

10mIU/ml = extra vroege zwangerschapstest

## Betekenis symbolen

							
Wanneer u zwanger bent	Uitvoert voor twee personen	Speciaal ontworpen voor zwangere vrouwen	Alleen voor in-vitro gebruik	Alleen voor extern gebruik	Wanneer u zwanger bent 470 mIU/ml 99%	Wanneer u zwanger bent 10 mIU/ml 99%	U kunt deze gebruiken bij externe zwangerschap



THUISTESTENKOPEN.nl