

# Gebruiksaanwijzing

## Mobinova Rollator Compact



### Algemene Veiligheids Tips

Lees deze instructies nauwkeurig door en volg de aanwijzingen op.

Het niet opvolgen van de instructies kan resulteren in verwondingen of schade aan de rollator.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek.

### **Gebruik van de rollator**

Deze lichtgewicht 4-wiels rollator is bedoeld als ondersteuning en hulp voor personen die moeilijkheden ondervinden bij het lopen of ondersteuning nodig hebben voor hun gevoel van balans.

De rollator kan zowel binnenshuis als buitenshuis gebruikt worden, Het frame is opvouwbaar en neemt na opvouwen slechts weinig ruimte in.

### **Veiligheids tips - Do's and Don'ts -**

- Overschrijdt het gewicht van de gebruiker van maximaal 135 kg niet.
- Gebruik de rollator niet op een trap of roltrap.
- Duw de rollator niet als er iemand op de zitting zit.
- Gebruik de zitting niet om een persoon of voorwerpen te transporteren.
- Gebruik de zitting nooit zonder de rugleuning.
- Ga niet op de zitting zitten als de rollator op een hellend vlak staat.

- Gebruik de rollator alleen als hulp bij het lopen.
- Gebruik uitsluitend de geschikte accessoires en door de dealer ter beschikking gestelde onderdelen.
- Voorwerpen moeten uitsluitend in de meegeleverde tas meegenomen worden. Hang geen zware artikelen aan de handgrepen, dit kan de rollator onstabiel maken.

### **Voorzorgsmaatregelen - vóór gebruik -**

- Zorg dat het frame volledig uitgekapt en goed vergrendeld is.
- Controleer de remmen voordat u gaat lopen.
- Verzekert u ervan dat alle delen goed vastzitten en goed functioneren.


### **Voorzorgsmaatregelen -tijdens gebruik -**

- Laat de rollator niet rijden als u zelf op de zitting heeft plaatsgenomen. Ernstige verwondingen bij de gebruiker en/of beschadiging van het frame of de wielen kunnen het gevolg zijn van onjuist gebruik.
- Gebruik de rollator niet om achteruit te lopen.
- Wees voorzichtig bij het passeren van een stoeprand of andere onregelmatigheden. Pas ook extra op bij het lopen over een hellend vlak en ongelijke of gladde ondergrond. Niet voldoende oppassen kan een grote kans opleveren voor een val en/of verwonding.
- Verander geen instellingen aan de rollator tijdens het gebruik.

- Wees extra voorzichtig als u artikelen meeneemt in de boodschappentas (maximaal gewicht 5 kg).
- Zorg ervoor dat alle 4 wielen een constante grip op de weg hebben.
- Zet de rem op de parkeerstand voordat u gaat zitten.
- Als u op de rollator zit, houdt dan altijd de parkeerrem in gebruik.

### Lijst met onderdelen

- A) 1x rollator frame
- B) 2x afneembare voorwielen
- C) 1x boodschappentas

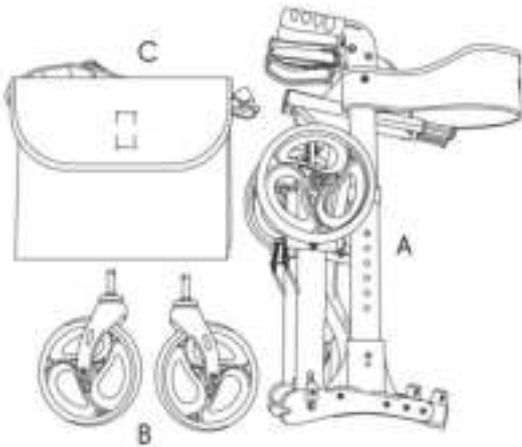

### Uitpakken van de rollator

- Controleer alle onderdelen op beschadigingen voor u de rollator gaat monteren.
- Monteer de rollator niet als een onderdeel beschadigd is of ontbreekt.

### Uitvouwen van de rollator

1. Vouw de achterste 'poten' van het frame naar beneden tot beiden in het frame vallen en vergrendel ze met de rode schuifknopjes.

**Controleer of beide goed zijn vergrendeld.**



2. Vouw de rollator uit door op de beide vlakken van de zitting te drukken, zoals aangegeven in onderstaande foto (wit gemarkeerd).

**BELANGRIJK:** Beide zijdes moeten vastklikken!



3. Schuif de voorwielen in de uitsparingen aan de voorkant van het frame.

**U hoort een 'klik' als de asjes van de voorwielen goed zijn vergrendeld.**



4. Ga nu door met het instellen van de hoogte van de handgrepen. Druk op de knopjes aan de buitenkant en stel de handgrepen in op de juiste hoogte voor u. Controleer of de stand aan beide zijdes gelijk is.



5. Plaats nu de tas over de uitstekende asjes aan de voorkant van de zitting.

### De rollator opvouwen

Ga achter de rollator staan en trek de lus op de zitting omhoog. De zijanten van de rollator vouwen hierdoor naar elkaar toe.



### De rollator dragen

Als de rollator is opgevouwen kunt u de rollator dragen aan de beide handvatten.



### De achterwielen opvouwen

Schuif het rode knopje aan de zijanten naar achteren, u ontgrendelt hiermee de vorken van de achterwielen. Buig het achterwiel dan naar boven en vergrendel de achtervork met de rode schuifknopjes. Doe dit voor beide achterwielen.



### De voorwielen afnemen

Om de voorwielen af te nemen, drukt u op de rode knop boven elk voorwiel. U kunt nu het voorwiel naar beneden trekken en uitnemen.



### De zitting gebruiken

Als u de rollator gebruikt om even uit te rusten, zorg er dan voor dat u zich houdt aan de volgende aanwijzingen:


- Zet de parkeerrem aan voordat u gaat zitten.
- Gebruik de zitting niet zonder dat de rugleuning is aangebracht.
- Gebruik de rollator niet om te zitten als u op een hellend vlak staat.
- Gebruik de rollator niet als u een gewicht heeft van meer dan 135 kg.
- Gebruik de rollator niet als rolstoel

agressieve schoonmaakmiddelen en maak de schoongemaakte delen droog.  
Controleer regelmatig of de rem goed functioneert, de verbindingstukken intact zijn en er geen scheurtjes in het frame zichtbaar zijn.


### Controleren en bediening van de rem

Verzekert u van de juiste werking van de rem voordat u de rollator gebruikt.

Om af te remmen of om te stoppen, knijpt u beide hendels omhoog. Laat de hendels weer los als u de rem-functie wilt opheffen en verder wilt lopen.

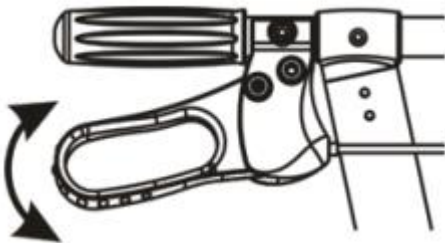

Om de parkeerstand te gebruiken, duwt u de hendels omlaag tot deze vergrendelen en de achterwielen vastzetten.  
U kunt deze parkeerstand weer opheffen door de hendels omhoog te bewegen.

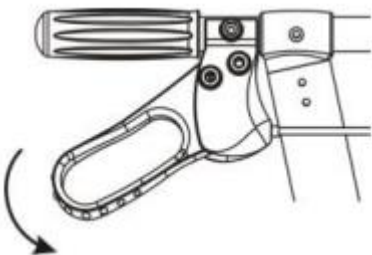

### Onderhoud en schoonhouden

Verwijder vuil altijd direct na gebruik van de rollator. Gebruik hiervoor een schone doek met uitsluitend water en eventueel een zachte reiniger.

Gebruik geen schuurspons of