



Bevestig het uiteinde van de vingerspalk aan de gewenste vinger. Zorg hierbij dat de spalk zich aan de binnenkant van de handpalm bevindt.



Bevestig de polsband. Zorg dat deze stevig aansluit op de huid om het verschuiven van de spalk te voorkomen.



Verstel de banden rond de vinger naar nood. **De onderste band is compleet verstelbaar. Zorg dat deze zich over de onderste vingkoot bevindt.**



Overleg altijd met uw behandeld arts over de draagtijd en frequentie voor het dragen van de vingerspalk.

U-FIT^{ONE}

CE-MARKERING

U FIT ONE LANGE VINGERSPALK

8720618988713

