

# EXCILOR®

## WRATTEN BEHANDELING 2 in 1

### DEZE VERPAKKING BEVAT



Applicator



Schuimtips



Gebruiksaanwijzing

### WAT JE NODIG HEBT



Tissues



Timer

### 2 PRODUCTEN IN 1 APPLICATOR

#### Product 1: BEVRIEZING

Schuimtiphouder  
Bevriezingsreservoir



Alleen DAG 1

#### Product 2: GEL APPLICATOR



DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5

Kinderen:  
1x per dag

Volwassenen:  
2x per dag

### VOOR GEBRUIK DE HELE GEBRUIKSAANWIJZING LEZEN

Bij vragen, neem contact op met de huisarts of apotheker.



Video instructies

#### WAT MOET JE WETEN VOORDAT JE EXCILOR® WRATTEN BEHANDELING 2 IN 1 KUNT GEBRUIKEN

##### Gebruik Excilor® Wratten Behandeling 2 in 1 niet

- Wanneer de wrat zich op een andere plek bevindt dan op de hand of voet;
- Op een bloedende, geïrriteerde of ontstoken huid of huid die tekenen van een ontsteking vertoont zoals jeuk of zwelling;
- Op steeltjes, moedervlekken, donkere vlekken, waterwrattjes (mollusca contagiosa), ouderdoms wrattjes (verruca seborrhoica), of op een schilferende huid;
- Als je twijfelt of de aandoening een wrat is;
- Als je overgevoelig bent voor een van de ingrediënten.

##### ⚠ Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen

1. ALLEEN te gebruiken bij wratten op handen en voeten.
2. Het bevroersmiddel niet inslikken of inademen, alleen gebruiken in een goed geventileerde ruimte.
3. Alleen gebruiken in combinatie met de bijgeleverde schuimtips.
4. Geen onnodige druk zetten wanneer je de schuimtip op het zwarte gedeelte plaatst.
5. De schuimtip maximaal 20 seconden op een gewone wrat plaatsen en maximaal 40 seconden op een voetwrat (lees ook het gedeelte WAT IS EEN WRAT?).
6. Met de schuimtip de huid rondom de wrat niet aanstippen.
7. De schuimtips zijn voor eenmalig gebruik.
8. Het bevroersmiddel is ontvlambaar en kan bevroering op de gezonde huid veroorzaken.
9. Houd het bevroersmiddel niet in de buurt van je gezicht, andere lichaamsdelen of kleding.
10. Bescherm tegen open vuur, ontvlambare bron, warmtebron, direct zonlicht en electrostatische of elektrische bronnen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.
11. Niet in de buurt roken of in de buurt sigaretten aansteken.
12. Het bevroersreservoir niet doorboren, ook niet na gebruik.
13. De behandelgel bevat bijtend zuur.
14. Vermijd contact met ogen en slijmvliezen. Wanneer de gel per ongeluk in contact komt met de ogen of slijmvliezen, met veel water uitspoelen en contact opnemen met de huisarts.
15. Vermijd contact met de gezonde huid rondom de wrat. Tip: gebruik een zalf zoals vaseline om de huid rondom de wrat te beschermen voordat de gel wordt aangebracht.
16. Wanneer de gel in contact komt met de gezonde huid, **het gebied direct met veel zeep en water reinigen om irritatie of een branderig gevoel van de gezonde huid te voorkomen.**
17. Vraag om hulp als je het moeilijk vindt om de gel precies aan te brengen. Bijvoorbeeld op de voetzool.
18. Vermijd contact van de gel met kleding, sieraden, stoffen of meubels, omdat deze mogelijk kunnen beschadigen.
19. Was je handen (behalve het behandelde gebied) direct na de behandeling. Wacht 5 minuten wanneer je een wrat op de hand hebt behandeld.
20. Na gebruik, kan een klein beetje gel achterblijven in de applicator, daarom is voorzichtigheid geboden bij het sluiten en opnieuw openen van de applicator.
21. Stel de behandelde huid niet bloot aan zonlicht totdat de huid er weer normaal uitziet. Dit kan 4 tot

6 weken duren. Huid pigmentatie kan voorkomen door blootstelling aan zonlicht.

22. Raak het behandelde gedeelte niet aan, omdat de wrat besmettelijk is. Krab ook niet aan de wrat, deze moet er vanzelf afvallen.
23. Om persoonlijke hygiëne te waarborgen deze verpakking maar voor 1 persoon gebruiken.
24. Raadpleeg de huisarts wanneer:
  - een stekende sensatie aanhoudt;
  - de wrat niet verdwenen is na 3 behandel cycli;
  - de huid geïrriteerd, rood of pijnlijk is.

##### WAT KUN JE VERWACHTEN?

Gedurende de behandeling, zal zich een laagje met eelt (verharde huidlaag) vormen op de behandelde wrat. Het eelt zal geleidelijk verdwijnen. Een blaar, die misschien niet zichtbaar is voor het blote oog, verschijnt onder de wrat. Wanneer dit gebeurt, zal de verdikte huid van de wrat samen met het virus verdwijnen en eraf vallen.

Om te verifiëren of de wrat verdwenen is, kun je het behandelde gedeelte 5 minuten in handwarm water leggen en het eelt zachtjes afvlijen. Als de huid geen zwarte puntjes (kleine bloedvatjes, typisch bij wratten) vertoont, dan is de wrat verwijderd.

Eelt is geen wrat. Het kan enkele weken duren voordat het eelt verdwenen is en het optimale resultaat zichtbaar is. De nieuwe huid zal er zachter, lichtroze uitzien en zal binnen enkele weken weer een normale kleur krijgen.

##### WAT IS EEN WRAT?

Gewone wratten (verruca vulgaris) en voetwratten (verruca plantaris) verschijnen op de huid als kleine, ruwe 'bloemkoolachtige' vergroeiingen, veroorzaakt door het humaan papilloma virus (HPV virus). Gewone wratten komen meestal voor op handen, vingers of tenen. Voetwratten komen meestal voor op de voetzool of hiel en zijn vaak wat vlakker, harder en pijnlijk bij staan of lopen. Beide typen wratten zijn zeer besmettelijk en 3 van de 4 mensen krijgen wratten tijdens hun leven.

##### HOE WERKT EXCILOR® WRATTEN BEHANDELING 2 IN 1?

Excilor® Wratten Behandeling 2 in 1 is een Medisch Hulpmiddel voor effectief werkende behandeling van gewone wratten en voetwratten. Excilor® Wratten Behandeling 2 in 1 bevat een product met een bevroersmiddel en een product met een gel, gebaseerd op het actieve ingrediënt TCA-Active™, in 1 applicator. Door de kern van de wrat te behandelen met snelle bevroering en de geïnfecteerde huid eraf te peelen, worden de 2 meest gebruikte methoden gecombineerd voor een effectief resultaat. Zowel de dikkere huid van de wrat als het virus worden verwijderd en nieuwe, gezonde huid zal verschijnen.

##### COMBINEREN MET ANDERE BEHANDELINGEN EN/OF MEDICIJNEN

Niet gebruiken in combinatie met andere wrat behandelingen. Er zijn geen interacties met medicijnen bekend, mits de gebruiksaanwijzing wordt opgevolgd.

##### WIE KAN EXCILOR® WRATTEN BEHANDELING 2 IN

##### 1 GEBRUIKEN?

Excilor® Wratten Behandeling 2 in 1 kan gebruikt worden door volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar oud. Volwassenen moeten kinderen behandelen. Bij zwangerschap, borstvoeding, diabetes, wanneer je een slechte bloedcirculatie of een huidaandoening hebt, wordt aangeraden om de huisarts om advies te vragen alvorens Excilor te gebruiken.

##### WAT ZIJN MOGELIJKE BIJWERKINGEN?

Wanneer gebruikt op de gezonde huid, kan een stekende, licht branderige of een pijnlijk gevoel voorkomen op de behandelde huid, wat huidschade kan veroorzaken. Wanneer het stekende, branderige of pijnlijke gevoel aanhoudt tot de volgende applicatie, de behandeling stoppen.

- Complicaties komen niet vaak voor. Het is zeer zeldzaam dat een permanente verkleuring of litteken verschijnt. Dit kan meestal gelinkt worden aan abnormale omstandigheden zoals een verstoorde genezing of een infectie. Mocht dit voorkomen dan dient contact opgenomen te worden met de huisarts.
- Zoals met alle bevroersmethoden kan de huid tijdelijk wit worden.
- Aanbrengen van het bevroersmiddel kan een jeukend, stekend, pijnlijk gevoel tijdens en na het bevroeren veroorzaken dat snel verdwijnt nadat de huid weer ontdooit.
- Een te lange blootstelling aan het bevroersproduct kan de bovenste huidlaag beschadigen, wat resulteert in een litteken of zelfs zenuwbeschade.

##### WAT ZIJN DE INGREDIËNTEN?

Cryo-Active™, TCA-Active™ (gebaseerd op Trichloorazijn Zuur), Carbopol, Water.

##### HOE TE BEWAREN?

Uit het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bewaren in de originele verpakking op kamertemperatuur (15-25 °C) en beschermen tegen zonlicht.

Bescherm tegen open vuur, ontvlambare bron, warmtebron, direct zonlicht en electrostatische of elektrische bronnen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.

De tip van de gelapplicator zorgvuldig reinigen met een tissue na elk gebruik en de applicator goed afsluiten. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum die te vinden is op de applicator en op het doosje. Na opening is het product nog 6 maanden houdbaar.

##### WAT ZIT ER IN DEZE VERPAKKING?

- Een applicator met 2 producten:
  - 11,5 mL e bevroersreservoir met schuimtiphouder en schuimtip
  - 1 mL TCA-Active™ gel applicator
- Zakje met 5 schuimtips
- Gebruiksaanwijzing

##### HOE EXCILOR® WRATTEN BEHANDELING 2 IN 1 TE GEBRUIKEN?

Zie achterkant van de gebruiksaanwijzing

## HOE EXCILOR® WRATTEN BEHANDELING 2 IN 1 TE GEBRUIKEN?

**Dag 1:** bevroingsmiddel aanbrengen ❄️. Volwassenen en kinderen: **één keer**.

**Dag 2, 3, 4, 5:** gelbehandeling 💧. Volwassenen: 2x per dag; Kinderen 4-12 jaar: 1x per dag.

Wanneer Excilor® voor de eerste keer gebruikt wordt, **maar 1 wrat behandelen** voordat begonnen wordt met de behandeling van meerdere wratten, om het effect op je huid te beoordelen. Start met de behandeling van andere wratten wanneer er geen bijwerkingen zichtbaar zijn (normaal binnen 5 dagen). Wanneer meerdere wratten zich heel dicht bij elkaar bevinden (minder dan 1 cm), wachten tot de huid weer hersteld is voordat met de behandeling van andere wratten wordt begonnen (dit kan 6 weken duren).

Wanneer de wrat niet volledig verdwijnt, kan de behandeling tot 3 keer toe herhaald worden. Herhaal de hele behandeling pas **na minimaal 4 dagen tot 1 week rust**. Lees het gedeelte WAT TE VERWACHTEN? om je te helpen beoordelen of de wrat volledig is verwijderd of niet.

Tip: wanneer de behandelde wrat is bedekt met eelt, wordt het aanbevolen om de hand of voet eerst in handwarm water te leggen en het eelt er zachtjes af te vijlen voordat met de behandeling wordt begonnen.

### Dag 1 - BEVRIEZING | Product 1

#### KLAARMAKEN VOOR DE BEHANDELING:




1. Lees de hele gebruiksaanwijzing of bekijk de instructievideo. Verwijder de beveiligingssticker.



Instructievideo



2. Open product 1  
Draai → .

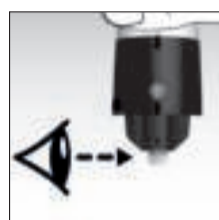

3. Check of de schuimtip in de houder zit.

**LET OP:** wanneer je product 1 voor de tweede keer gebruikt, plaats een nieuwe schuimtip in de zwarte schuimhouder. Een gebruikte schuimtip niet opnieuw gebruiken.

#### BEHANDELING AANBRENGEN:

**TIP: Lees stap 4-8 voordat je verder gaat!**



4. Stabiliseer product 1 op de tafel gedurende de hele procedure.



5. Plaats de ❄️ symbolen op 1 lijn.  
**Niet draaien of indrukken.**



6. **STEVIG DRUKKEN gedurende 1 seconde.**  
Trek dan het zwarte gedeelte met de schuimtip van het blauwe reservoir.

1  
SEC.

**LET OP:** Wanneer het indrukken te lang heeft geduurd, kan onveilige, koude vloeistof vrijkomen uit de applicator. Dit is erg koud maar onveilig. Wanneer dit in contact komt met gezonde huid, onmiddellijk afwassen.



7. **WACHT 20 seconden** totdat een optimale temperatuur is bereikt, een wit ijszige substantie en onveilige condensatie zal verschijnen.

20  
SEC.



8. **DRUK 20 SECONDEN LICHT** op de wrat.

**LET OP: 40 seconden** voor voetwratten met een dikkere eeltlaag.

20  
SEC.

#### NA DE BEHANDELING:



9. **Wacht 2 minuten** voordat je met een tissue de schuimtip verwijdert en weggooit.

**LET OP:** Om nog een wrat te behandelen vanaf stap 3 herhalen.

2  
MIN.



10. Draai product 1 dicht.  
Draai → totdat een klik hoorbaar is.  
**Niet indrukken.**




### Dag 2, 3, 4, 5 - GEL | Product 2

#### KLAARMAKEN VOOR DE BEHANDELING:



1. Open product 2.  
**Plaats** tegenover en trek open.

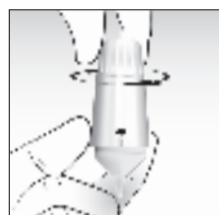

2. - Houd **product 2 vertikaal**.  
- Draai met de klok mee.  
- Neem een korte pauze tussen de kliks totdat de gel verschijnt in de transparante tip.  
- Maak de tip schoon en klik daarna één keer voor de juiste dosis.

**LET OP:** Bij het eerste gebruik: het kan zijn dat een paar volledige draaien (tot 8 keer) nodig zijn om voldoende druk op te bouwen om het luchtdichte zegel te doorbreken, zodat de gel vrijkomt in de tip.

#### BEHANDELING AANBRENGEN:


**TIP: Lees stap 3-8 voordat je verder gaat.**



3. Breng **één druppel (één klik) precies** aan op de wrat. Als één druppel niet voldoende is om de hele wrat te bedekken, breng dan nog een druppel gel aan.



**Wanneer de bijtende gel per ongeluk contact maakt met gezonde huid, de huid onmiddellijk wassen met zeep en water om irritatie of een branderig gevoel van de gezonde huid te voorkomen.**

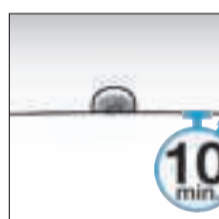

4. **Wacht 10-15 minuten** voordat je sokken, schoenen of handschoenen aantrekt.

10 min ~ 15 min


#### NA DE BEHANDELING:



5. Reinig de tip met een tissue.



6. Vergrendel product 2.

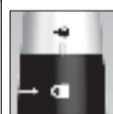

7. Vermijd zonlicht gedurende 4-6 weken.



8. Herhaal de behandeling **twee keer per dag gedurende 4 dagen**.

**Voor kinderen 4-12 jaar:** de gel maar **1 keer per dag aanbrengen**.

**FABRIKANT**  
Medical Brands  
Innovations B.V.,  
Piet Heinkade 199,  
1019 HC Amsterdam,  
the Netherlands.

**DISTRIBUTEUR**  
Vemedica BV  
Verrijn Stuartweg 60  
1112 AX Diemen  
Vemedica Informatielijn  
0900-2333666 of www.vemedica.nl

De gebruiksaanwijzing is voor het  
laatst herzien in December 2017

CE 0086

100CAVE.NL.I.00