


NLFR
medisana.

NL **Gebruiksaanwijzing**
Anti-allergieapparaat Medinose 2 Slim

Apparaat en bediening

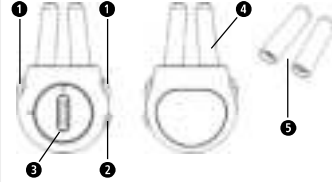

- 1 Verstelmecanisme van het neusstuk
- 2 Aan-/uitknop
- 3 Klep batterijvak
- 4 Neusstuk incl. beschermkapjes
- 5 Extra beschermkapjes voor neusstuk

Legenda



BELANGRIJK!

Wanneer deze gebruiksaanwijzing niet in acht wordt genomen, kan dit leiden tot ernstige verwondingen of schade aan het apparaat.



WAARSCHUWING

Deze waarschuwingen moeten worden nageleefd om mogelijk letsel van de gebruiker te voorkomen.



ATTENTIE

Deze aanwijzingen moeten worden nageleefd om mogelijke beschadigingen aan het apparaat te voorkomen.



TIP

Deze aanwijzingen geven u nuttige extra informatie over de installatie of de werking.



Apparaatclassificatie: Type BF



LOT-nummer



Serienummer



Modelnummer



Aanduiding beschermtype tegen vreemde voorwerpen en water



Beschermen tegen vocht!



Gemachtigde EU-vertegenwoordiger



Producent



Productiedatum



Voldoet aan de eisen van:
MDD93/42/EEC, gewijzigd door
2007/47/EC

ER Geen risico conform EN 62471:2008

NL **Veiligheidsinstructies**



Lees de gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsinstructies zorgvuldig door, voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef deze gebruiksaanwijzing ook altijd mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.

Gebruik volgens de voorschriften

Effectieve verlichting van allergische rhinitis en hoikoorts door het gebruik van rood licht en infraroodlichttherapie.



- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Wanneer het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt, vervalt de garantie.
- De beoogde gebruiker is de patiënt. Patiënten kunnen het apparaat volledig zelf bedienen.
- Het product kan door patiënten worden gebruikt zonder professionele, medische ondersteuning.
- Tijdens het gebruik mag er geen onderhoud aan het apparaat worden uitgevoerd.
- Wanneer kinderen onder de 16 jaar dit product gebruiken, moeten ze onder toezicht staan van een volwassene.
- Het apparaat is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar.
- Kinderen jonger dan 6 jaar mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Het bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt. Neem onmiddellijk contact op met een arts wanneer onderdelen zijn ingeslikt.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen met een pacemaker of andere medische implantaten en door personen met poliepen, gevoelig neusslijmvlies of een slechte doorbloeding.
- Kijk niet direct in de lichtstralen, ook niet wanneer u een optisch hulpmiddel (bijv. bril) gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare of verdoovende gassen.
- Stop onmiddellijk met het gebruik wanneer u zich tijdens het gebruik niet goed voelt of pijn heeft en raadpleeg een arts.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Laat het apparaat niet vallen en repareer of verander het niet.
- Neem contact op met de klantenservice indien er zich onverwachte situaties voordoen.
- Stel het apparaat nooit bloot aan direct zonlicht en bescherm het tegen vuil en vocht.
- Leg nooit zware voorwerpen op het apparaat.

Levering

Controleer eerst of het apparaat compleet en onbeschadigd is. Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met uw verkoper of de servicedienst. Meegeleverd:

- 1 **medisana** anti-allergieapparaat **Medinose 2 Slim**
- 2 paar beschermkapjes voor neusstuk
- 4 batterijen CR2032, 3V
- 1 gebruiksaanwijzing

Wanneer u bij het uitpakken transportschade ontdekt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw verkoper.



WAARSCHUWING
Houd verpakingsfolie uit handen van kinderen! Er bestaat gevaar voor verstikking!

Batterijen plaatsen/vervangen

Open de klep van het batterijvak 3 aan de achterkant van het apparaat en plaats de beide meegeleverde CR2032, 3V-batterijen op de juiste wijze. Sluit het batterijvak weer door de klep met de wijsers van de klok mee te draaien tot de pijltjes naar elkaar wijzen. Let op de polariteit. Als de batterijen bijna leeg zijn, knippert het rode lampje en klinkt er een alarm om aan te geven dat de batterijen moeten worden vervangen.



VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES BATTERIJEN

- Maak de batterijen niet open!
- Verwijder batterijen die bijna leeg zijn meteen uit het batterijvak, omdat ze kunnen gaan lekken en het apparaat kunnen beschadigen!
- Verhoogd risico op lekken, voorkom contact met de huid, ogen en slijmvliezen!
- Spoel bij contact met batterijzuur de aangedane huid onmiddellijk ruimschoots met schoon water en raadpleeg meteen een arts!
- Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer een batterij is ingeslikt!
- Vervang alle batterijen altijd gelijktijdig!
- Plaats alleen batterijen van hetzelfde type, gebruik geen verschillende types of gebruikte en nieuwe batterijen tegelijk!
- Plaats de batterijen op de juiste wijze en let daarbij op de polariteit!
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen!
- Laad de batterijen niet opnieuw op! Explosiegevaar!
- Niet kortsluiten! Explosiegevaar!
- Niet in het vuur gooien! Explosiegevaar!
- Gooi gebruikte batterijen en accu's niet bij het huisvuil, maar zamel ze apart in of lever ze in bij een winkel waar batterijen worden verkocht.

Gebruik

- Maak de beschermkapjes 4 schoon met een licht vochtige, pluisvrije doek. De kapjes beschermen het gevoelige apparaat tegen het indringen van vocht.
- De extra kapjes 5 zijn nuttig wanneer bijv. een ander het apparaat gebruikt.
- Steek het neusstuk incl. beschermkapjes 4 zo ver in de neus als nog aangenaam is. Door aan beide zijden op het verstelmecanisme 1 van het neusstuk te drukken, kan het neusstuk gemakkelijker in de neus worden gestoken en uit de neus worden gehaald.
- Druk de aan-/uitknop 2 gedurende ca. 1 seconde in om het apparaat in te schakelen. Het rode licht in beide golf lengtes wordt geactiveerd.
- Een therapiecyclus duurt ongeveer drie minuten. Als de cyclus is beëindigd, gaat het apparaat automatisch uit en klinken er 2 signalen. Druk gedurende ca. 1 seconde op de aan-/uitknop 2 als u het apparaat tijdens de behandeling wilt uitschakelen.
- Na en voor ieder gebruik dient u de beschermkapjes 4 grondig schoon te maken.
- De **medisana Medinose 2 Slim** kan tweemaal daags worden gebruikt met een pauze van vijf tot zes uur tussen de behandelingen.



TIP

Stop onmiddellijk met de behandeling indien u dit ervaagt als onaangenaam of pijnlijk en schakel het apparaat uit. Vraag uw arts om advies.

Schoonmaken en onderhoud

- Haal de batterijen uit het apparaat als u het gedurende langere tijd niet gebruikt. Zo voorkomt u dat de batterijen leeglopen en gaan lekken.
- Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of harde borstels. Maak het toestel schoon met een zachte, licht vochtige doek. Er mag geen water in het apparaat komen.
- Bewaar het apparaat nadat het is schoongemaakt op een koele, goed geventileerde plaats buiten het bereik van kinderen.
- Het apparaat heeft geen onderdelen die moeten worden onderhouden. Neem contact op met de klantenservice als u nog vragen heeft.

Weggoien

Dit apparaat mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Elke consument is verplicht alle elektrische of elektronische apparaten, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of niet, naar het plaatselijke afvalafscheidingsstation te brengen of in te leveren in de winkel waar een nieuw, vergelijkbaar apparaat wordt gekocht, zodat ze milieuvriendelijk kunnen worden verwerkt. Neem over de afvoer en verwerking contact op met uw gemeente of uw verkoper.

Problemen oplossen

Probleem: U kunt het apparaat niet aanzetten.
Oplossing: Batterijen zijn leeg of niet op de juiste wijze geplaatst. Controleer de batterijen en zet het apparaat aan.

Technische gegevens

Naam en model: **medisana** anti-allergieapparaat **Medinose 2 Slim**
Modelnr.: MC-004
Voeding: 2 x CR2032 lithiumbatterijen, 3 V =
Toegepaste technologie: lichttherapie met gebruikmaking van 2 golf lengtes neusgaten
Plaats van lichttherapie: 660 nm (+/- 5 nm) en 940 nm (+/- 5 nm)
Gebruikte golf lengtes: ca. 3 minuten, tweemaal daags
Gebruikstijd: 2 jaar, onder normale gebruiksvoorwaarden
Levensduur: ca. 30 behandelingen van telkens 3 minuten
Levensduur batterijen: -5 °C~40 °C (-41 °F~104 °F) / 30% - 80% rel. luchtvochtigheid
Gebruikstemperatuur: -20 °C~55 °C (-4 °F~131 °F) / < 93% rel. luchtvochtigheid

Bewaartemperatuur: -20 °C~55 °C (-4 °F~131 °F) / < 93% rel. luchtvochtigheid

Veiligheidsklasse: IP22
Afmetingen ca.: 64 x 40,4 x 16 mm
Gewicht ca.: 14 g (zonder batterijen)
Artikelnummer: 99456
EAN-nummer: 40 15588 99456 2

In het kader van voortdurende productverbeteringen behouden wij ons het recht op wijzigingen voor op technisch gebied en qua vormgeving.

De meest actuele versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u vinden op medisana.com

Garantie en reparatie-voorwaarden

Wendt u zich voor garantiegevallen altijd tot uw leverancier of tot onze klantendienst. Moet u het apparaat opsturen, stuur het dan samen met de klacht en een kopie van de aankoopbon naar onze klantendienst. Voor garantie gelden de volgende voorwaarden:

1. Voor de producten van **medisana** geldt een garantietermijn van drie jaar vanaf de datum van aankoop. Deze kan door middel van de verkoopbon of factuur worden aangetoond.
2. Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal of fabricagefouten worden binnen de garantietermijn gratis verholpen.
3. Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging van de garantietermijn, noch voor het apparaat zelf noch voor de vervangen onderdelen.
4. Uitsloten van garantie zijn:
 - a. Alle schade die ontstaan is door ondeskundige behandeling, b.v. het niet op de juiste wijze volgen van de gebruiksaanwijzing
 - b. Beschadigingen, die zijn ontstaan door reparaties door de koper of een ander onbevoegd persoon.
 - c. Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar de gebruiker of tijdens het opsturen naar de klantendienst.
 - d. Toebehoren, die onderhevig zijn aan slijtage.
5. De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte vervolgschade die door het apparaat veroorzaakt wordt. Ook niet als de schade aan het apparaat als garantiegeval erkend is.

Netop Industrial Company Limited
Dapu Industrial Estate, Gangzi Village, Changping Town,
Dongguan City, Guangdong Province, China
Tel. +86 (769) 83999008, Fax +86 (769) 83999238

EC REP WellKang Ltd, 16 Castle St, Dover, CT16 1PW, England, UK;
Suite B, 29 Harley Street, LONDON W1G 9QR, England, UK
sowie im Falle eines harten Brexit ohne Übergangsphase:
The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ireland
Tel: +44 (20) 32876300; +353 (1) 44 33 560
Web site: www.CE-marking.com

geïmporteerd & gedistribueerd door
MEDISANA GmbH, Jagenbergstraße 19, 41468 NEUSS, DUISLAND