


# GEBRUIKSAANWIJZING DRUGSTEST DIPCARD THC

## Zelftest en alleen voor in-vitro-diagnostisch gebruik

De THC-drugstest van Telano is een immuno-chromatische test voor de kwalitatieve detectie van THC (marihuana en hasj) in de menselijke urine. Lees voor het gebruik van de test zorgvuldig deze handleiding door voor een betrouwbaar testresultaat en een juiste interpretatie van het testresultaat. Deze test is geschikt voor professioneel- en thuisgebruik.

### Testprocedure

1. De test en urine dienen op kamertemperatuur te zijn. (tussen 15 en 30°C)
2. Haal de dipcard uit de folieverpakking.
3. Vang wat urine op in een schoon bakje of bekertje.
4. Verwijder de dop van de dipcard en dompel de strip in de urine.  
**Let op!** Laat de urine niet in contact komen met het plastic gedeelte van de test.
5. Houd de strip 10 - 15 seconden in de urine zodat de strip voldoende urine bevatten.
6. Plaats de dop terug op de dipcard en leg de test op een vlakke niet-absorberende ondergrond met het testvenster naar boven.
7. Wacht 5 minuten. (Start de timing direct nadat de dipcard uit het urinemonster is gehaald.) U ziet dat er in het testvenster 1 of 2 lijnen tevoorschijn komen. Lees het resultaat af na 5 minuten.  
**Let op:** wacht niet langer met beoordelen van de testresultaten dan 10 minuten. Na 10 minuten is het testresultaat niet meer betrouwbaar.

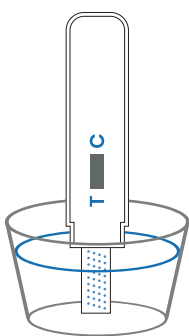

**1**


DOMPEL DE TEST  
IN DE URINE

**2**

LEG DE TEST OP EEN  
VLAKKE ONDERGROND

**3**

LEES HET RESULTAAT  
NA 5 MINUTEN AF

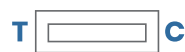

### Resultaat

**Negatief:** Er verschijnen 2 lijnen in het testvenster. Zowel de testlijn (T) als de controlelijn (C) zijn zichtbaar. Er is geen afbraakproduct van de geteste drugs gevonden in de urine of de concentratie van de drugs ligt onder de aantoonbaarheidsgrens (cut-off) van de test.

**Let op:** De kleurintensiteit van de (C) en (T) lijn kan variëren. Ook een licht gekleurde (T) lijn is negatief.

**Positief:** Er verschijnt alleen een controlelijn (C). De testlijn (T) verschijnt niet. Dit betekent dat afbraakproducten van THC in het urinemonster gedetecteerd zijn.

**Ongeldig:** Er verschijnt geen lijn in het controle(C)venster. Herhaal de test met een nieuwe test. Het kan zijn dat er niet genoeg urine is geabsorbeerd. Blijft het probleem aanhouden, neem dan contact op met Telano.

### Verpakkingsinhoud

1. Een drugstest
2. Droogmiddel
3. Gebruiksaanwijzing

### Benodigheden

1. Klok of timer
2. Schoon bakje

### Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

1. Lees deze bijsluiter goed door voordat u begint met testen.
2. Alleen voor in-vitro-diagnostisch gebruik.
3. Alleen voor uitwendig gebruik, niet doorslikken
4. Gebruik deze test niet na de houdbaarheidsdatum.
5. Open het foliezakje pas wanneer u start met testen. Gebruik de test niet wanneer u ziet dat het foliezakje is beschadigd of al open is.
6. Deze test is niet geschikt voor hergebruik. Na gebruik kan de test bij het afval.
7. Raak de absorberende strip van de test niet aan.
8. Houd deze test buiten het bereik van kinderen.

### Bewaren

De Telano-drugstest moet worden bewaard in het ongeopende foliezakje bij een temperatuur tussen de 2 en 30°C. Bewaar niet in de buurt van direct zonlicht, warmte en vocht. Vries de test niet in.

## Wanneer testen?

U kunt op elk moment van de dag de urine gebruiken voor de THC-drugstest. De minimale detectietijd voor het testen op THC is 1-3 uur na gebruik.

## Hoelang is THC aantoonbaar in de urine en wat is het cut-off level?

THC is maximaal 1 tot 7 dagen na gebruik aantoonbaar in de urine.

Factoren als lichaamsgewicht en de mate van gewenning kunnen invloed hebben op het aantal dagen dat THC nog aantoonbaar is in de urine. Bij regelmatig gebruik kan cannabis tot wel 20 dagen aantoonbaar zijn in de urine. De THC-drugstest van Telano is zeer gevoelig waardoor een zeer kleine concentratie al te detecteren is. Het cut-off level of ook wel grenswaarde van de THC drugstest is 50 ng/ml. De drugstest geeft een positief resultaat wanneer de grenswaarde wordt bereikt of overschreden wordt.

Blijf in geval van een positief testresultaat kalm en probeer rationeel te denken en te handelen. Schakel eventueel de hulp in van de huisarts of een verslavingszorginstelling.

## Beperkingen

1. Een negatief resultaat betekent niet altijd dat de urine drugsvrij is. Er kunnen negatieve resultaten worden verkregen wanneer de drugs aanwezig zijn, maar onder het cut-off level. (50 ng/ml)
2. Het is mogelijk dat door bepaalde factoren zoals een technische fout of door bepaalde substanties in de urine het testresultaat beïnvloed kan worden.
3. Vervalsmiddelen zoals bleek en/of aluin in de urinemonsters kunnen tot onjuiste resultaten leiden. Zorg ervoor dat er in de ruimte geen vloeistoffen aanwezig zijn die in plaats van de urine in de beker gegoten kunnen worden. Gemanipuleerde urine kan een chloor, citroen of andere geur hebben. Tevens kan de urine schuimen wanneer deze gemanipuleerd is. Wanneer u manipulatie van het urinemonster vermoedt, dan moet u de test opnieuw uitvoeren met een nieuw urinemonster.

De volgende componenten/medicijnen geven een positief resultaat aan de THC test:

II-nor- $\Delta^9$ -THC-9-COOH	Resultaat
(II-nor- $\Delta^9$ -THC-9-COOH, Cutoff = 50ng/mL)	Positief vanaf 50ng/mL
II-hydroxy- $\Delta^9$ -Tetrahydrocannabinol	Positief vanaf 15000ng/mL -
Tetrahydrocannabinol $\Delta^8$	Positief vanaf 8000ng/mL -
Tetrahydrocannabinol $\Delta^9$	Positief vanaf 7000ng/mL
Cannabinol	>200000

## Presatiekenmerken

Uit laboratoriumtesten met een GC/MS (chromatografie / massaspectrometrie) is gebleken dat de Telano drugstesten een betrouwbaarheid hebben van 97,5%.

## Betekenis symbolen



Houdbaar tot



LOT nummer



Deze verpakking bevat een test



Alleen voor in-vitro gebruik



Niet opnieuw gebruiken



Bewaren tussen 2°C en 30°C



Buiten bereik van kinderen bewaren



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing



Fabriek: W.H.P.M. Bioresearch & Technology Co., Ltd.  
No. 2 Zhongxin Street, Louzizhuang, Jinzhan Xiang,  
Chaoyang District, Beijing, 10018 P.R. China



Medical Device Safety Service GmbH  
Schiffgraben 41, 30175 Hanover, Germany

FDA CE 0197



Telano