

Digitale Kalenderklok

Gebruikshandleiding - Nederlands




Product Overzicht

De digitale kalenderklok is speciaal ontworpen voor ouderen en in het bijzonder voor mensen die te maken hebben met dementie, alzheimer of slechtziendheid.


De klok zorgt voor een extra grote weergave van de tijd, niet afgekorte dag, dagdeel en maand. Ook heeft de klok een herinneringsalarm voor medicijnen en afspraken enz.



De belangrijkste knoppen

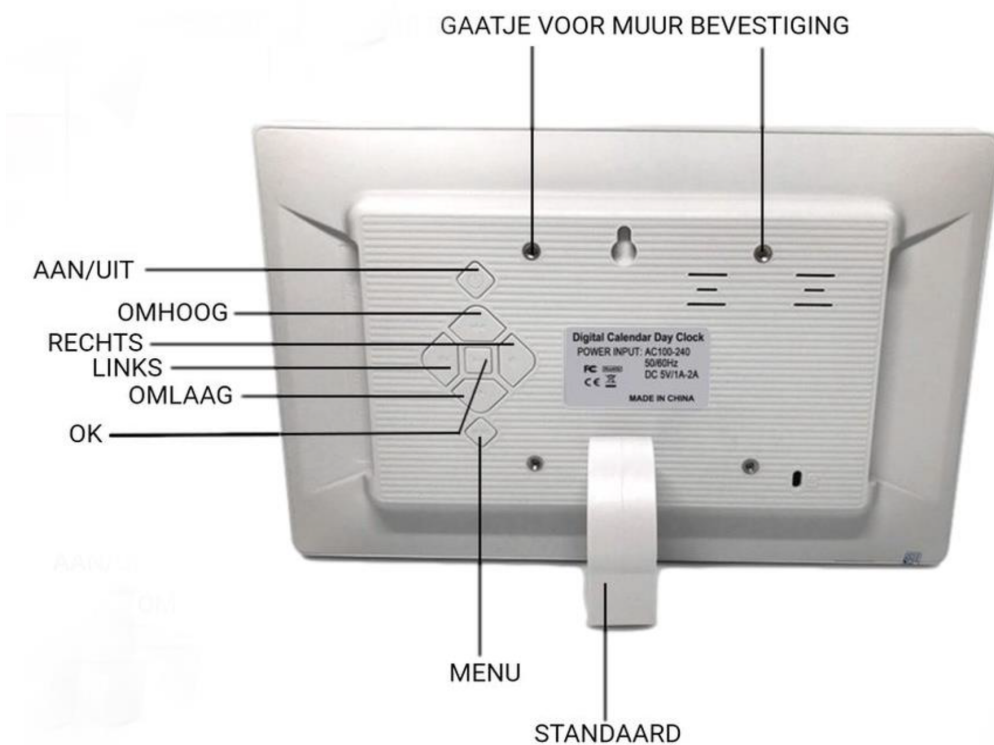

※ Verschillende grootte model, de knoppen en vorm zijn misschien anders, maar de functies zijn precies hetzelfde.

- (1) : De aan-knop. Druk eenmaal om de klok uit te zetten, druk opnieuw om de klok weer aan te zetten.

- (2) : Selectieknoppen omhoog, omlaag, links, rechts.

- (3) : Bevestigingsknop. Druk op deze knop om de geselecteerde inhoud te bevestigen.

(Opmerking: Houd deze knop 2 seconde ingedrukt om te wisselen tussen de verschillende weergaves (analoge en verschillende digitale weergaves).




- (4)  : Instellingenknop. Druk op deze knop om het instellingenmenu te openen.

Gebruiksaanwijzing:

1. Sluit de 5V/2A voedingsadapter aan op de DC-poort op de klok. De klok gaat aan.

2. Druk op de menuknop aan de achterkant van het apparaat om het instellingenmenu te openen:

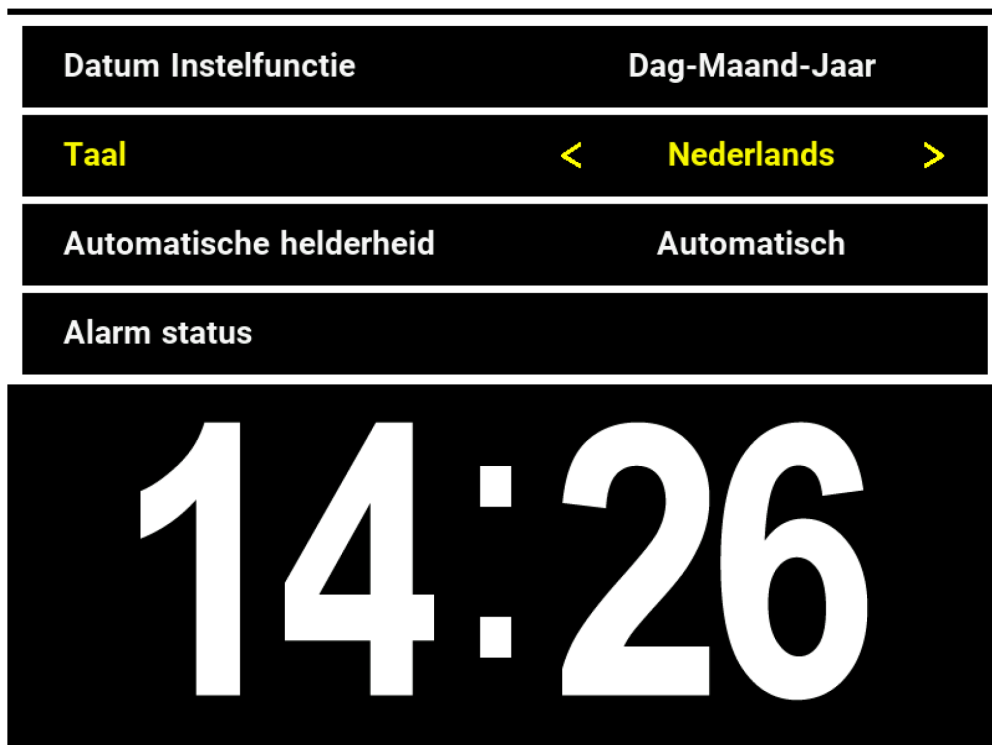

Hieronder uitleg per regel van het instellingen menu:

- (1) Tijd instellen: Pas de huidige tijd aan. De gebruiker kan de uren en minuten instellen. Druk op de links, rechts, omhoog, omlaag en OK knop om aan te passen.
- (2) Datum instellen: Pas de huidige datum aan. Druk op de links, rechts, omhoog, omlaag en OK knop om aan te passen.
- (3) Tijdmodus: Pas de tijdmodus aan. U kunt kiezen uit 12 uurs en 24 uurs weergave. Druk op de links, rechts en OK knop om aan te passen.
- (4) Datummodus: Stel de datumweergavemodus in. U kunt kiezen uit Dag-Maand-Jaar en Maand-Dag-Jaar weergave. Druk op de links, rechts en OK knop om aan te passen.

(5) Taal: Kies verschillende talen voor verschillende landen. Er zijn meerdere talen zoals Engels, Frans, Duitsland, Italiaans, Spaans, Nederlands, Fins, Zweeds enz. Druk op de links, rechts en OK knop om aan te passen.

(6) Automatische helderheid: Auto, Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4, Niveau 5. Druk op de links, rechts en OK knop om aan te passen.

Auto: De klok past de helderheid van het scherm automatisch aan op verschillende tijdstippen;

Level 1: minimale helderheid;

Level 5: maximale helderheid.

(7) Alarm instellingen: druk op de OK knop om de alarm instelling te openen.


- Alarm toevoegen: Druk op de OK knop om een alarm toe te voegen. De gebruiker kan maximaal 25 alarmen instellen;
- Tijd instellen: Druk op de OK knop, omhoog en omlaag om de tijd in te stellen voor dit alarm;
- Datum instellen: Druk op de OK knop, omhoog en omlaag om de datum voor dit alarm in te stellen;
- Herhalen instellen: Druk op de OK knop om herhalen of geen herhaling in te stellen voor dit alarm. De gebruiker kan de herhaling instellen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Druk op de omhoog, omlaag en OK knop om herhalen in te stellen;

- **Opmerking:** Een tag instellen voor dit alarm. Met keuze uit: Maaltijd, Medicijnen, Kliniek, Douche, Tuinieren, Schoonmaak, Afspraak, Hondje uitlaten enz. Druk op de omhoog, omlaag en OK knop om aan te passen;
 - **Activeer Alarm:** Druk op de links, rechts en OK knop om dit alarm aan of uit te zetten;
 - **Alarm Verwijder:** Druk op de OK knop om dit alarm te verwijderen.
- (8) **Geavanceerde modus:** Zet de geavanceerde modus aan of uit. De klokweergave/display zal Ochtend / Middag / Avond / Nacht enz. weergeven Als de geavanceerde modus is ingeschakeld. Druk op OK, links en rechts knop om aan te passen;
- (9) **Volume:** De gebruiker kan het volume instellen van 0-30. Druk op de links, rechts en OK knop om aan te passen;
- (10) **Lettertypekleur:** De gebruiker kan verschillende lettertypekleuren kiezen voor de digitale en analoge klok. witte, gele, blauwe kleur zijn beschikbaar.

Digitale fotolijst functie

Deze klok heeft een SD-kaartingang en een USB-poort. Hiermee ondersteunt de klok het afspelen van foto's en video's vanaf een SD-kaart of USB-stick.

Bedieningsstappen: Download foto's of video's naar uw SD-kaart of USB-stick, plaats deze in de SD-kaartingang of USB-poort op de klok, deze wordt automatisch afgespeeld.

Opgelet: Er zijn verschillende softwareversies, de gebruiker moet mogelijk op de OK knop drukken  om foto's of video's af te spelen als het niet automatisch wordt afgespeeld.

Afstandsbediening Functie

1. Rode knop: Dit is de aan/uit knop, bedoeld om de klok aan en uit te zetten.
2. OK/Enter knop: Deze knop heeft 2 functies, namelijk:
 - Houd deze knop ingedrukt om te wisselen tussen de verschillende tijdweergaves (analoge en verschillende digitale weergaves).
 - Druk kort op deze knop om de instellingen te bevestigen wanneer u in het instellingenmenu bent.
3. Exit/Setup Knop
Druk kort op deze knop om het instellingenmenu te openen/sluiten (Hier kunt u onder andere de taal en de tijd/datum wijzigen).
4. Selectieknoppen omhoog, omlaag, links, rechts.

